

## Instrukcja obsługi

Opaska elastyczna stawu kolanowego

Kod produktu: TGO-C OSK 515



Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

**[www.timago.com](http://www.timago.com)**



## **1. Wstęp**

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

## **2. Wykonanie**

Opaska elastyczna stawu kolanowego wykonana jest w systemie bezszwowym z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej. Anatomiczny kształt jest odpowiednio dopasowany do stawu kolanowego i wpływa na ukierunkowanie kompresji oraz precyzyjną stabilizację. Nowoczesna i przestrzenna tkanina pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, przez co ogranicza rozwój flory bakteryjnej.

## **3. Zastosowanie**

Opaska elastyczna należy do grupy wyrobów medycznych wykorzystywanych w celu stabilizacji stawów oraz łagodzenia dolegliwości bólowych w przeciążeniach mechanicznych występujących, m.in. w sporcie.

### **Wskazania do stosowania opaski:**

- Zespoły bólowe stawów spowodowane przeciążeniami i mikrourazami
- Niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł
- W celu profilaktyki przeciążeń i urazów

#### 4. Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku:

- Otarć naskórka
- Egzem skórnych
- Ran oraz innych uszkodzeń skóry
- Po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających,
- Indywidualnych przeciwwskazań, które określone zostały przez lekarza w badaniu podmiotowym i przedmiotowym.

#### 5. Uwagi i zalecenia

- **Uwaga!** Nie należy stosować wyrobu bez konsultacji lekarskiej.
- **Uwaga!** Wyrób należy stosować ściśle według zaleceń lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.
- **Nie należy stosować** wyrobu w przypadku przeciwwskazań wymienionych w pkt. 4.
- **Uwaga!** Aby opaska spełniała swoją funkcję musi być odpowiednio wyregulowana oraz właściwie dobrana pod względem rozmiaru. Zbyt luźna lub ciasna może powodować otarcia naskórka.
- **Uwaga!** Należy pamiętać, że czas stosowania opaski musi być systematycznie skracany i określony przez lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę, który posiada odpowiednie kwalifikacje medyczne.
- **Uwaga!** Należy systematycznie kontrolować stan wyrobu i niezwłocznie zgłosić do punktu sprzedaży wszelkie uszkodzenia budzące wątpliwości, co do bezpieczeństwa korzystania z wyrobu.
- **Nie należy** dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych.

**UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Sposób zakładania

**Uwaga!** Nie należy korzystać z wyrobu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń.

**Uwaga!** Podczas zakładania opaski należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z silnymi dolegliwościami bólowymi w obrębie kończyny dolnej, oraz o obniżonej sprawności ruchowej mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która ma odpowiednie umiejętności.

- Opaskę elastyczną należy naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.

**Uwaga!** Należy pamiętać, że jedynie właściwie dobrany rozmiar opaski może zmniejszyć dolegliwości bólowe.

**Uwaga!** Długotrwałe stosowanie opaski może powodować obniżenie napięcia mięśniowego i upośledzenie funkcji kończyny.

## 7. Parametry techniczne

ROZMIAR	OBWÓD STAWU KOLANOWEGO (CM)
S	33-35
M	35-37
L	37-39
XL	39-41

## 8. Konserwacja

- Opaskę należy prać ręcznie w letniej wodzie, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

**Uwaga!** Informacje dotyczące konserwacji znajdują się na metce materiałowej.

**Uwaga!** Należy pamiętać, że brak higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia lub inne uszkodzenia, a także dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.






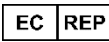



## 9. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

## 10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Wytwórca
	Numer partii		Data produkcji
	Numer seryjny		Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

## 11. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdują Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne
- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwoodleżynowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające
- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na:

**[www.timago.com](http://www.timago.com)**



**Wytwórca:**

Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



Wydanie I, data aktualizacji 29.07.2016