



INSTRUKCJA OBSŁUGI

430 920

Barierka dwustronna do łóżka z regulacją szerokości

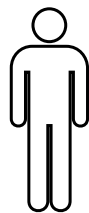

160 kg

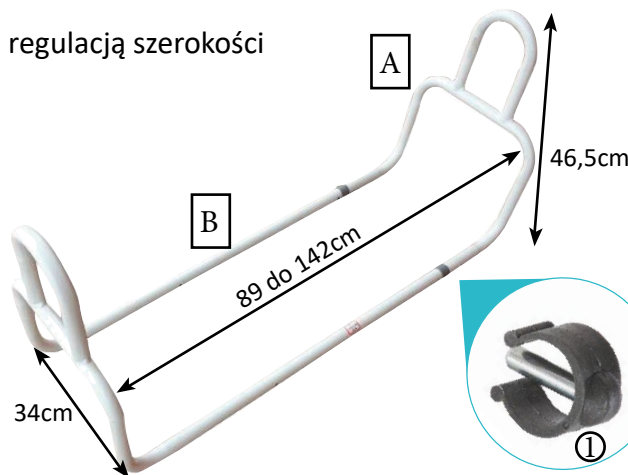

Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu oraz zachować ją na wypadek przyszłych wątpliwości.

1. Bezpieczeństwo

- ▼ ZAWSZE skonsultuj się z lekarzem lub dostawcą aby doprecyzować prawidłową regulację oraz używanie produktu.
- ▼ Nie przechowuj produktu na zewnątrz ani nie wystawiaj na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych (nie zostawiaj produktu na długo w samochodzie w czasie upałów).
- ▼ Sprawdzaj regularnie stan elementów łącznych produktu (śruby, rurki, nasadki, elementy z tworzywa).
- ▼ Podczas użytkowania trzymaj uchwyty solidnie i pewnie.
- ▼ Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem i we właściwy sposób: nie używaj jako dźwigni, nie siadaj na produkcie itp.
- ▼ Przestrzegaj limitu wagi użytkownika umieszczonej na etykiecie produktu lub w instrukcji obsługi.
- ▼ Dla własnego bezpieczeństwa nie wprowadzaj do produktu żadnych zmian lub modyfikacji. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych a naprawę zleć specjalistcie.
- ▼ Nie zawieszaj nic na produkcie w trakcie jego użytkowania.
- ▼ ZAWSZE sprawdzaj czy produkt jest właściwie i bezpiecznie zablokowany przed rozpoczęciem użytkowania.
- ▼ W przypadku długiej przerwy w użytkowaniu produktu zalecamy, aby przed ponownym użyciem sprawdził go specjalista.
- ▼ Nie przechowuj produktu na zewnątrz - przeznaczony on jest do używania i przechowywania wyłącznie w pomieszczeniach.
- ▼ Podczas używania nie wychylaj się, unikniesz ryzyka utraty równowagi i upadku.
- ▼ Wszelkie incydenty medyczne i wypadki związane z tym produktem powinny być zgłaszane dostawcy oraz kompetentnym instytucjom państwowym sprawującym nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych.

2. Wskazania i przeciwwskazania

Zabezpieczenie pacjenta leżącego w łóżku przed upadkiem.

Wskazania: Choroby i niepełnosprawności powodujące konieczność leżenia w łóżku i obciążone ryzykiem wypadnięcia z łóżka, także jako pomoc przy zmianie pozycji w łóżku.

Przeciwwskazania: poważne osłabienie mięśni kończyn górnych, choroby psychiczne i psychiatryczne, jak demencja, choroba Alzheimera.

3. Przygotowanie do użycia

Tylko specjalista powinien dopasować produkt do Twoich indywidualnych potrzeb oraz nauczyć Cię z niego korzystać. Niewłaściwa regulacja lub używanie mogą doprowadzić do przeciążenia urządzenia lub mieć negatywne skutki dla Twojego zdrowia.

Zapytaj specjalistę jak używać produktu i upewnij się, że wszystko poprawnie rozumiesz. W razie wątpliwości, nie wahaj się zapytać ponownie.

Połącz elementy [A] i [B] wsuwając cieńsze, chromowane rurki elementu [A] w odpowiadające im [B], blokując wybrane położenie załączonymi klipsami (1).

Regulacja szerokości:

Chromowane rurki elementu [A] wyposażone są w 6 otworów, dzięki którym barierkę można dopasować do szerokości łóżka. Wsuwając go do elementu [B] wybierz właściwy otwór, a następnie zablokuj położenie klipsami.

Dostępnych jest 6 pozycji szerokości:

89cm - 92cm - 119cm - 122cm - 139cm - 142cm

Upewnij się, że klips przylega całą powierzchnią do rurki, a jego koniec widoczny jest po drugiej stronie (na wylot) .

Następnie podnieś materac łóżka i umieść pod nim poziomą część barierki. Sprawdź stabilność przed użyciem.

4. Czyszczenie:

Produkt powinien być czyszczony regularnie z użyciem łagodnych środków czyszczących, wody z mydłem, oraz miękkiej ściereczki.

NIGDY nie używaj substancji natłuszczających czy oleistych – ryzyko poślizgu i upadku!

Do dezynfekcji używać delikatnych, bez-chlorowych środków, takich jak na przykład Surfianios (Anios laboratoires).

NIE UŻYWAĆ środków ściernych ani myjek wysoko-ciśnieniowych - grozi uszkodzeniem produktu.

Do napraw używać wyłącznie właściwych narzędzi oraz oryginalnych części zamiennych.

5. Materiały

Produkt wykonany jest z rur stalowych chromowanych i pokrytych farbami epoksydowymi oraz elementów z tworzywa sztucznego.

5. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

6. Specyfikacja techniczna

Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją od daty nabycia na wszelkie wady produkcyjne i materiałowe.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz innych wynikłych z niedostatecznej lub niewłaściwej konserwacji, przechowywania, lub używania produktu, a także z użycia nieoryginalnych części zamiennych.

dystyributor w Polsce:



ul. Powstania Wlkp 45 ☎ 52 318 38 57
88-320 Strzelno www.aston.pl