

Podwyższona deska sedesowa

Trilett 2

Model: 3011492

Instrukcja montażu i eksploatacji



ZNACZENIE ZASTOSOWANYCH OZNAKWAŃ

Należy bezwarunkowo przestrzegać umieszczonych na kolorowym tle wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

- ☞ Ten symbol wskazuje na wskazówki i zalecenia.
- [] Oznaczenie numeru rysunku.
- () Oznaczenie elementu funkcyjnego na rysunku.

WSTĘP

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać ten dokument i przestrzegać treści zawartych w nim wskazówek. Dzieci i osoby małoletnie powinny przeczytać ten dokument przed pierwszym użyciem produktu wraz z rodzicem lub opiekunem względnie osobą towarzyszącą.

Niniejsza instrukcja obsługi ma za zadanie pomóc użytkownikowi w opanowaniu obsługi produktu i unikaniu wypadków.



Produkt jest technicznym urządzeniem wspomagającym. Należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi i regularnie go konserwować. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może być źródłem zagrożeń. Dlatego też należy opanować jego prawidłową obsługę.

Osoby z wadą wzroku mogą znaleźć pliki w formacie PDF oraz inne informacje o naszych produktach na naszej stronie internetowej pod adresem: < www.meyra.com >.

- ☞ W razie potrzeby prosimy zwrócić się do specjalistycznego sprzedawcy.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz ewentualne wezwania do dostarczenia naszych produktów do specjalistycznego warsztatu można znaleźć w zakładce < Centrum informacyjne > na naszej stronie internetowej: < www.meyra.com >.

Produkt spełnia wymogi normy EN 12182 dotyczącej pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych. Spełnia on także wymogi normy EN1021-1 dotyczące zapalności zastosowanych materiałów tapicerskich oraz tworzyw sztucznych.

OPIS

Podwyższona deska sedesowa TRILETT 2 posiada trzystopniową regulację wysokości i dzięki temu może być używana przez osoby o różnym wzroście.

Odchylane i zdejmowane podłokietniki ułatwiają siadanie na desce i wstawanie z niej. Do mocowania deski wykorzystuje się tylne otwory montażowe muszli klozetowej.

PRZEZNACZENIE

Jeśli przy używaniu produktu wystąpią reakcje alergiczne, zaczerwienienia skóry lub/i odciski na ciele, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Produkt jest przeznaczony dla osób o ograniczonej mobilności i ma za zadanie ułatwić im korzystanie z większości misek sedesowych.

ODBIÓR

Wszystkie produkty sprawdzamy w naszej firmie pod kątem występowania usterek, a następnie pakujemy w specjalne kartony.

- ☞ Prosimy jednak sprawdzić produkt bezpośrednio po otrzymaniu - najlepiej w obecności dostawcy - pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń transportowych:

- ☞ Opakowanie produktu prosimy zachować na wypadek ewentualnego przyszłego transportu.

ŻYWOTNOŚĆ

Oczekiwana średnia żywotność produktu wynosi 4 lata, o ile jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i wykonywane są wszystkie prace konserwacyjno-serwisowe.

Żywotność produktu uzależniona jest także od częstotliwości korzystania z niego, otoczenia, w którym jest używany oraz jego pielęgnacji.

Poprzez stosowanie części zamiennych żywotność produktu można przedłużyć. Części zamienne dostępne są z reguły jeszcze przez 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

- ☞ Podany okres żywotności nie oznacza udzielenia dodatkowej gwarancji.

ZAKRES DOSTAWY

Podwyższona deska sedesowa Trilett 2:

- (1) 1 podwyższona deska sedesowa,
 - (2) 1 prawy podłokietnik,
 - (3) 1 lewy podłokietnik,
- 1 instrukcja montażu i użytkowania.

INSTRUKCJA MONTAŻU

☞ Poniższe prace montażowe muszą być wykonane przez specjalistyczny punkt serwisowy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas montażu należy uważać na miejsca, w których występujeryzyko zgniecenia!

Przy modyfikacji produktu należy zadbać o czystość w miejscu pracy!

Podwyższona deska sedesowa

Podwyższona deska sedesowa jest dostarczana w stanie zmontowanym z ustawieniem na średnim stopniu wysokości. Podłokietniki należy zamontować oddzielnie.

1. Zdemontować deskę sedesową wraz z klapą z muszli klozetowej.
2. Dopasować obydwie mocujące pręty gwintowane do rozmiaru otworów w muszli klozetowej [1 na stronie 11].
3. Ustawić podwyższoną deskę sedesową na muszli, przesuwając deskę na boki.
4. Za pomocą nakrętek mocujących przymocować podwyższoną deskę sedesową do muszli klozetowej [2 na stronie 11].

Uwaga:

! Należy się upewnić, że wszystkie śruby i połączenia są prawidłowo zamocowane.

Podłokietniki

1. Wetknąć ustawiony, w pionie prawy i lewy podłokietnik do uchwytów w desce [3 na stronie 11] + [4 na stronie 11]. Następnie odchylić podłokietniki w dół.

☞ W celu demontażu należy przechylić podłokietniki do tyłu na tyle, aby można było wyjąć je z uchwytów.

REGULACJA WYSOKOŚCI

W celu zmiany wysokości położenia należy przestawić równomiernie tylny poprzeczny drążek [5 na stronie 11] i przełożyć przednie podkładki [6 na stronie 11].

1. Usunąć tylne zaślepki. W tym celu należy nacisnąć klipsy sprężynowe, po czym wysunąć zaślepkę do góry i wyjąć ją.
2. Za pomocą odpowiedniego wkrętaka odkręcić tylne śruby [5 na stronie 11] drążka poprzecznego i ręcznie przykręcić je w wybranej pozycji.
3. Założyć obie zaślepki. Należy przestrzegać oznaczeń na wewnętrznej stronie zaślepek (L = lewa i R = prawa).
4. Wyjąć obie przednie podkładki [6 na stronie 11] i umieścić je w nowej, wybranej pozycji. Powłoka antypoślizgowa powinna być skierowana w stronę muszli klozetowej.

Uwaga:

! Należy upewnić się, że podkładki zatrzasnęły się w prawidłowy sposób.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie wolno stawać ani siadać na klapie.

Należy opierać się równomiernie obiema rękami na podłokietnikach.

Należy zapewnić, aby elementy regulacji wysokości były ustawione na tą samą wysokość.

Należy zapewnić prawidłowe przymocowanie śrub do muszli klozetowej, drążka poprzecznego i stabilne zamocowanie przednich podkładek.

Wymianę uszkodzonych elementów należy bezwzględnie zlecać specjalistycznemu sprzedawcy.

Nie wolno wkładać rąk do obszaru przylegania podłokietników do deski. – Niebezpieczeństwo zgniecenia!

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy podłokietniki zatrzasnęły się w prawidłowy sposób.

Przed użyciem należy sprawdzić stan produktu pod kątem jego przydatności do użytkowania. – Niebezpieczeństwo wypadku!

Podłokietniki należy utrzymywać w stanie czystym, bez zabrudzenia olejem lub smarem. – Niebezpieczeństwo wypadku! Mydło i środek do kąpieli zwiększają niebezpieczeństwo poślizgu!

W świetle przepisów niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt firma MEYRA nie odpowiada za szkody ani ryzyka, które w związku z produktem mogą spowodować dzieci pozostające bez opieki!

Czyszczenie

Do czyszczenia należy używać roztworu mydła. Wartość pH środka czyszczącego powinna wynosić przynajmniej 6 (neutralny środek czyszczący).

Nie wolno stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

Dezynfekcja

Jeśli produkt używany jest przez wiele osób (np. w domu opieki społecznej), należy stosować powszechnie dostępne w handlu środki dezynfekcyjne.

Przed rozpoczęciem dezynfekcji należy wyczyścić produkt.

Do dezynfekcji wolno stosować jedynie sprawdzone i zaaprobowane środki dezynfekcyjne.

Środki dezynfekcyjne powinny mieć aprobatę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.


Przy używaniu środków dezynfekcyjnych może dojść do uszkodzenia powierzchni zewnętrznych, co może ograniczyć długotrwałą funkcjonalność podzespołów.

Należy przy tym przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania podanych przez producenta.

Naprawy

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Zachęcamy do korzystania z usług serwisowych autoryzowanego specjalistycznego sprzedawcy.

UTYLIZACJA

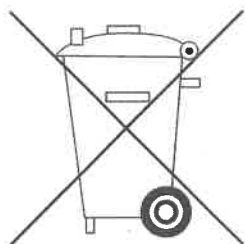

Utylizacja musi odbywać się zgodnie ze stosownymi krajowymi przepisami.

Informacje dotyczące lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów można uzyskać w radzie miasta lub gminy.

KONSERWACJA

Niewłaściwa lub zaniechana pielęgnacja i konserwacja produktu prowadzą do ograniczenia odpowiedzialności producenta za produkt.

Prace konserwacyjne

Poniższy plan konserwacji może służyć jako wytyczna do prowadzenia prac konserwacyjnych.

☞ Nie określa on rzeczywistego zakresu prac, które należy wykonać przy produkcie.

Plan konserwacji

KIEDY	CZYNNOŚĆ	UWAGA
Przed użyciem	Sprawdzić podwyższoną deskę sedesową pod kątem występowania uszkodzeń.	Kontrolę należy przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą innej osoby. W przypadku stwierdzenia deformacji lub rys należy niezwłocznie udać się do specjalistycznego punktu serwisowego celem wykonania naprawy. – Niebezpieczeństwo wypadku!
Przed użyciem	Sprawdzić pokrywę i podłokietniki pod kątem występowania uszkodzeń.	Kontrolę należy przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą innej osoby. W przypadku stwierdzenia deformacji lub rys należy niezwłocznie udać się do specjalistycznego punktu serwisowego celem wykonania naprawy. – Niebezpieczeństwo wypadku!
Po użyciu	Czyszczenie	Czyszczenie należy wykonać samodzielnie lub z pomocą innej osoby.
Co 6 miesięcy (w zależności od częstotliwości użytkowania)	Sprawdzić podłokietniki pod kątem występowania uszkodzeń oraz prawidłowość zamocowania śrub.	Kontrolę należy przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą innej osoby.
Zalecenie producenta: Co 12 miesięcy (w zależności od częstotliwości użytkowania)	Przegląd bezpieczeństwa	Przeprowadza specjalistyczny sprzedawca.

DANE TECHNICZNE

Model:
Podwyższona deska sedesowa
3011492

Długość	52 cm
Szerokość	57 cm
Wysokość	35 cm
Regulacja wysokości	8 / 11 / 14 cm
Wysokość podłokietnika	20 cm
Nośność	130 kg
Ciężar	3,6 kg
Maks. temperatura wody używanej do czyszczenia	80 °C
Kolor	biały

Tabliczka znamionowa


Tabliczka znamionowa znajduje się na wewnętrznej ściance produktu.

Narzędzia

Do prac nastawczych i konserwacyjnych potrzebne są następujące narzędzia:

Wkrętak krzyżakowy

Znaczenie naklejek na produkcie

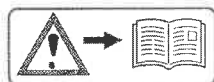

Uwaga!

Nakaz przeczytania instrukcji obsługi oraz załączonej dokumentacji.

Wskazówka dotycząca niebezpieczeństwa zgniecenia. – Nie wolno wkładać rąk!



Znaczenie symboli na tabliczce znamionowej



Producent




Numer zamówieniowy



Numer seryjny



Data produkcji (rok – tydzień kalendarzowy)

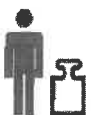

Dop. masa użytkownika



Dop. masa całkowita

GWARANCJA

Na produkt udzielamy w ramach naszych ogólnych warunków handlowych ustawowej gwarancji oraz ewentualnie przyrzeczonych słownie lub uzgodnionych gwarancji. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji należy zwrócić się do specjalistycznego sprzedawcy, przedkładając poniższą KARTĘ RĘKOJMI / GWARANCJI wraz z danymi dot. nazwy modelu, numerem dowodu dostawy i datą dostawy oraz numerem seryjnym (SN).

Numer seryjny (SN) znajduje się na tabliczce znamionowej.

Roszczenia gwarancyjne mogą zostać uznane tylko w przypadku stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, stosowania oryginalnych części zamiennych przez specjalistycznego sprzedawcę, a także regularnego przeprowadzania konserwacji i inspekcji.

Uszkodzenia powierzchni, ogumienia kół, uszkodzenia spowodowane przez pośluzowane śruby lub nakrętki oraz otwory mocujące wybite na skutek częstych prac montażowych nie podlegają gwarancji.

Ponadto wykluczone są uszkodzenia napędu i układów elektronicznych, powstałe na skutek niewłaściwego czyszczenia za pomocą ciśnieniowych agregatów parowych albo celowego lub przypadkowego zalania podzespołów wodą.

Usterki wywołane przez silne źródła generowania fal, takie jak np. telefony komórkowe

o dużej mocy nadajnika, urządzenia hi-fi lub inne urządzenia generujące silne promieniowanie zakłócające, które wykracza poza zakres określony normami, nie mogą być powodem wnoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

Uwaga:

! Niestosowanie się do zaleceń instrukcji obsługi, a także nieprawidłowo przeprowadzona konserwacja, jak również wprowadzanie do produktu zmian technicznych i uzupełnień (dobudowanie elementów) bez naszego zezwolenia powodują utratę gwarancji, a także ogólnej odpowiedzialności producenta za produkt.

Wskazówka:

W przypadku zmiany użytkownika lub właściciela należy przekazać mu niniejszą Instrukcję użytkownika jako jeden z elementów produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych uwarunkowanych postępowaniem technicznym.



Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą Rady 93/42/EWG dotyczącą produktów medycznych.

DOWÓD PRZEGLĄDU

Dane produktu:

Model:

Nr dowodu dostawy:

Nr seryjny (SN):

Zalecany przegląd bezpieczeństwa w 1. roku (najpóźniej co 12 miesięcy)

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:

Podpis: _____

Miejscowość, data: _____

Następny przegląd bezpieczeństwa za 12 miesięcy

Data: _____

Zalecany przegląd bezpieczeństwa w 2. roku (najpóźniej co 12 miesięcy)

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:

Podpis: _____

Miejscowość, data: _____

Następny przegląd bezpieczeństwa za 12 miesięcy

Data: _____

Zalecany przegląd bezpieczeństwa w 3. roku (najpóźniej co 12 miesięcy)

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:

Podpis: _____

Miejscowość, data: _____

Następny przegląd bezpieczeństwa za 12 miesięcy

Data: _____

Zalecany przegląd bezpieczeństwa w 4. roku (najpóźniej co 12 miesięcy)

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:

Podpis: _____

Miejscowość, data: _____

Następny przegląd bezpieczeństwa za 12 miesięcy

Data: _____

Zalecany przegląd bezpieczeństwa w 1. roku (najpóźniej co 12 miesięcy)

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:

Podpis: _____

Miejscowość, data: _____

Następny przegląd bezpieczeństwa za 12 miesięcy

Data: _____

Zalecany przegląd bezpieczeństwa w 3. roku (najpóźniej co 12 miesięcy)

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:

Podpis: _____

Miejscowość, data: _____

Następny przegląd bezpieczeństwa za 12 miesięcy

Data: _____

Karta rękojmi/gwarancji

Prosimy wypełnić kartę! W razie potrzeby prosimy ją skopiować i przesłać kopię do specjalistycznego sprzedawcy.

Gwarancja

Określenie modelu:

Nr dowodu dostawy:

Numer seryjny (SN) (patrz tabliczka znamionowa):

Data dostawy:

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:

Dowód przeglądu w celu przekazania produktu

Dane produktu:

Nr seryjny (SN):

Model:

Nr dowodu dostawy:

Pieczęć specjalistycznego sprzedawcy:

Podpis: _____

Miejscowość, data: _____

Następny przegląd bezpieczeństwa za 12 miesięcy

Data: _____

