

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESŁO SEDESOWE LUCA 803

Nr katalogowy.:	RF-803
Szerokość toalety:	400 mm
Szerokość ławeczki:	410 mm
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Waga:	6 kg



⚠ UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z krzesła sedesowego, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Krzesło sedesowe spełnia funkcję przenośnej toalety. Krzesło można użytkować przy łóżku pacjenta. Dodatkowo krzesło jest wyposażone w ławeczkę do siedzenia. Rama krzesła spełnia także funkcję balkonika.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z krzesła sedesowego upewnić się, że nogi są w dobrym stanie i krzesło stoi stabilnie.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła sedesowego w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła sedesowego.
4. Nie przechowywać krzesła sedesowego w temperaturze poniżej 0°C.

⚠ UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowe do użycia.
2. Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na podłokietnikach.
4. Powoli siadaj na krześle, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się. Zanim puścisz podłokietniki krzesła, upewnij się, że utrzymujesz równowagę.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę krzesła sedesowego pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania,
 - nasadki nie uległy zniszczeniu – jeżeli tak, należy je wymienić,
 - żadne inne części krzesła sedesowego nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie krzesła sedesowego miękką szmatką i wodą z mydłem. Krzesło sedesowe po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.

⚠ UWAGA! Do czyszczenia krzesła sedesowego nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

SPOSÓB MONTAŻU

1. Produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.
2. Naciśnij dźwignię blokującą na ramie (rys. 1).
3. Rozłóż pierwszy bok ramy (rys. 2).
4. Rozłóż całą ramę (rys. 3).
5. Zamontuj toaletę lub ławeczkę (rys. 4).
6. Wyreguluj wysokość (rys. 5).
7. Ustaw złożony produkt w odpowiednim miejscu (rys. 6).

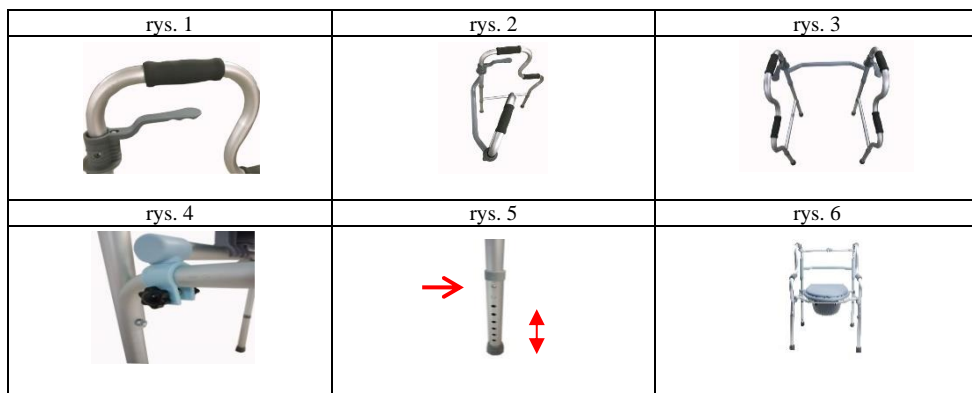

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możesz regulować wysokość za pomocą przycisków blokujących znajdujących się w nogach krzesła. Wciśnij przycisk blokujący jedną ręką, drugą przesun rurkę do odpowiedniej wysokości. Zatrzaśnij przycisk blokujący.

GWARANCJA

Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje:

- czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji,
- części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
- mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu,
- usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji.

Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.



WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03 – 310 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07

e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.1

Wydano: 10/2019