

NASZE PODUSZKI I OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE

NASZE PODUSZKI I WSKAZANIA

OFERTA PODUSZEK SYST'AM®

WSKAZANIA

RYZIKO

PODUSZKI POWINNY BYĆ STOSOWANE W PRZYPADKU, GDY:		
P371C	Konieczna jest pozycja siedząca w wyniku choroby lub niepełnosprawności i jednocześnie zachodzi zwiększone ryzyko powstania odleżyn.	Ryzyko NISKIE BARDZO WYSOKIE
P311C		
P311CD		
P314C	Konieczna jest pozycja siedząca w wyniku choroby lub niepełnosprawności i jednocześnie zachodzi zwiększone ryzyko powstania odleżyn.	Ryzyko NISKIE BARDZO WYSOKIE
P341C		
P361C	1 - istnieją odleżyny (od I do II stopnia według EPUAP). Pacjent może zmieniać pozycję siedzącą lub nacisk w zagrożonych punktach jest łagodzony dzięki opiece pielęgniarzkiej. LUB 2 - obecnie jest podwyższone lub bardzo wysokie zagrożenie odleżynami, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...). Poduszka P341C jest odpowiednia dla pacjentów: którzy w przeszłości mieli już odleżyny w miejscach ciała wchodzących w kontakt z siedziskiem; i/lub cierpią na całkowity lub częściowy paraliż tułowia lub dolnych kończyn; i/lub mają upośledzone czucie lub brak czucia w dolnej kończynie; i/lub mają upośledzoną stabilność przednią; i/lub mają lekką asymetrię postawy; i/lub są po amputacji naczyniowej; i/lub są w ogólnym złym stanie.	Ryzyko NISKIE BARDZO WYSOKIE
P361CA		
P301C	1 - istnieją odleżyny (od I do III stopnia według EPUAP). Pacjent może zmieniać pozycję siedzącą lub nacisk w zagrożonych punktach jest łagodzony dzięki opiece pielęgniarzkiej. LUB 2 - obecnie jest podwyższone lub bardzo wysokie zagrożenie odleżynami, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...). Poduszka P361CA jest odpowiednia dla pacjentów: którzy w przeszłości mieli już odleżyny w miejscach ciała wchodzących w kontakt z siedziskiem; i/lub cierpią na całkowity lub częściowy paraliż tułowia lub dolnych kończyn; i/lub mają upośledzone czucie lub brak czucia w dolnej kończynie; i/lub mają upośledzoną stabilność przednią; i/lub mają lekką asymetrię postawy; i/lub są po amputacji naczyniowej; i/lub są w ogólnym złym stanie.	Ryzyko NISKIE BARDZO WYSOKIE
P302C		
P302C	1 - istnieją odleżyny (od I do IV stopnia według EPUAP). LUB 2 - obecnie jest podwyższone lub bardzo wysokie zagrożenie odleżynami, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...). Poduszka POLYAIR jest odpowiednia dla pacjentów: którzy w przeszłości mieli już odleżyny w miejscach ciała wchodzących w kontakt z siedziskiem; i/lub cierpią na całkowity lub częściowy paraliż tułowia lub dolnych kończyn; i/lub mają upośledzone czucie lub brak czucia w dolnej kończynie; i/lub mają porażenie mózgowo/przykurcze; i/lub mają upośledzoną stabilność przednią i boczną; i/lub mają asymetrię postawy, brak równowagi krzyżowo-miednicznej; i/lub są po amputacji naczyniowej; i/lub są w ogólnym złym stanie.	Ryzyko NISKIE BARDZO WYSOKIE



SYST'AM® P371C / PODUSZKA Z PIANKI WYSOKOELASTYCZNEJ HR

PODUSZKA FORMOWANA ANATOMICZNIE, WYKONANA Z WYSOCE WYTRZYMAŁEJ PIANKI

MATERIAŁY

40
kg/m³



Pianka
wysokoelastyczna
HR



Zdejmowalny,
nieprzemakalny
pokrowiec
Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:



PRZEZNACZENIE


Ryzyko



Poduszka P371C, wykonana z pianki wysokoelastycznej, powinna być stosowana w przypadku:

- Kiedy konieczna jest pozycja siedząca w wyniku choroby lub niepełnosprawności i jednocześnie zachodzi zwiększone ryzyko powstania odleżyn.

SYST'AM® P371C
(bez pokrowca)

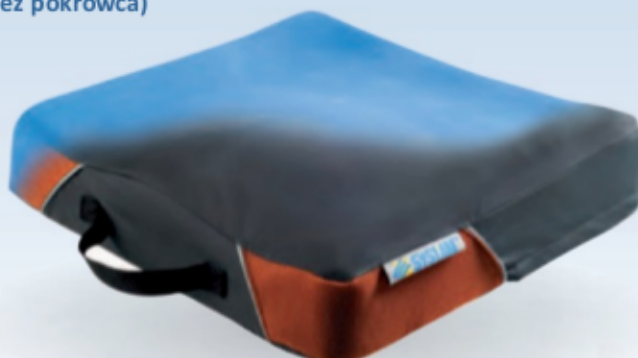

SYST'AM® P371C
(z pokrowcem)



Kod artykułu	Opis	Rozmiary (cm / cale) (szer. x dł.)	Waga pacjenta (kg / funty)	
			Min.	Max.
P371C42421HW	PODUSZKA P371C Z PIANKI WYSOKOELASTYCZNEJ	42 x 42 / 17 x 17	40 / 88	100 / 220
P371C45421HW		45 x 42 / 18 x 17	40 / 88	110 / 242
P371C45461HW		45 x 46 / 18 x 18	60 / 132	130 / 286
P371C51461HW		51 x 46 / 20 x 18	60 / 132	150 / 330

«ZALETY» PRODUKTU

ANATOMICZNY KSZTAŁT Z UNIESIONYMI KRAWĘDZAMI BOCZNYMI I NACHYLENIEM PRZÓD-TYŁ


- Lepsze pozycjonowanie, stabilność i komfort pacjenta;
- Zwiększony kontakt z ciałem pacjenta, a tym samym zredukowany nacisk

PODUSZKA ZABEZPIECZONA PRZED KRUSZENIEM DZIĘKI EFEKOWI SKÓRKI

- Bariera, która faktycznie chroni produkt.

PODSTAWA ANTYPOŚLIŹGOWA

- Zapobiega zsuwaniu się poduszki z SIEDZISKA.

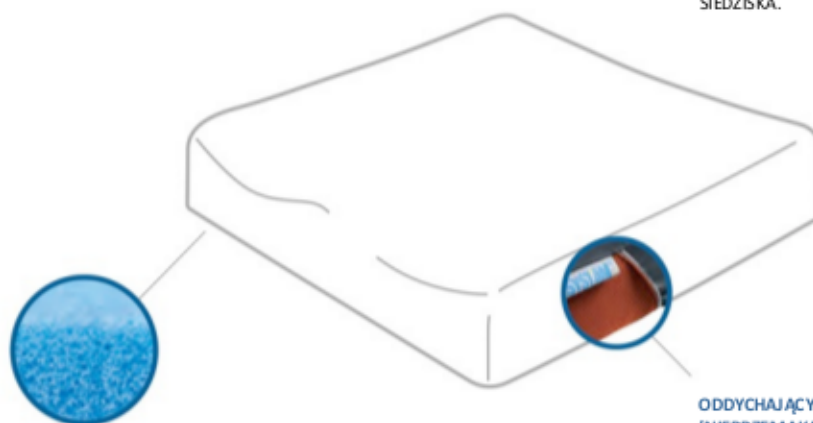

WYKONANA Z POLIURETANOWEJ PIANKI WYSOKOELASTYCZNEJ

- Wysoka gęstość (40 kg/m³) bardzo wytrzymałej pianki SYST'AM® (pianka HR) odpowiada doskonałej odporności na deformację.

ODDYCHAJĄCY POKROWIEC (NIEPRZEMAKALNY)

- Dostosowany dla pacjentów nie trzymających moczu;
- Redukuje efekt maceracji

GWARANCJA

2
LATA

NASZE PODUSZKI I OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE

SYST'AM® P311C / PODUSZKA ŻELOWA

PODUSZKA ŻELOWA WYKONANA Z ŻELU Z EFEKTEM PAMIĘCI

MATERIAŁY



Żel z efektem pamięci



Zdejmowalny, nieprzemakalny pokrowiec, Polymaille



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja żelu:



Konserwacja pokrowca:



PRZEZNACZENIE

Ryzyko

NISKIE


BARDZO WYSOKIE



Poduszka P311C powinna być stosowana w przypadku:

- Kiedy konieczna jest pozycja siedząca w wyniku choroby lub niepełnosprawności i jednocześnie zachodzi zwiększone ryzyko powstania odleżyn.

SYST'AM® P311C
(bez pokrowca)

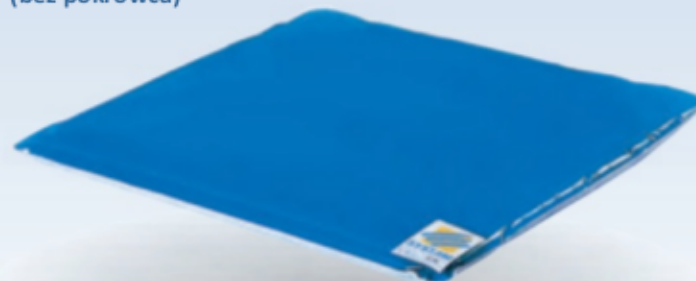

SYST'AM® P311C
(z pokrowcem)



SYST'AM® P311C

- Poduszka żelowa ze wyjmowalnym elementem środkowym.





Kod artykułu	Opis	Rozmiary (cm / cale) (szer. x dt.)	Waga pacjenta (kg / funty) Min. Max.	
P311C40401HW	P311C - SYST'AM® ŻEL	40 x 40 / 16 x 16	40 / 88	120 / 264
P311C45431HW		45 x 43 / 18 x 17	40 / 88	140 / 308
P313C40401HW	P313C - SYST'AM® ŻEL z wyjmowalnym elementem środkowym.	40 x 40 / 16 x 16	40 / 88	100 / 220

«ZALETY» PRODUKTU

SIATECZKOWATY ŻEL POLIURETANOWY Z EFEKTEM PAMIĘCI

- Pozwala uniknąć przemieszczania się żelu oraz zapobiega efektowi zapadania wypukłości kości.

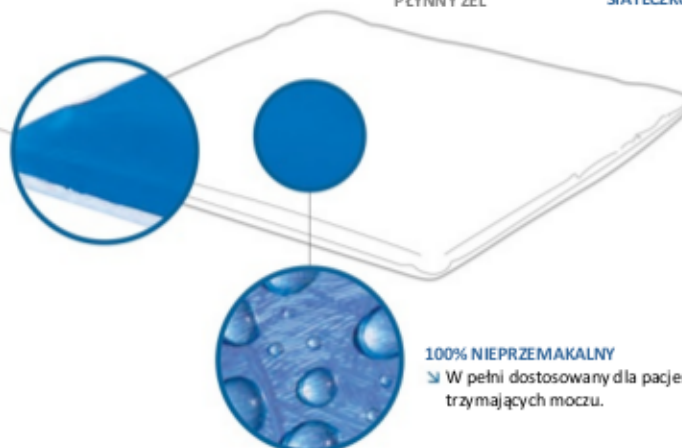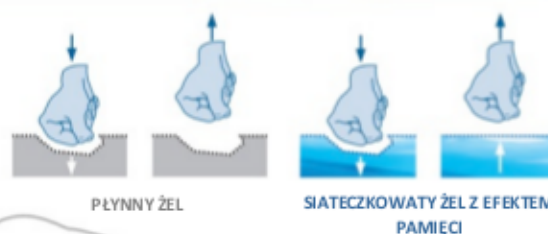

100% NIEPRZEMAKALNY

- W pełni dostosowany dla pacjentów nie trzymających moczu.

GWARANCJA

2
LATA



SYST'AM® P311CD / PODUSZKA DUOGEL

PODUSZKA ŻELOWA WYKONANA Z ŻELU Z EFEKTEM PAMIĘCI, O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI

MATERIAŁY



Żel z efektem pamięci



Zdejmowalny, nieprzemakalny pokrowiec Polymaile®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja żelu:



Konserwacja pokrowca:



PRZEZNACZENIE


Ryzyko



Poduszka P311CD DUOGEL powinna być stosowana w przypadku:

- Kiedy konieczna jest pozycja siedząca w wyniku choroby lub niepełnosprawności i jednocześnie zachodzi zwiększone ryzyko powstania odleżyn.

SYST'AM® P311CD
(bez pokrowca)

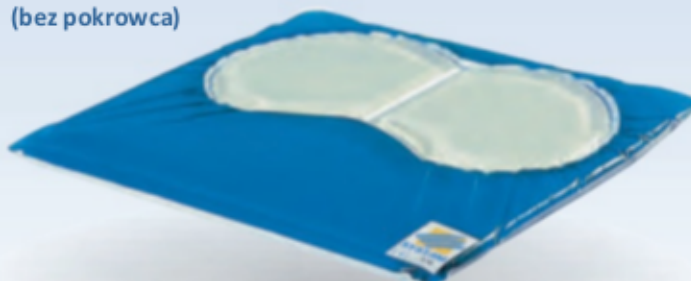

SYST'AM® P311CD
(z pokrowcem)





Kod artykułu	Opis	Rozmiary (cm / cale) (szer. x dł.)	Waga pacjenta (kg / funty)	
			Min.	Max.
P311CD42421HW	Poduszka P311CD DUOGEL*	42 x 42 / 17 x 17	40 / 88	140 / 308

«ZALETY» PRODUKTU

SIATECZKOWATY ŻEL POLIURETANOWY Z EFEKTEM PAMIĘCI

- Pozwala uniknąć przemieszczania się żelu oraz zapobiega efektowi zapadania wypukłości kostnych.

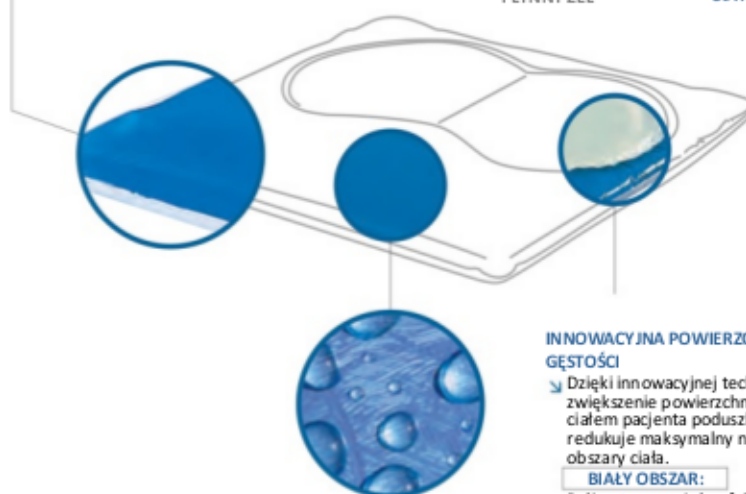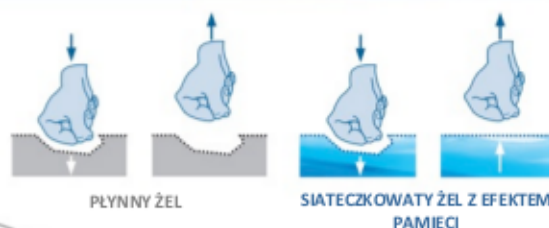

100% NIEPRZEMAKALNY

- W pełni dostosowany dla pacjentów nie trzymających moczu.

INNOWACYJNA POWIERZCHNIA O ZRÓŻNICOWANEJ GĘSTOŚCI

- Dzięki innowacyjnej technologii, która pozwala na zwiększenie powierzchni wchodzącej w kontakt z ciałem pacjenta poduszka Duogel w znacznym stopniu redukuje maksymalny nacisk wywierany na wrażliwe obszary ciała.

BIAŁY OBSZAR:

Poliuretanowy żel z efektem pamięci, o niskiej gęstości, wydzielony i odporny na przemakanie, zapewniający minimalny nacisk na obszary narażone na odleżyny, takie jak wypukłości miednicy (np. guzy kulszowe).

NIEBIESKI OBSZAR:

Powierzchnia o wysokiej gęstości, wykonana z siateczkowatego żelu poliuretanowego z efektem pamięci, umieszczona w obszarach o niskim zagrożeniu odleżynami, dla większego komfortu i stabilności pacjenta.

NASZE PODUSZKI I OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE

SYST'AM® P314C / PODUSZKA MIXTE

FORMOWANA PODUSZKA WYKONANA Z ŻELU Z EFEKTEM PAMIĘCI I PIANKI WYSOKOELASTYCZNEJ HR

MATERIAŁY

40
kg/m³



Pianka HR
wysokoelastyczna



Żel z efektem
pamięci



Zdejmowalny,
nieprzemakalny
pokrowiec
Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2


Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:



SYST'AM® P314C
(bez pokrowca)

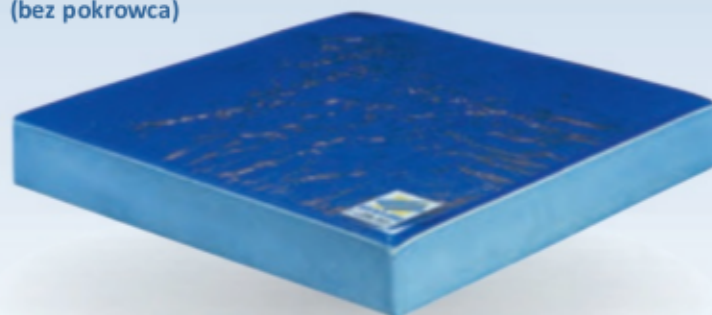

SYST'AM® P314C
(z pokrowcem)



PRZEZNACZENIE

Ryzyko

NISKIE

BARDZO
WYSOKIE





Poduszka P314C MIXTE powinna być stosowana w przypadku:

- Kiedy konieczna jest pozycja siedząca w wyniku choroby lub niepełnosprawności i jednocześnie zachodzi zwiększone ryzyko powstania odleżyn.

«ZALETY» PRODUKTU


INNOWACYJNE POŁĄCZENIE ŻELU I PIANKI WYSOKOELASTYCZNEJ HR

- Siateczkowaty żel poliuretanowy z efektem pamięci: pozwala uniknąć przemieszczania się żelu, a tym samym chroni wypukłości kostne przed naciskiem.
- Połączenie z podstawą wykonaną z wysoce odpornej pianki zapewnia lepsze dopasowywanie się poduszki do wypukłości kostnych. Kontakt większej powierzchni poduszki z ciałem pacjenta umożliwia efektywne rozłożenie nacisku. Ponadto, wzrasta również komfort i stabilność pacjenta.
- Ponieważ obydwa te tworzywa są ze sobą stopione (= sklejone), pozwala to wyeliminować wszelkie ryzyko rozłączenia się ich z czasem.

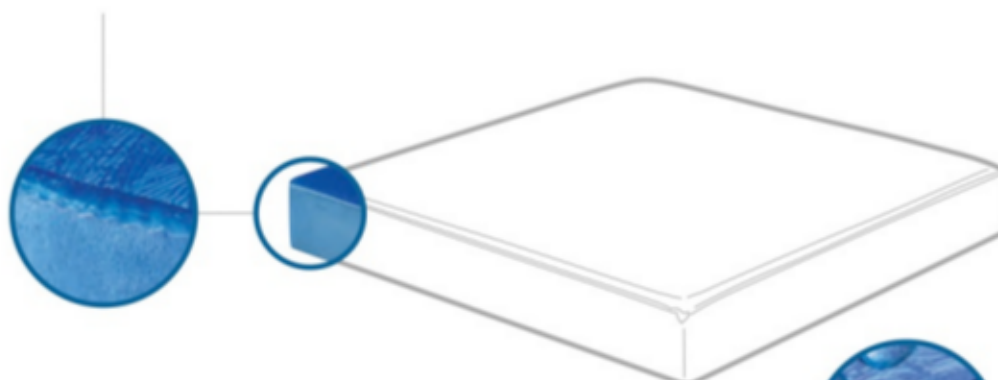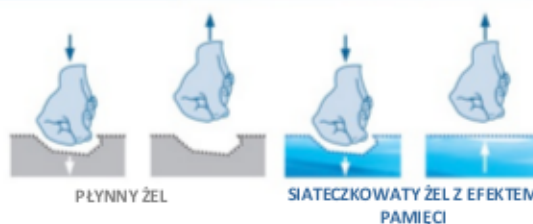

100% NIEPRZEMAKALNY

- W pełni dostosowany dla pacjentów nie trzymających moczu.

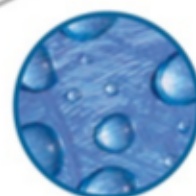

GWARANCJA

2
LATA



SYST'AM® P341C / PODUSZKA DUOFORM®

PODUSZKA WYKONANA Z 2 WISKOELASTYCZNYCH ŻELÓW UFORMOWANYCH WRAZ Z ANATOMICZNĄ PODUSZKĄ Z WYSOKOELASTYCZNEJ PIANKI HR

MATERIAŁY

40
kg/m³



Pianka HR
wysokoelastyczna



Żel z efektem
pamięci



Zdejmowalny,
nieprzemakalny
pokrowiec
Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:



PRZEZNACZENIE

Ryzyko




Poduszka P341C DUOFORM® powinna być stosowana w przypadku:

- 1 - istniejących odleżyn (od I do II stopnia według EPUAP). Pacjent może zmieniać pozycję siedzącą lub nacisk w zagrożonych punktach jest łagodzony dzięki opiece pielęgniarskiej. LUB
- 2 - obecnego podwyższonego lub wysokiego zagrożenia odleżynami, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...). Poduszka P341C jest odpowiednia dla pacjentów: którzy w przeszłości mieli już odleżyny w miejscach ciała wchodzących w kontakt z siedziskiem; i/lub cierpią na całkowity lub częściowy paraliż tułowia lub dolnych kończyn; i/lub mają upośledzone czucie lub brak czucia w dolnej kończynie; i/lub mają upośledzoną stabilność przednią; i/lub mają lekką asymetrię postawy; i/lub są po amputacji naczyniowej; i/lub są w ogólnym złym stanie.

Poduszka może być używana wraz z różnymi wózkami inwalidzkimi, bez konieczności regulacji.

SYST'AM® P341C
(bez pokrowca)

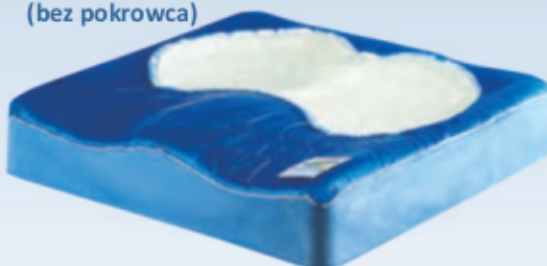

SYST'AM® P341C
(z pokrowcem)



KONCEPCJA POWIERZCHNI O ZRÓŻNICOWANEJ GĘSTOŚCI

- Powierzchnia o zróżnicowanej gęstości zapewnia lepsze rozłożenie nacisku dzięki przenoszeniu go z obszarów o niższej gęstości w kierunku obszarów o wysokiej gęstości.

BIAŁY OBSZAR:

Nowa generacja poliuretanowego żelu płynnego z efektem pamięci i powierzchni o małej gęstości, zapewniającego maksymalną redukcję nacisku na wrażliwe obszary (kości kulszowe, kość krzyżową...).

NIEBIESKI OBSZAR:


Siateczkowy żel z efektem pamięci i powierzchni o wysokiej gęstości, umieszczany w obszarach o niskim zagrożeniu odleżynami dla zwiększenia komfortu i stabilności pacjenta.

Kod artykułu	Opis	Rozmiary (cm / cale) (szer. x dł.)	Waga pacjenta (kg / funty) Min.	Waga pacjenta (kg / funty) Max.
P341C36361HW	Poduszka P341C DUOFORM®	36 x 36 / 14 x 14	30 / 66	70 / 154
P341C42421HW		42 x 42 / 16 x 16	40 / 88	110 / 242
P341C42461HW		42 x 46 / 16 x 18	40 / 88	120 / 264
P341C45421HW		45 x 42 / 18 x 16	40 / 88	120 / 264
P341C45461HW		45 x 46 / 18 x 18	40 / 88	140 / 308
P341C51461HW	P341C - DUOFORM® Soft	51 x 46 / 20 x 18	40 / 88	160 / 352
P341C542421HW		42 x 42 / 16 x 16	30 / 66	70 / 154

«Zalety» produktu

INNOWACYJNE POŁĄCZENIE ŻELU I MATERIAŁU WYSOKOELASTYCZNEGO

- Siateczkowy żel poliuretanowy z efektem pamięci: pozwala uniknąć przemieszczania się żelu, a tym samym chroni wypukłości kostne pacjenta. Płynny żel z efektem pamięci (biały element) zapewnia redukcję maksymalnego nacisku na wrażliwe obszary.
- Połączenie z podstawą wykonaną z wysoce odpornej pianki zapewnia lepsze dopasowywanie się poduszki do wypukłości kostnych. Kontakt większej powierzchni poduszki z ciałem pacjenta umożliwia efektywne rozłożenie nacisku. Ponadto, wzrasta również komfort i stabilność pacjenta.
- Ponieważ obydwa te tworzywa są ze sobą stopione (≠ sklejone), pozwala to wyeliminować wszelkie ryzyko rozłączenia się ich z czasem.

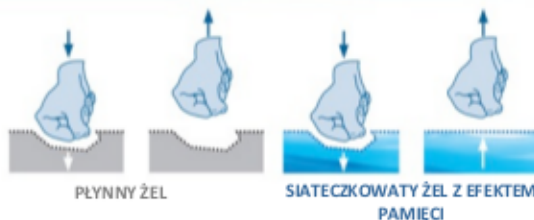

ANATOMICZNY KSZTAŁT

- Większa powierzchnia ciała pacjent wchodząca w kontakt z fotelem powoduje redukcję nacisku przekrośowego.
- Lepsze pozycjonowanie i stabilność pacjenta.

100% NIEPRZEMAKALNY

- W pełni dostosowany dla pacjentów nie trzymających moczu.

GWARANCJA

2
LATA

NASZE PODUSZKI I OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE

SYST'AM® P361C / PODUSZKA VISCOFLEX®

ANATOMICZNIE FORMOWANA PODUSZKA WYKONANA Z WYSKOELASTYCZNEJ PIANKI Z EFEKTEM PAMIĘCI

MATERIAŁY

80
kg/cm³



Pianka z
pamięcią



Zdejmowalny,
nieprzemakalny
pokrowiec
Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:



PRZEZNACZENIE

Ryzyko

NISKIE

BARDZO
WYSOKIE




Poduszka VISCOFLEX® powinna być stosowana w przypadku:

- 1 - istniejących odleżyn (od I do II stopnia według EPUAP). Pacjent może zmieniać pozycję siedzącą lub nacisk w zagrożonych punktach jest łagodzony dzięki opiece pielęgniarstwa. LUB
- 2 - obecnego podwyższonego lub bardzo wysokiego zagrożenia odleżynami, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...). Poduszka P361C jest odpowiednia dla pacjentów: którzy w przeszłości mieli już odleżyny w miejscach ciała wchodzących w kontakt z siedziskiem; i/lub cierpią na całkowity lub częściowy paraliż tułowia lub dolnych kończyn; i/lub mają upośledzone czucie lub brak czucia w dolnej kończynie; i/lub mają upośledzoną stabilność przednią; i/lub mają lekką asymetrię postawy; i/lub są po amputacji naczyniowej; i/lub są w ogólnym złym stanie.

Poduszka może być używana wraz z różnymi wózkami inwalidzkimi, bez konieczności regulacji.

SYST'AM® P361C
(bez pokrowca)

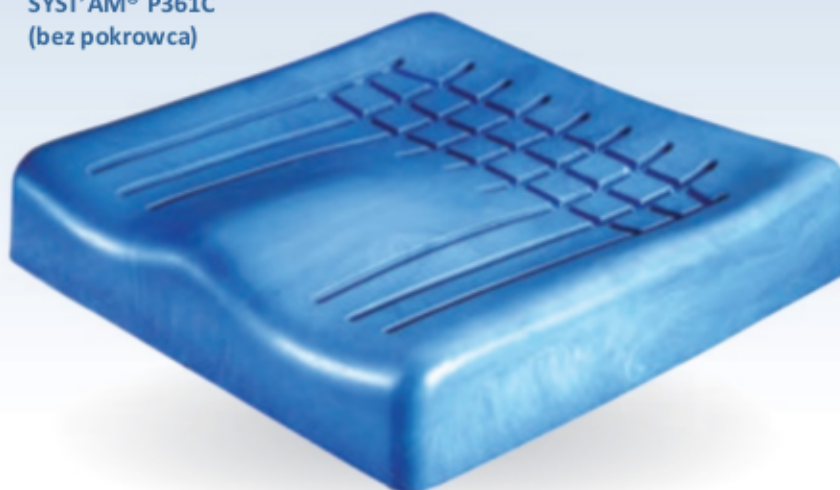

VISCOFLEX® SOFT

➤ dla pacjentów < 70 kg



SYST'AM® P361C
(z pokrowcem)



Kod artykułu	Opis	Rozmiary (cm / cale) (szer. x dł.)	Waga pacjenta (kg / funty)	
			Min.	Max.
P361C36361HW	Poduszka P361C - VISCOFLEX®	36 x 36 / 14 x 14	30 / 66	50 / 110
P361C38381HW		38 x 38 / 15 x 15	30 / 66	90 / 198
P361C42421HW		42 x 42 / 16 x 16	40 / 88	100 / 220
P361C42461HW		42 x 46 / 16 x 18	40 / 88	110 / 242
P361C45421HW		45 x 42 / 18 x 16	40 / 88	110 / 242
P361C45461HW		45 x 46 / 18 x 18	40 / 88	130 / 286
P361C48431HW		48 x 43 / 19 x 17	40 / 88	140 / 308
P361C51461HW		51 x 46 / 20 x 18	60 / 132	150 / 330
P361C51501HW		51 x 50 / 20 x 20	60 / 132	160 / 352
P361C542421HW	Poduszka P361C - VISCOFLEX® Soft	42 x 42 / 16 x 16	30 / 66	70 / 154

GWARANCJA

2
LATA



SYST'AM® P361C / PODUSZKA VISCOFLEX®

«ZALETY» PRODUKTU

FORMOWANA, WISKOELASTYCZNA PIANKA Z EFEKTEM PAMIĘCI

- Dopasowuje się do ciała i zwiększa obszar podparcia;
- Lepiej rozkłada nacisk: redukuje nacisk w miejscach najbardziej narażonych na odleżyny i wspomaga krążenie krwi;
- Poprawia komfort i stabilizuje pacjenta;
- Jest zabezpieczona przed kruszeniem;
- Jest zabezpieczona przed odkształceniem i deformacją.



EFEKT SKÓRKI NA POWIERZCHNI

PODUSZKA ZABEZPIECZONA PRZED KRUSZENIEM

- Chroniona przed czynnikami zewnętrznymi.

POWIERZCHNIA CYRKULACJA POWIETRZA

- Lepsza cyrkulacja powietrza zapewniająca redukcję efektu maceracji.
- Lepsze przyleganie materiału do ciała podczas ruchu, zapewniające redukcję tarcia powierzchniowego.

ANATOMICZNY KSZTAŁT Z UNIESIONYMI KRAWĘDZAMI BOCZNYMI I NACHYLENIEM PRZÓD-TYŁ

- Lepsze pozycjonowanie, stabilność i komfort pacjenta;
- Zwiększony kontakt z ciałem pacjenta, a tym samym zredukowany nacisk.



ULTRA LEKKA

PODSTAWA ANTYPOŚLIZGOWA

- Zapobiega zsuwaniu się poduszki z fotela.

WYSOCE ODDYCHAJĄCY POKROWIEC (NIEPRZEMAKALNY)

- Dostosowany dla pacjentów nie trzymających moczu;
- Redukuje efekt maceracji dzięki ułatwieniu skóry oddychania.

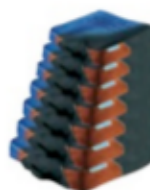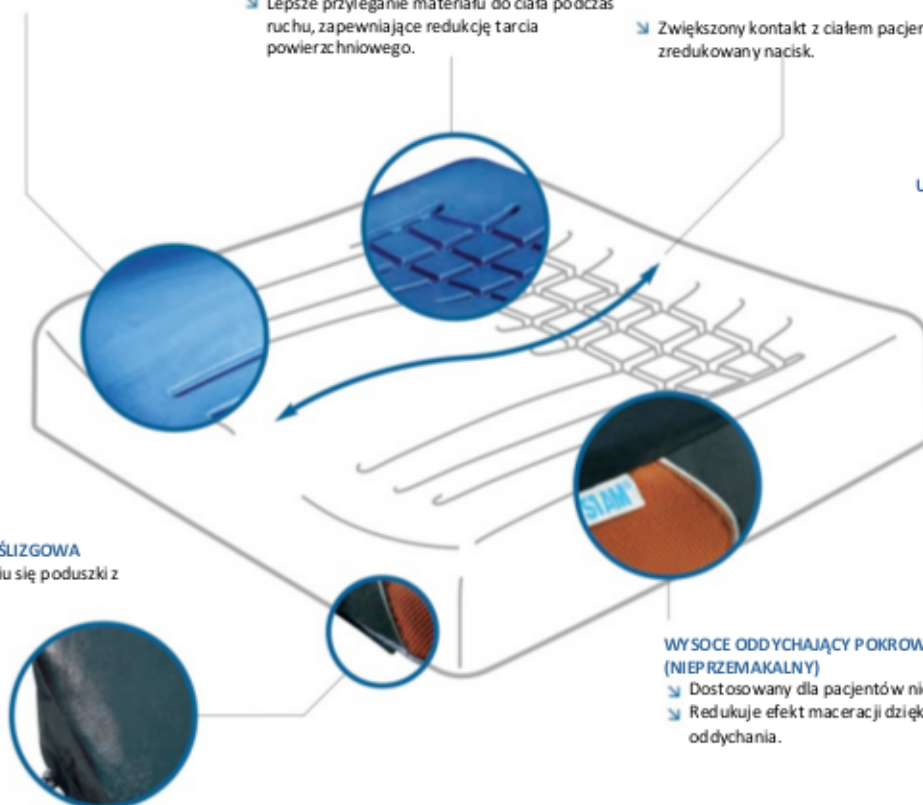

NASZE PODUSZKI I OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE

PODUSZKA SYST'AM® P361CA VISCOFLEX®+

ANATOMICZNIE FORMOWANA PODUSZKA WYKONANA Z WISKOELASTYCZNEJ PIANKI Z EFEKTEM PAMIĘCI I ERGONOMICZNYM WYCIĘCIEM

MATERIAŁY

80
kg/m³



Pianka z
pamięcią

40
kg/m³



Pianka HR
wysokoelastyczna



Zdejmowalny,
nieprzemakalny
pokrowiec
Polymille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:



PRZEZNACZENIE

Ryzyko

NISKIE

BARDZO
WYSOKIE




Poduszka P361CA VISCOFLEX®+ powinna być stosowana w przypadku:

- 1 - istniejących odleżyn (od I do III stopnia według EPUAP). Pacjent może zmieniać pozycję siedząc lub nacisk w zagrożonych punktach jest łagodzony dzięki opiece pielęgniarstwa. LUB
- 2 - obecnego podwyższonego lub bardzo wysokiego zagrożenia odleżynami, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...). Poduszka P361CA jest odpowiednia dla pacjentów: którzy w przeszłości mieli już odleżyny w miejscach ciała wchodzących w kontakt z siedziskiem; i/lub cierpią na całkowity lub częściowy paraliż tułowia lub dolnych kończyn; i/lub mają upośledzone czucie lub brak czucia w dolnej kończynie; i/lub mają upośledzoną stabilność przednią; i/lub mają lekką asymetrię postawy; i/lub są po amputacji naczyniowej; i/lub są w ogólnym złym stanie.

Poduszka może być używana wraz z różnymi siedziskami inwalidzkimi, bez konieczności regulacji.

SYST'AM® P361CA
(bez pokrowca)

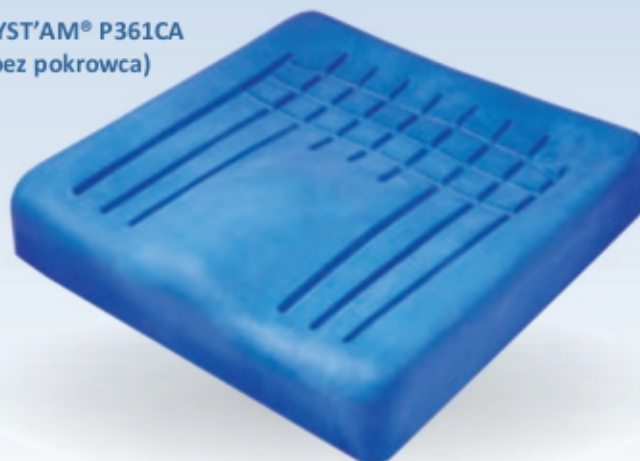

Widok struktury
wewnątrz poduszki.

SYST'AM® P361CA
(z pokrowcem)



ZNACZĄCA REDUKCJA MAKSYMALNEGO
NACISKU NA ZAGROŻONE OBSZARY CIAŁA




KOŚĆ KRZYŻOWA



KOŚĆ KULSZOWA

W PRZYPADKU STANDARDOWEJ PODUSZKI Z PIANKI Z EFEKTEM PAMIĘCI

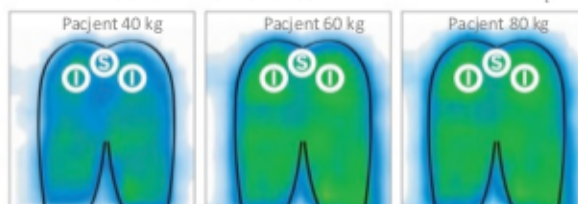

W PRZYPADKU VISCOFLEX®+



VISCOFLEX®+ BARIATRIC

➤ dla pacjentów bariatrycznych



PODUSZKA VISCOFLEX®+ Z KLINEM

➤ dla pacjentów z osłabioną stabilnością



Kod artykułu	Opis	Rozmiary (cm / cale) (szer. x dł.)	Waga pacjenta (kg / funty)	
			Min.	Max.
P361CA32321HW	Poduszka P361CA VISCOFLEX®+	32 x 32 / 13 x 13	15 / 33	50 / 110
P361CA36361HW		36 x 36 / 14 x 14	30 / 66	50 / 110
P361CA38381HW		38 x 38 / 15 x 15	30 / 66	90 / 198
P361CA38431HW		38 x 43 / 15 x 17	40 / 88	100 / 220
P361CA42421HW		42 x 42 / 16 x 16	40 / 88	100 / 220
P361CA42461HW		42 x 46 / 16 x 18	40 / 88	110 / 242
P361CA45421HW		45 x 42 / 18 x 16	40 / 88	110 / 242
P361CA45461HW		45 x 46 / 18 x 18	40 / 88	130 / 286
P361CA48431HW		48 x 43 / 19 x 17	40 / 88	140 / 308
P361CA51461HW		51 x 46 / 20 x 18	60 / 132	150 / 330
P361CA51501HW		51 x 50 / 20 x 20	60 / 132	160 / 352
P361CA56461HW	P361CA - VISCOFLEX®+ Bariatric	56 x 46 / 22 x 18	60 / 132	230 / 507
P361CA61501HW		61 x 50 / 24 x 20	80 / 176	270 / 595
P361CP42421HW	Poduszka P361CP VISCOFLEX®+ z klinem	42 x 42 / 16 x 16	40 / 88	100 / 220
P361CP45421HW		45 x 42 / 18 x 16	40 / 88	110 / 242
P361CP45461HW		45 x 46 / 18 x 18	40 / 88	130 / 286

GWARANCJA

2
LATA



SYST'AM® P361CA / PODUSZKA VISCOFLEX®+

«ZALETY» PRODUKTU

FORMOWANA, WISOKOELASTYCZNA PIANKA Z EFEKTEM PAMIĘCI

- Dopasowuje się do ciała i zwiększa obszar podparcia;
- Lepiej rozkłada nacisk: redukuje nacisk w miejscach najbardziej narażonych na odleżyny i wspomaga krążenie krwi;
- Poprawia komfort i stabilizuje pacjenta;
- Jest zabezpieczona przed kruszeniem; Tzw. Efekt skorki na powierzchni
- Jest zabezpieczona przed odkształceniem i deformacją.

ELEMENT WEWNĘTRZNY: INNOWACYJNA KONCEPCJA ERGONOMICZNEGO ELEMENTU WEWNĘTRZNEGO

- Wykonany z pianki o wysokiej gęstości, stanowi część struktury poduszki. Pełni funkcję szkieletu poduszki, pozwalającego rozmieścić różną gęstość pianki w odmiennych obszarach poduszki;
- Umożliwia optymalne zagłębienie wypukłości kostnych (kość krzyżowa, kość kulszowa) w pianie: oznacza to dostateczne zagłębienie się obszaru zagrożonego odleżynami, ale jednocześnie kontrolę i stabilizację takiego zagłębienia oraz nie dopuszczenie do zapadnięcia.

PODUSZKA ZABEZPIECZONA PRZED KRUSZENIEM – EFEKT SKÓRKI

- Chroniona przed czynnikami zewnętrznymi.

ANATOMICZNY KSZTAŁT Z UNIESIONYMI KRAWĘDZIAMI BOCZNYMI I NACHYLENIEM PRZÓD-TYL

- Lepsze pozycjonowanie, stabilność i komfort pacjenta;
- Zwiększony kontakt z ciałem pacjenta, a tym samym zredukowany nacisk.

PODSTAWA ANTYPOŚLIZGOWA

- Zapobiega zsuwaniu się poduszki z fotela.

ULTRA LEKKA


PODUSZKA O RÓŻNICOWANEJ WYSOKOŚCI

- Różna wysokość części przód-tył elementu wewnętrznego umożliwia odzyskanie równowagi przez siedzącego pacjenta, a tym samym zredukowanie obciążenia strefy kości kulszowej.

WYSOCE ODDYCHAJĄCY POKROWIEC (NIEPRZEMAKALNY)

- Dostosowany dla pacjentów nie trzymających moczu;
- Redukuje efekt maceracji dzięki ułatwieniu skórze oddychania.

①

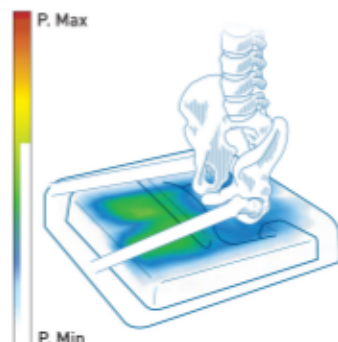

REDUKCJA OBCIĄŻENIA W ZAGROŻONYCH STREFACH

- Ochrona zagrożonych stref (kość krzyżowa / kość kulszowa) (nawet w przypadkach tyłopochylenia miednicy) w celu zapewnienia częściowego odciążenia wypukłości kostnych poprzez zagłębienie.

②

(WIDOK PRZEKROJU 1)




SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY WYCZUWANIU FOTEŁA

- Specjalnie ułożony względem kości kulszowej (B).
- Zapewnia przeniesienie nacisku na strefy boczne pośladków, stabilizując tym samym zagłębienie miednicy i zapobiegając jej pełnemu zagłębieniu (efekt docisku do siedziska).

③

(WIDOK PRZEKROJU 2)

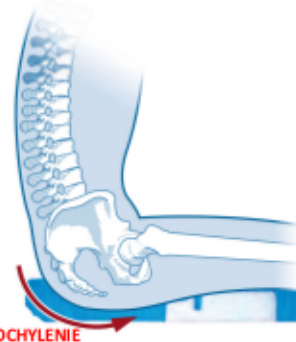

WYPUKŁOŚĆ PRZED KULSZOWĄ

- Blokuję kość kulszową, zapobiegając tym samym zsuwaniu się do przodu.

SYST'AM® P361CP / PODUSZKA VISCOFLEX®+ Z KLINEM

«ZALETY» PRODUKTU

CECHY PODUSZKI VISCOFLEX®+ Z KLINEM

INNOWACYJNY KLIN STABILIZUJĄCY Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI, CAŁKOWICIE NIEZALEŻNY OD PODUSZKI

- W przeciwieństwie do innych systemów, w których klin jest umieszczany wewnątrz pokrowca poduszki, klin stabilizujący SYSTAM® wyposażony jest we własny pokrowiec mocowany do poduszki.
- Uprozczone umieszczanie i regulacja produktu przez personel medyczny.
- Uprozczone przenoszenie z fotela dzięki możliwości natychmiastowego i łatwego usunięcia klina stabilizującego.

KLIN Z KOMPLETNYM POKROWCEM

- Zapewnia nieprzemakalną barierę dla moczu.
- Materiał pokryty elastycznym, miękkim w dotyku poliuretanem, tak zaprojektowanym, by redukował napięcie we wrażliwych punktach.


ZAPOBIEGANIE ZSUWANIU SIĘ DO PRZODU (NIESTABILNOŚĆ W PŁASZCZYZNIE STRZAŁKOWEJ)

- Zapobieganie upadkom i prawdziwa alternatywa dla środków ograniczających swobodę ruchów.



SYSTEM MOCOWANIA DO SIEDZISKA

- Zabezpiecza pacjenta mającego tendencję do zsuwania się do przodu lub do wypadania z siedziska poprzez utrzymywanie poduszki na miejscu, pomimo nacisku działającego na przednią jej część.

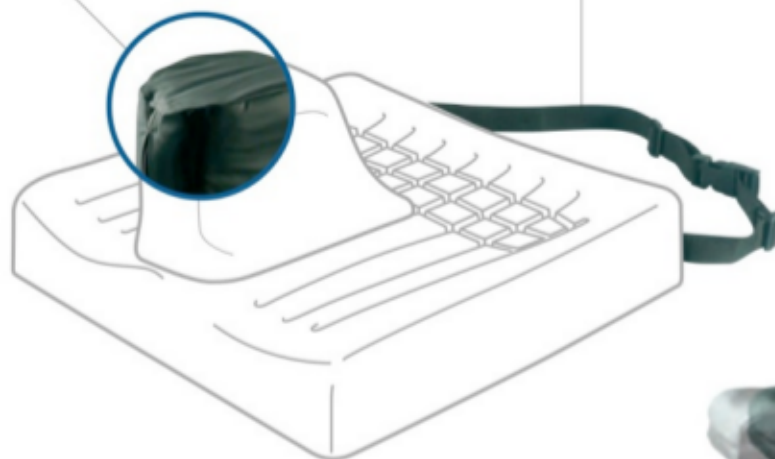

KLIN O ANATOMICZNYM KSZTAŁCIE

- Uwzględnia morfologiczne zaokrąglenie ud.
- Uwzględnia naturalny kąt otwarty dolnych kończyn (część dalsza węższa od części bliższej).
- Możliwość głębokiego, łatwego ułożenia klina przez personel medyczny przy jednoczesnym maksymalnym komforcie pacjenta uzyskiwanym dzięki wyjątkowo wąskiej końcówce przedłonowej.



FORMOWANY KLIN STABILIZUJĄCY

- Bez ostrych krawędzi, dzięki czemu ograniczone są strefy tarcia i wynikający z tego dyskomfort pacjenta.
- Wysoce odporna pianka zapewnia optymalny komfort w strefach nacisku.



REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ KLINA

- Klin o dużym zakresie regulacji (ponad 10 cm).
- Możliwość precyzyjnego dostosowania do morfologii każdego pacjenta.
- Wyjątkowo łatwa regulacja klina ze względu na całkowitą niezależność produktu od poduszki.



PRODUKT DOSTĘPNY
W 3 ROZMIARACH



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



POZYCJONOWANIE I ZSUWANIE DO PRZODU U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH

W przypadku pacjentów geriatrycznych zsuwanie się do przodu w pozycji siedzącej stanowi bardzo często spotykaną wadę postawy. Podczas, gdy rany krzyżowo-ogonowe w przeszłości były przypisywane wyłącznie pozycji leżącej, zsuwanie do przodu w pozycji siedzącej obecnie jest uznawane za podstawowy czynnik ryzyka w tym zakresie.

Dlatego, gdy tylko zsuwanie do przodu się pojawi, bardzo istotne jest zalecenie korzystania z poduszki utrudniającej zsuwanie.



PRZYCZYNY ZSUWANIA DO PRZODU

- Zjawisko zsuwania do przodu powodowane jest przez niewłaściwą postawę, która może wynikać z hipertonii (retropulsja, odchylenie miednicy) lub hipotonii (słabe mięśnie międzyżebrowe, znaczna kifoza).
- Zazwyczaj przyczyną zsuwania do przodu jest utrata zdolności psychoruchowych, zauważalna wada anatomiczna pleców lub reakcja na ból w miejscach nacisku.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZSUWANIEM DO PRZODU

- Wrzody krzyżowo-ogonowe, wynikające ze zsuwania do przodu
- Zmienione z wiekiem ustawienie kręgosłupa.
- Wiele badań pokazuje, że starzeniu się towarzyszy powiększająca się kifoza grzbietowa oraz utrata lordozy lędźwiowej, przy odchyleniu miednicy średnio o 6° pomiędzy wiekiem 40 i 60 lat.



- W pozycji siedzącej spłaszczenie lędźwiowe i odchylenie fizjologiczne miednicy są bardziej zauważalne u starszych ludzi.
- Przy zsuwaniu do przodu tyłopochylenie miednicy jest na tyle duże, że w pozycji siedzącej powoduje znaczny nacisk na obszar krzyżowo-ogonowy.
- Ponadto, gdy w pozycji siedzącej miednica jest odchylona do przodu, waga górnej części ciała generuje siły nacisku, które sprzyjają powstawaniu odleżyn.

- Generalnie, zsuwanie do przodu w pozycji siedzącej stanowi główny czynnik ryzyka związany z powstawaniem odleżyn krzyżowo-ogonowych u starszych pacjentów.

Wpływ zsuwania do przodu na oddychanie:

- Zsuwanie do przodu w pozycji siedzącej w postępujący sposób zwiększa krzywiznę kifozy grzbietowej, ograniczając tym samym powiększanie (rozszerzanie) klatki piersiowej i możliwość poruszania się przepony. W wyniku tego pojemność oddechowa wyraźnie spada.

POSTAWA I POZYCJA SIEDZĄCA

Wpływ poduszki pozycjonującej na zsuwanie do przodu

- Dla starszych pacjentów kluczowe jest więc zachowanie stabilnej postawy w pozycji siedzącej, aby zapobiec pojawieniu się odleżyn krzyżowo-ogonowych i zwiększeniu retropulsji.
- Ustabilizowanie zsuwania do przodu z wykorzystaniem klina miednicowego powoduje zablokowanie miednicy w płaszczyźnie strzałkowej.
- Niemniej, aby sprzyjał stabilizacji w maksymalnie podniesionej pozycji, klin wymaga regulacji.
- Jest to niezwykle istotne, ponieważ jakakolwiek stabilizacja, która umożliwia nawet nieznaczoną możliwość zsuwania do przodu, stwarza zagrożenie powstania nacisku krzyżowo-ogonowego.
- Tylna część łęku posiada niezbędną krzywiznę i zwężenie zapewniające dopasowanie do anatomicznego kształtu miednicy oraz pozwalające uniknąć zwiększonego nacisku na spojenie łonowe.
- Łatwo zdejmowalny klin łonowy, nie wymagający całkowitego, ani częściowego usuwania pokrowca poduszki, w dużej mierze ułatwia przenoszenie pacjenta.
- Poduszka pozycjonująca, prawdziwa alternatywa dla środków ograniczających swobodę ruchów
- W praktyce, środki ograniczające swobodę ruchów nadal są szeroko stosowane w placówkach opieki geriatrycznej w celu stabilizowania pozycji siedzącej.
- Istnieją różne procedury: taśmy, mocowania, bransolety, kaftany, uprząże, pasy, poręczne zabezpieczające, krzesła ze stolkami.
- Raport A.N.A.E.S. (komitet ekspertów) zaleca stosowanie systemu alternatywnego dla środków ograniczających swobodę ruchów.
- Środki te powodują wzrost podenerwowania, nacisk na brzuch i dyskomfort pacjentów; ponadto, tak pacjenci, jak i ich bliscy postrzegają je jako poniżające.

- Szacuje się, że 1/1000 zgonów związany jest ze stosowaniem środków ograniczających swobodę ruchów, przy czym 58% tego typu środków jest używanych w przypadku pacjentów na fotelach inwalidzkich.
- Poduszka wspomagająca zachowanie odpowiedniej postawy zapewnia rozwiązanie dla zsuwania do przodu, jednocześnie sprzyjając bezpieczeństwu pacjenta i pomagając zachować jego godność.

NASZE PODUSZKI I OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE

SYST'AM® P301C I P302C / PODUSZKA POLYAIR®

2 KOMOROWA, PNEUMATYCZNA PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA

MATERIAŁY



Laxpren



Zdejmowalny,
nieprzemakalny
pokrowiec
Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja poduszki:



Konserwacja pokrowca:



PRZEZNACZENIE

Ryzyko

NISKIE

BARDZO
WYSOKIE


Poduszka P301C / P302C POLYAIR® powinna być stosowana w przypadku:

- 1 - istniejących odleżyn (od I do IV stopnia według EPUAP). LUB
- 2 - podwyższonego lub bardzo wysokiego zagrożenia odleżynami, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...). Poduszka POLYAIR® jest odpowiednia dla pacjentów: którzy w przeszłości mieli już odleżyny w miejscach ciała wchodzących w kontakt z siedziskiem; i/lub cierpią na całkowity lub częściowy paraliż tułowia lub dolnych kończyn; i/lub mają upośledzone czucie lub brak czucia w dolnej kończynie; i/lub mają porażenie mózgowe/przykurcze; i/lub mają upośledzoną stabilność przednią i boczną; i/lub mają asymetrię postawy, brak równowagi krzyżowo-miednicznej; i/lub są po amputacji naczyniowej; i/lub są w ogólnym złym stanie.

SYST'AM® P301C
(bez pokrowca)



SYST'AM® P301C
(z pokrowcem)

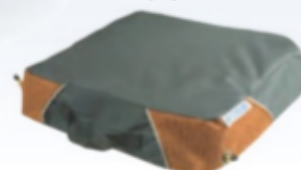

POLYAIR® 60 - P301C

POLYAIR® 60 jest najbardziej odpowiednia dla aktywnych pacjentów o drobnej budowie, mogących samemu przenosić swój ciężar i wymagających niewielkiej pomocy przy opuszczaniu wózka lub nie wymagających takiej pomocy wcale.

POLYAIR® 100 - P302C

POLYAIR® 100 jest najbardziej odpowiednia dla większych, mniej aktywnych pacjentów o bardzo ograniczonej mobilności, którzy są zagrożeni powstaniem, lub u których już są obecne, odleżyny.

Kod artykułu	Opis	Rozmiary (cm / cale) (szer. x dł.)	Waga pacjenta (kg / funty)		Rozmiar pośladków
			Min.	Max.	
P301C36361HW	P302C - POLYAIR® 60	36 x 36 / 14 x 14	20 / 44	60 / 132	50 - 75 / 19 - 29
P301C40402HW		40 x 40 / 16 x 16	30 / 66	80 / 176	75 - 95 / 29 - 37
P301C40431HW		40 x 43 / 16 x 17	30 / 66	90 / 198	75 - 115 / 29 - 45
P301C40461HW		40 x 46 / 16 x 18	30 / 66	110 / 242	75 - 115 / 29 - 45
P301C43431HW		43 x 43 / 17 x 17	30 / 66	110 / 242	95 - 115 / 37 - 45
P301C46401HW		46 x 40 / 18 x 16	40 / 88	120 / 264	95 - 135 / 37 - 53
P301C46461HW		46 x 46 / 18 x 18	40 / 88	140 / 308	115 - 135 / 45 - 53
P301C51461HW		51 x 46 / 20 x 18	40 / 88	160 / 352	135 / 53 and +
P301C51501HW		51 x 50 / 20 x 20	40 / 88	180 / 396	135 / 53 and +
P302C40401HW		40 x 40 / 16 x 16	40 / 88	80 / 176	75 - 95 / 29 - 37
P302C40431HW	P302C - POLYAIR® 100	40 x 43 / 16 x 17	40 / 88	90 / 198	75 - 115 / 29 - 45
P302C40461HW		40 x 46 / 16 x 18	40 / 88	120 / 264	75 - 115 / 29 - 45
P302C43431HW		43 x 43 / 17 x 17	40 / 88	110 / 242	75 - 115 / 29 - 45
P302C46401HW		46 x 40 / 18 x 16	40 / 88	120 / 264	95 - 135 / 37 - 53
P302C46461HW		46 x 46 / 18 x 18	40 / 88	140 / 308	115 - 135 / 45 - 53
P302C51461HW		51 x 46 / 20 x 18	40 / 88	160 / 352	135 / 53 and +
P302C51501HW		51 x 50 / 20 x 20	40 / 88	180 / 396	135 / 53 and +

GWARANCJA





SYST'AM® P301C I P302C / PODUSZKA POLYAIR®

«ZALETY» PRODUKTU

EFEKTYWNA, ERGONOMICZNA I KOMFORTOWA

- Zapewnia maksymalny kontakt pacjenta z powierzchnią, na której siedzi, poprzez dopasowanie się do wypukłości obszaru kości krzyżowej. Powoduje to niezwykle wydajne zredukowanie wartości nacisku przezskórnego (mierzonej z wykorzystaniem urządzenia obrazowania 3D nacisku) na pośladki, przy niewielkim lub nieobecnym nacisku o sile skierowanej przeciwnie.
- POLYAIR® dostosowuje się do wszelkiego rodzaju anatomii, przede wszystkim dzięki wentylacji odbywającej się poprzez wewnętrzne kanały odpowietrzające pozwalające na natychmiastowe dostosowanie się poduszki do morfologii pacjenta i chroniące przed odleżynami.
- POLYAIR® to efektywne rozwiązanie w zakresie zapobiegania odleżynom w miejscach nimi zagrożonych, a także wspomagające gojenie już istniejących odleżyn.
- POLYAIR® stanowi również wyjątkową barierę przeciwko efektom maceracji, napięciom i tarcia dzięki:
 - poprawionemu napowietrzeniu w zagrożonych obszarach;
 - redukcji czynników powodujących deformację tkanki;
 - zwiększonej stabilizacji będącej wynikiem konstrukcji przypominającej plaster miodu.

ZASADY DZIAŁANIA

Dostosowanie do morfologii pacjenta

- Redukcja nacisku dzięki większemu obszarowi powierzchni;
- POLYAIR® dostosowuje się do wszelkiego rodzaju anatomii, przede wszystkim dzięki wentylacji odbywającej się poprzez wewnętrzne kanały odpowietrzające pozwalające na natychmiastowe dostosowanie się poduszki do morfologii pacjenta i chroniące przed odleżynami.

Niezależne, mobilne bloczki

- Efektywne przeciwdziałanie tarcia
- Zapewnienie równomiernego nacisku we wszystkich komorach.

Redukcja efektu maceracji

- Kanały wentylacyjne zapewniają lepszy przepływ powietrza.



KONSTRUKCJA
PRZYPOMINAJĄCA
PLASTER MIODU
(patrz str. 43)



LAXPREN, NOWOCZESNY MATERIAŁ
(patrz str. 43)

WYTWARZANE W PROCESIE ZANURZANIA MATRYCY
W LAXOPRENIE
(patrz str. 43)

DWIE ODDZIELNE KOMORY
(patrz str. 42)




DOSTARCZANA WRAZ Z
WŁASNĄ SYSTESEM
NAPEŁNIANIA
POWIETRZEM
(patrz str. 43)

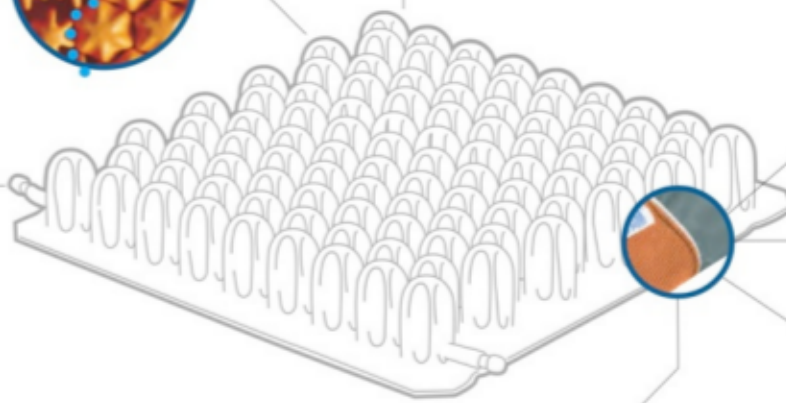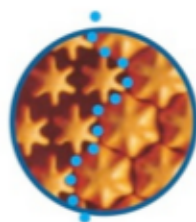

POKROWIEC

- Podstawa antypoślizgowa: zapobiega zsuwaniu się poduszki z siedziska ❶.
- Pokrowce nieprzemakalne (lecz przepuszczalne dla pary i powietrza): odpowiednie dla pacjentów nie trzymających moczu;
- Redukcja efektu maceracji dzięki ułatwieniu skórze oddychania.
- Otwory boczne ❷:
 - umożliwiające wsunięcie do poduszki zaworów po napełnieniu powietrzem;
 - umożliwiające przepływ powietrza ze środka na zewnątrz pokrowca: dzięki lepszej wentylacji poduszki redukowany jest efekt maceracji.
- Praktyczne akcesoria ❸: zdejmowalna kieszonka, umieszczana pomiędzy poduszką a fotelem, przeznaczona na drobne, chusteczki, ...

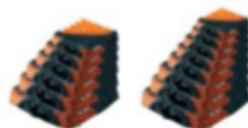


OBYDWA MODELE
DOSTĘPNE W RÓŻNYCH
ROZMIARACH

SYST'AM® P301C I P302C / PODUSZKA POLYAIR®

«ZALETY» PRODUKTU

DWIE ODDZIELNE KOMORY

- Wszystkie poduszki POLYAIR® wyposażone są w dwie komory (lewą i prawą), całkowicie od siebie niezależne. Dzięki załączonemu manometrowi i tabeli ciśnień można je napełniać powietrzem do takich samych lub różnych wartości ciśnienia.
- Taka konstrukcja jest szczególnie korzystna w przypadku korygowania braku równowagi krzyżowo-miednicznej, a jednocześnie zapewnienia większą stabilność i komfort.

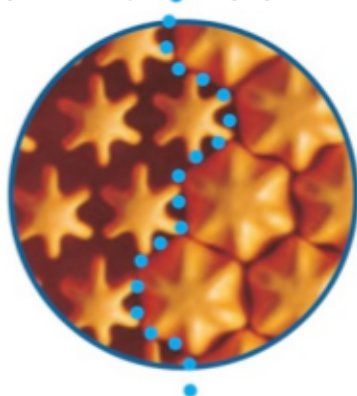

PODUSZKA POLYAIR®: 2 KOMORY



Brak równowagi krzyżowo-miednicznej



Korekcja równowagi: lepsza stabilność i pozycja




POJEDYNICZA KOMORA



Brak równowagi krzyżowo-miednicznej




Mniejsza stabilność, niepoprawna pozycja

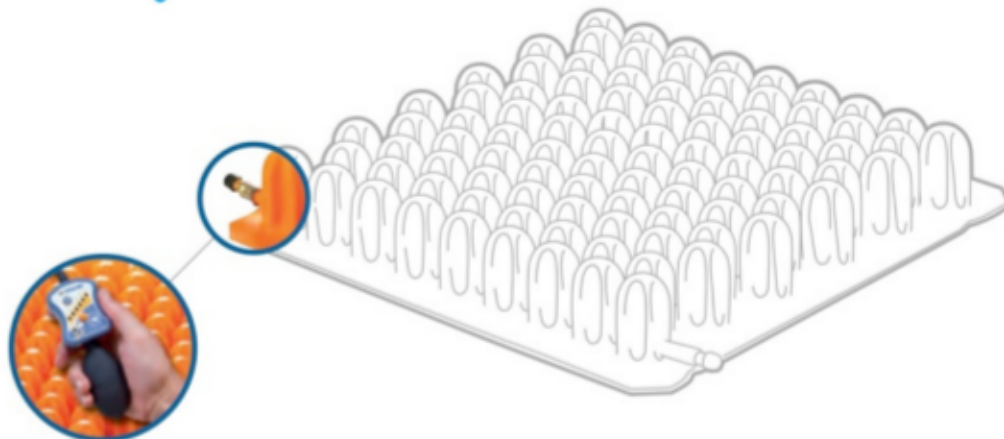


ORYGINALNY SYSTEM NAPEŁNIANIA POWIETRZEM

- Nieodpowiednia regulacja napełnienia powietrzem osłabia efektywność blozków poduszki.
- Poduszka napełniona powietrzem nadmiernie lub niedostatecznie może przyczynić się do powstania odleżyn.
- Ponieważ różnice w napełnieniu powietrzem każdej z komór (kilka mmHg) nie mogą być wykryte przez dotyk, jedynym sposobem na to, by bločki poduszki poprawnie napełnić powietrzem, jest użycie narzędzi, takich jak manometr ze skalą.
- Jedynie manometr pozwala uwzględnić ciężar pacjenta i powierzchnię ciała, jaka wchodzi w kontakt z poduszką. Taka metoda, zapewniająca precyzyjne rezultaty, gwarantuje efektywne zapobieganie.

PODUSZKA NAPEŁNIONA RĘCZNIE

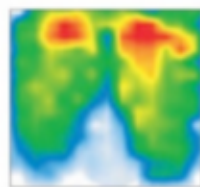


PODUSZKA NAPEŁNIONA NIEDOSTATECZNIE

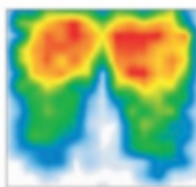

PODUSZKA NAPEŁNIONA NADMIERNIE

NIEEFEKTYWNE

PODUSZKA POLYAIR® NAPEŁNIONA POWIETRZEM Z UŻYCIEM MANOMETRU

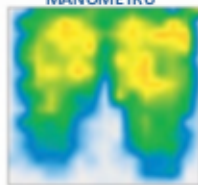

EFEKTYWNE ZAPOBIEGANIE

Proste napełnianie powietrzem dzięki matrycy napełnienia i manometrowi ze skalą



- Aby móc określić odpowiedni poziom napełnienia powietrzem, konieczna jest znajomość wagi pacjenta.



- Pomiar obwodu pośladków pozwala ocenić powierzchnię wchodzącą w kontakt z poduszką.



- Miejsce na tabeli napełnienia, w którym przecinają się waga pacjenta i obwód pośladków oznacza wartość napełnienia powietrzem, która w efektywny sposób pozwoli zapobiegać powstawaniu odleżyn.



SYST'AM® P301C I P302C / PODUSZKA POLYAIR®

«Zalety» produktu


POLYAIR®: PODUSZKA WYTWARZANA W PROCESIE ZANURZANIA

Poniżej przedstawione pomiary wykonane zostały przy udziale jednego pacjenta siedzącego na poduszkach dwóch różnych typów (poduszce wytworzonej w procesie zanurzenia i poduszce formowanej za pomocą tłoczenia); obydwa produkty napełnione zostały powietrzem o kilku różnych wartościach ciśnienia.



Poduszka wytwarzana w procesie zanurzenia

- Elastyczna i sprężysta w dotyku
- Dostosowująca się w miarę napełniania powietrzem

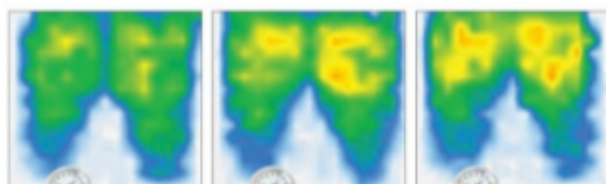

Ciśnienie:
30 mmHg


Ciśnienie:
40 mmHg

Ciśnienie:
50 mmHg



Poduszka formowana za pomocą tłoczenia

- Grubość większa, niż w przypadku procesu zanurzenia
- Tendencja do twardnienia po napełnieniu.

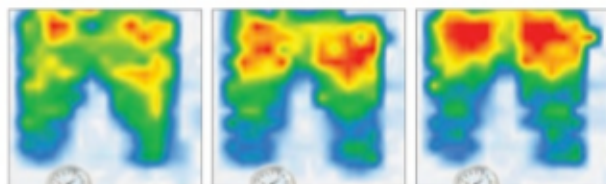

Ciśnienie:
30 mmHg

Ciśnienie:
40 mmHg

Ciśnienie:
50 mmHg

PODUSZKA WYKONANA Z LAXPRENU

- Laxpren został opracowany z myślą o tym, by zapewniał:
 - możliwość dostosowywania,
 - odporność na rozdarcia,
 - oraz utrzymanie danego ciśnienia powietrza.

- Trwałość stanowiła czynnik kluczowy przy wyborze Laxprena. Materiał ten sprawia, że POLYAIR® jest wysoce wytrzymała nawet na silne rozdieranie (bardziej wytrzymała, niż neopren i polichloropren).

Cechy i trwałość Laxprena

Materiał Laxpren został specjalnie tak opracowany przez SYST'AM®, by zapewniał:

- brak reakcji alergicznych (Laxpren® Latex);
- bardzo dużą rozciągliwość przy niezwykle wysokiej wytrzymałości na rozdarcia.
- Ponadto, ponieważ Laxpren poddawany jest procesowi zanurzenia, POLYAIR® zyskuje wyjątkową elastyczność zapewniającą idealną reakcję na ciśnienie napełnienia powietrzem.



KONSTRUKCJA PRZYPOMINAJĄCA PŁASTER MIODU:

- Układ plastra miodu zapewnia optymalizację gęstości blozków pneumatycznych, zwiększa powierzchnię wchodzącą w kontakt z ciałem pacjenta oraz poprawia rozkład nacisku, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko powstania odleżyn.

PODUSZKA Z
BLOZKAMI
PNEUMATYCZNYMI

POLYAIR®



od 16 do 25 blozków

30 blozków

OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE

SYST'AM® P951D / OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE & TERAPEUTYCZNE ZESTAWY - COMBI

OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE WYKONANE Z WISKOELASTYCZNEJ PIANKI Z EFEKTEM PAMIĘCI ORAZ ZE ZRÓŻNICOWANĄ POWIERZCHNIĄ

MATERIAŁY

80
kg/m³



Pianka z
pamięcią



Zdejmowany
pokrowiec
Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:




PRZEZNACZENIE

Podparcie pleców P951D i terapeutyczne wkłady Combi mogą być wykorzystywane do:

- 1 - Polepszenia pozycjonowania na wózku inwalidzkim.
- 2 - Zredukowania zsuwania do przodu.


SYST'AM® P951D

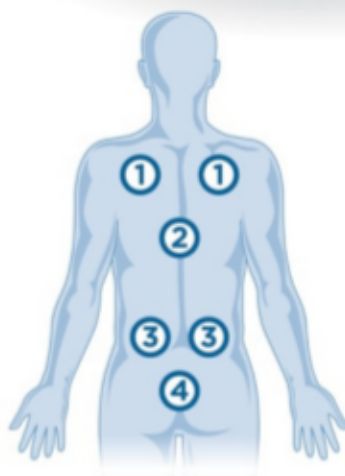


- ① ŁOPATKI / RAMIONA
- ② OBSZAR ŻEBROWY
- ③ OBSZAR LĘDŹWIOWY
- ④ OBSZAR KOŚCI KRZYŻOWEJ




BEZ PODUSZKI
PODPIERAJĄCEJ
PLECY

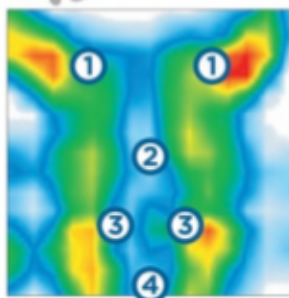

Z WYKORZYSTANIEM
PODPARCIA PLECÓW
ZE ZWYKŁEJ PIANKI

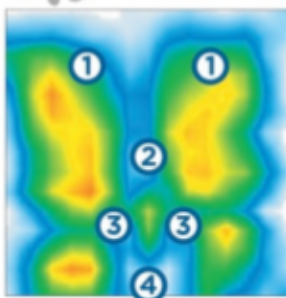

Z WYKORZYSTANIEM
PODUSZKI OPARCIA
PODPIERAJĄCEJ
PLECY SYST'AM®

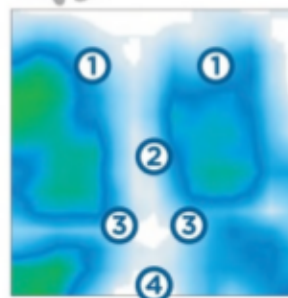

Kod artykułu	Opis	Rozmiary (szer. x dł. x wys.) (cm / cale)
P951DS1HW	P951D – Poduszka oparcia, mała	44 x 39 x 9 / 17 x 15 x 3,5
P951D1HW	P951D – Poduszka oparcia, standardowa	49 x 44 x 9 / 19 x 17 x 3,5
P951DL1HW	P951D – Poduszka oparcia, duża	49 x 50 x 10 / 19 x 20 x 4

GWARANCJA

2
LATA



SYST'AM® P951D / OPARCIA PRZECIWODLEŻYNOWE & TERAPEUTYCZNE ZESTAWY COMBI

«ZALETY» PRODUKTU

PODPARCIE PLECÓW SYST'AM® WYPOSAŻONE JEST W PODUSZKĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ POWSTAWIANIU ODLEŻYN:

→ NIEZWYKLE KOMPLEMENTARNY SYSTEM

- Zapewnia zauważalną ulgę w miejscach ucisku kręgosłupa.
- Redukuje ryzyko powstania odleżyn w obszarze kości krzyżowej dzięki zmniejszeniu niestabilności w płaszczyźnie strzałkowej (zsuwanie do przodu).
- Redukuje nacisk w obszarach kości krzyżowej/pośladków dzięki lepszemu podparciu miednicy.

ANATOMICZNY KSZTAŁT

- Uwzględnia morfologię pleców wynikającą z niepoprawnego ustawienia miednicy.
- Uwzględnia anatomię znajdującego się nisko obszaru lędźwiowego, istotnego aspektu postawy.

WIĘKSZY KOMFORT PACJENTA NA FOTELU INWALIDZKIM

- Boczne poduszki chronią grzbietowy obszar pachowy przed kontaktem z ramą wózka, co często okazuje się bolesne dla osób korzystających z wózka.



SPOSÓB DZIAŁANIA KONSEPCJI ZRÓŻNICOWANEJ GĘSTOŚCI


- Powierzchnia o zróżnicowanej gęstości pozwala na lepszy rozkład nacisku dzięki przeniesieniu go z obszarów o niższej gęstości w kierunku obszarów o wysokiej gęstości:

BIAŁE OBSZARY:

Obszary o niższej gęstości (miękkie podparcie) uwalniają obszar żeber od zwiększonych nacisków i sprzyjają poprawnemu dopasowaniu grzbietowemu.

NIEBIEŚKIE OBSZARY

Obszary o wysokiej gęstości (twardsze podparcie) przenoszą nacisk z obszarów wysokiego ryzyka i zapewniają stabilność boczną.

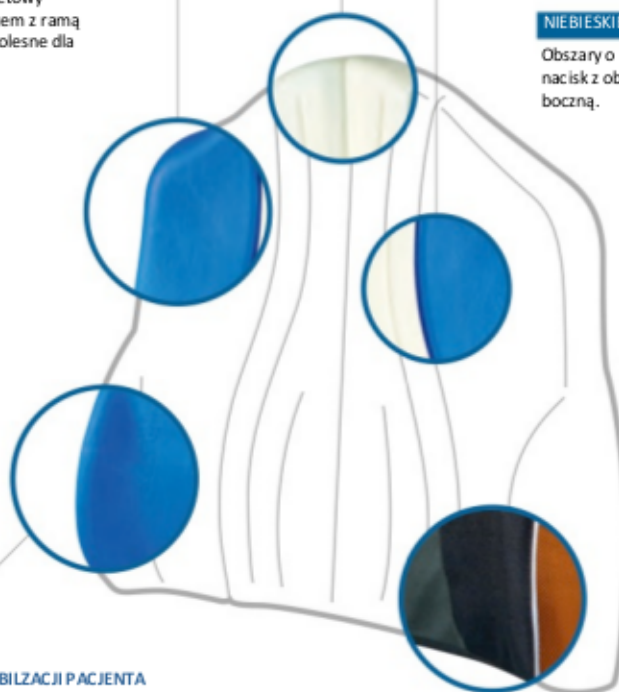

LEPSZE POZYCYJNOWANIE I STABILIZACJA PACJENTA

- Dzięki stabilizowaniu obszaru miednicy podparcie zapobiega zsuwaniu się pacjenta i niweluje zagrożenie upadkiem. Jest to problem bardzo często napotykanym przez osoby starsze w domu oraz w domach opieki;
- Boczne „poduszki” redukują niestabilność boczną, która jest często spotykana u osób niepełnosprawnych.

POKROWIEC

- W obszarze grzbietowym dwustronny, elastyczny materiał pokryty jest oddychającym i całkowicie nieprzemakalnym poliuretanem.
- Elastyczny materiał odporny jest na tarcie i warunki związane z intensywną, codzienną eksploatacją.
- Wysoce wytrzymała tkanina techniczna umieszczona została w obszarach narażonych na intensywniejsze tarcie.

UNIWERSALNY SYSTEM MOCOWANIA

- Umożliwia dostosowanie podparcia pleców do wielkości modeli wózków inwalidzkich

