

Aparat do masażu ciała MG 100



Beurer MG 100 to ektryczne urządzenie masujące z lampą podczerwieni dzięki ktoremu można zafundować sobie i innym osobom skuteczny, dobroczynny masaż do samodzielnego wykonania. Masaże mogą działać odprężająco lub pobudzająco i są chętnie stosowane w przypadku napięcia mięśni, dolegliwości bólowych i zmęczenia. Urządzenie jest przeznaczone do użytku własnego, nie do celów medycznych lub komercyjnych.

Masażer ręczny Beurer MG 100 jest przeznaczony do masażu pojedynczych części ludzkiego ciała.

Włącz urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył. Rozpocznie się program startowy. W razie potrzeby za pomocą przycisku Speed można zwiększyć lub zmniejszyć prędkość masażu (naciśnięcie przycisku zmniejsza lub zwiększa prędkość o jeden poziom - do wyboru 5 poziomów prędkości). Naciskając przycisk Programs, można wybrać spośród 3 różnych programów masażu (w których prędkość masażu jest już ustawiona).

- Relax: Relaksujący masaż falowy
- Vital: Energiczny masaż pulsacyjny.
- Active: Głęboko działający masaż pulsacyjny.

W przypadku każdego programu masażu można włączyć ogrzewanie podczerwienią, naciskając przycisk Heat. Urządzenie należy poprowadzić jedną lub dwiema rękami do obszaru ciała, który ma być masowany. Możliwe jest masowanie w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej siebie lub innej osoby. Poprzez silny lub słabszy nacisk aparatu do masaż możliwa jest zmiana intensywności masażu. Określone miejsce ciała należy masować nie dłużej niż 3 minuty, a następnie przejść do innych obszarów ciała. Po użyciu przez maksymalnie 15 minut należy wyłączyć urządzenie i pozostawić do ochłodzenia. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Producent zapewnia 3-letnią gwarancję na urządzenie

SPECYFIKACJA:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Waga | 1740g |
| Wymiary | 160 x 150 x 450mm |
| Zasilanie | AC 230 V, 50 Hz |
| maksymalny pobór mocy | 20W |
| Gwarancja | 3 lata |