

Opatrunek HyperOil 10x10 - 10 szt. olejek



HYPEROIL to zaawansowane roślinne opatrunki w postaci żelu, olejku oraz gaz nasączonych, które pomagają w regeneracji i leczeniu skóry w przypadku jakiegokolwiek jej uszkodzenia. HYPEROIL jest mieszaniną dwóch wyciągów olejowych z Dziurawca zwyczajnego oraz Drzewa Neem.

Właściwości:

- Gazy nasączone olejkiem 10 szt.
- Wyrób Medyczny klasy IIB
- 100 % pochodzenia roślinnego
- Nie wymaga stosowania środków dezynfekcyjnych, wystarczy sól fizjologiczna

- Można stosować w każdej z faz gojenia się rany
- Intensywnie wspomaga odbudowę nabłonka
- Wpływa na regenerację fizjologiczną i odbudowę tkanki
- Zapobiega uszkodzeniom skóry wokół zmian oraz powikłaniom bakteryjnym
- Łatwy w użyciu, idealny do stosowania w domu
- Pomaga usunąć tkankę martwiczą z rany
- Idealny do wszystkich rodzajów ran (gojenie się ran różnego pochodzenia przebiega w ten sam sposób):
 - rany ostre
 - przewlekłe
 - zainfekowane
 - klute
 - cięte
 - oparzeniowe

Opatrunki HYPEROIL są niezastąpione przy:

- uszkodzeniach powstałych w trakcie urazów i kontuzji
- odleżynach
- owrzodzeniach naczyniowych
- stopie cukrzycowej
- oparzeniach
- bliznach
- ropieniach odbytu i odbytnicy
- przetokach
- hemoroidach
- wrastaniu paznokci
- otarciach i ranach po wypadkach drogowych
- pielęgnacji tatuaży
- ugryzieniach komarów
- odmrożeniach

INSTRUKCJA UŻYCIA:

- ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej
- nie dezynfekować!
- osuszyć jałowym gazikiem
- pokryć ranę cienką warstwą odpowiedniego opatrunku HYPEROIL (w fazie ostrej zalecany jest olejek)
- w przypadku głębokich odleżyn wypełnić wgłębienie nasączonym opatrunkiem i pozostawić na 48 H
- zabezpieczyć bandażem lub plastrem
- czynność powtórzyć po 24 H (rany płytke)
- po rozpoczęciu procesu gojenia można zmniejszyć częstotliwość zmiany opatrunku na co 48 H, a w końcowej fazie na co 72 H
- po rozpoczęciu ziarninowania można przejść na stosowanie HYPEROIL w formie żelu

BADANIA KLINICZNE