

Materac rurowy dla osób bardzo ciężkich do 240 kg



Materac APM Bari

Materac przeznaczony dla osób bardzo ciężkich. System stosuje się do leczenia odleżyn, do stopnia IV (według EPUAP). Dzięki specjalnej konstrukcji, na materacu można pozycjonować pacjentów o wadze do 280 kg.

Dwa wysokiej jakości metalowe membrany zapewniają bezpieczną i długotrwałą pracę. Sterownik jest wyposażony w cyfrowy sensor kontroli, który reguluje wewnętrzne ciśnienie w materacu, tworząc idealne ciśnienie powierzchniowe. Funkcja Lock-off zapewnia płynne i ciche działanie między cyklami. Dodatkowe funkcje, takie jak tryb

opieki, 3 oddzielne cykle czasowe, tryb statycznym i automatyczna blokada klawiatury wypełniają przestrzeń stosowania oraz gwarantuje szybkie i łatwe działanie.

Materac jest szeroki na 120 cm, wyposażony w 18 komór wykonanych z nylonu i poliuretanu oraz specjalnie zaprojektowanych pasów do bezpiecznego utrzymywania ich miejscu. Każda komórka jest wyposażona w zatrzaski CPC, umożliwiające bardzo szybką wymianę/usuwanie komórek celem swobodnego pozycjonowania pacjenta w ciągu kilku sekundy. Pasy utrzymujące komórki cechują się bardzo wytrzymałą konstrukcją.

Pompa:

- Wymiary: 39 x 22 x 12,1 mm (dł. x szer. x wys.)
- waga: ~ 6 kg
- kompresor 2 membranowy w obudowie metalowej z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze
- cyfrowa kontrola z sensorem nacisku
- automatyczna blokada przycisków
- zmienny cykl pracy 5 -10-15 min
- tryb statyczny pracy dla pacjentów wrażliwych na ból
- tryb opieki
- tryb bariatryczny
- funkcja pamięci back-up
- alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych)
- alarm utraty zasilania

Materac:

- Wymiary: 200 x 120 x 24 cm
- waga: ~ 16 kg
- 18 komór , 3 statyczne komory głowy
- przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem(z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu)
- zawór reanimacyjny CPR

Materiał:

Komory:

- Wysokiej jakości nylon z poliuretanem gwarantuje olbrzymią trwałość
- Każda komórka wyposażona jest w szybką złączkę CPC, co pozwala na bardzo szybką wymianę lub usunięcie poszczególnych komór

Pokrowiec:

- Bi-elastyczny z powłoka poliuretanowo-poliestrową,
- oddychający zapinany na zamek błyskawiczny,
- wodoszczelny i paroprzepuszczalny,
- nylonowa komora na materac bazowy z pianki 3,5 cm grubego

Maksymalna waga pacjenta w trybie standardowym: 280 kg.