

Przyrząd do zakładania uciskowych pończoch i rajstop



Przyrząd do zakładania uciskowych pończoch i rajstop

Przy ograniczonej motoryce niezwykle ciężko jest ubrać podstawową garderobę czy ulubione ubranie. Jednym z podstawowych elementów ubioru są rajstopy lub pończochy. Przyrząd do zakładania uciskowych pończoch i rajstop to duże ułatwienie przy nakładaniu pończoch dla wszystkich osób, które chcą wygodnie zakładać pończochy bez pomocy innych i nie męczyć się każdego dnia. Samodzielne nakładanie pończoch uciskowych na obolałe nogi wymaga wiele wysiłku.

Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia, ubieranie pończoch będzie dużo prostsze i

łatwiejsze. Wygodna budowa zapewnia optymalną stabilność podczas nakładania pończoch, rajstop i podkolanówek uciskowych. Urządzenie ogranicza zaginanie się pończochy przez co w dużym stopniu ułatwia naciąganie jej na nogę. Wystarczy rozciągnąć pończochę na środkowa część przyrządu, włożyć stopę i podciągnąć przyrząd ciągłym ruchem w górę. Maksymalny obwód łydki aby bez problemu założyć produkt uciskowy to 45 cm. Wewnętrzna szerokość części do nasuwania rajstopy wynosi 14 cm (w nią wkładamy łydkę).

To niezwykle funkcjonalne i skuteczne urządzenie pomoże Ci bez trudu założyć rajstopy. Stojak wykonany jest z metalu i pokryty sztucznym tworzywem, posiada kształt rynny dla łatwiejszego użytkowania. Ten przyrząd do zakładania uciskowych pończoch i rajstop to nieoceniona pomoc w czynnościach dnia codziennego.

Wymiary produktu:

Długość: 17 cm

Szerokość: 21 cm

Wysokość: 35 cm

Waga: 1 kg

Przeznaczenie

Przyrząd do zakładania uciskowych pończoch i rajstop jest używany do zakładania pończoch podtrzymujących i uciskowych.

Przed użyciem

przed użyciem należy sprawdzić, czy ściągacz do pończoch nie jest uszkodzony, w przeciwnym razie pończochy mogą ulec uszkodzeniu!

Instrukcja użytkowania

1. Umieścić przyrząd na stabilnej i równej powierzchni.
2. Przyrząd powinien być zwrócony zamkniętą stroną w stronę twarzy użytkownika, pończochę uciskową umieścić w ramie wewnętrznej poprzez złożenie pończochy na półokręgu. góra pończochy musi być skierowana do przodu.
3. Umieścić ściągacz pończochy na stopkach i wsunąć stopę do pończochy, aż stopa(palce) dotknie podłogi.
4. Ostrożnie naciągnij skarpetę na kostkę i łydkę.
5. Sprawdź, czy palce i pięta skarpety są prawidłowo ułożone.
6. Jeśli skarpetka pasuje prawidłowo, chwyć wyścielane uchwyty przyrządu znajdujące się po prawej i lewej stronie i pociągnij do góry. kiedy dojdiesz do końca skarpety, odciągnij przyrząd do zakładania uciskowych pończoch do tyłu.

Ważne: upewnij się, że pończocha uciskowa nie marszczy się i nie jest nadmiernie rozciągnięta.

Czyszczenie i pielęgnacja

Przyrząd do zakładania uciskowych pończoch i rajstop może być czyszczony przy użyciu zwykłych domowych detergentów.

Ważne: Przy stosowaniu środków dezynfekcyjnych należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.