

Podpórka inwalidzka trójkółowa



Uniwersalna składana podpórka 3-kołowa wyposażona w ergonomiczne uchwyty hamulce z blokadą kół tylnych. Standardowo podpórka wyposażona jest w torbę. Podpórka jest składana, co sprawia, że jest łatwa w przechowywaniu i transporcie. Podpórkę składamy poprzez odgięcie poprzeczki łączącej lewą i prawą część ramy, a następnie ściśnięcie obydwu rękojeści ku sobie.

Podpórka trójkółowa służy do podparcia się w warunkach zaburzonej stabilności ciała wywołanej przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Podpórka przeznaczona jest dla osób, które potrzebują stabilnego wsparcia podczas nauki chodzenia, po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo – ortopedycznych. Także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi podczas chodzenia. Konstrukcja z trzema kółkami zapewnia dużą stabilność i łatwiejsze, bezpieczniejsze poruszanie się. Podpórka może być użytkowana na powierzchniach płaskich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Podpórka składa się ze stalowej ramy, dwóch rękojeści z uchwytami o regulowanej wysokości, dwóch kół tylnych wyposażonych w hamulce uruchamiane ręcznie oraz z samonastawnego kółka przedniego. Za pomocą śrub motylkowych (odkręcając i zakręcając je) umieszczonych blisko rękojeści możemy regulować wysokość rękojeści podpórki. W celu regulacji wysokości rękojeści należy poluzować pokrętło motylkowe, ustawić wymaganą wysokość a następnie dokręcić pokrętła. Należy upewnić się że rurka rękojeści jest umieszczona w rurze ramy na długości przynajmniej 5 cm.

Rama jest w kolorze indygo ! - nie jak na zdjęciu w kolorze srebrnym

Uchwyt rękojeści: elastomer

Torba: sztuczna skóra "skay"

Wymiary: szer. x dł. x wys. (cm): 68 x 68 x 85÷95

Wymiar po złożeniu: szer. x dł. x wys. (cm): 28 x 67 x 72

Koła pełne: 200x50

Waga wyrobu: 7,2 kg

Maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 115kg

Maksymalne obciążenie torby na zakupy nie może przekraczać: 5kg

Produkt posiada 12 miesięczną gwarancję licząc od daty zakupu.

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.