

Nasadka/nakładka toaletowa na sedes z odchylanymi poręczami Mobilex



Nasadka Toaletowa Mobilex z Poręczami: Wygodne Korzystanie z Toalety

Nasadka toaletowa Mobilex z poręczami to praktyczne rozwiązanie dla osób z ograniczoną ruchomością. Regulacja wysokości i dodatkowe poręcze zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas korzystania z toalety. Solidna konstrukcja i łatwy montaż sprawiają, że jest idealna dla seniorów i osób niesamodzielnych.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Możliwość dostosowania wysokości nakładki do indywidualnych potrzeb użytkownika, co zapewnia maksymalny komfort podczas korzystania z toalety.

Dodatkowe poręcze:

Poręcze zapewniają dodatkowe wsparcie i bezpieczeństwo podczas wstawania i siadania, co jest szczególnie istotne dla osób z ograniczoną ruchomością.

Solidna konstrukcja:

Wytrzymała konstrukcja gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, co sprawia, że nakładka jest idealna dla osób niesamodzielnych i seniorów.

Uniwersalność:

Nakładka jest kompatybilna z większością standardowych toalet, co sprawia, że jest praktycznym rozwiązaniem do użytku domowego.

Łatwy montaż:

Prosty montaż na toalecie za pomocą zacisków, co sprawia, że nakładka jest łatwa w instalacji i demontażu, bez konieczności specjalistycznego narzędzi.

Parametry techniczne:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Szerokość siedziska	36 cm
Szerokość z poręczami	61 cm
Głębokość całkowita	47,5 cm
Głębokość siedziska	42,5 cm
Wysokość całkowita	38 cm
Odległość między poręczami	50 cm
Regulowana wysokość siedziska	6/10/15 cm
Max. Obciążenie	120 kg

Montaż:

1. Usuń dwie przednie plastikowe zaślepki
2. Poluzuj śrubę i umieść poprzeczkę na wymaganej wysokości
3. Dokręć ją używając dwóch śrub
4. W podobny sposób zamocuj tylną poprzeczkę, obie powinny być na tej samej wysokości
5. Zdejmij dotychczasową deskę sedesową, w miejsce jej mocowania na muszli klozetowej wsuń dwa gwintowane pręty
6. Dokręć nasadkę do sedesu używając plastikowych nakrętek

Zastosowanie:

Nasadki toaletowe są przeznaczone jako dodatkowe siedzisko do użytku na toalecie, zapewniając stabilne i wygodne podparcie dla osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych podczas korzystania z toalety.

Przeciwwskazania:

Nie zaleca się korzystania z nakładek toaletowych przez osoby mające problemy z utrzymaniem równowagi lub zaburzeniami percepcji. Przeciwwskazania są zróżnicowane i zależą od indywidualnej oceny zdrowia użytkownika. Wybór sprzętu medycznego powinien być zawsze dokonywany przy udziale lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty, odpowiednio do diagnozy i potrzeb pacjenta.