

Wanna do mycia głowy w łóżku na leżąco



Wanna do mycia głowy w łóżku na leżąco

Doskonałej jakości wanienka do mycia głowy na leżąco sprawdzi się podczas pielęgnacji każdego pacjenta przebywającego na stałe w łóżku. Dedykowana jest szczególnie do mycia włosów osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej. Wanna do mycia głowy w łóżku umożliwia i idealnie uprawnia te czynności. Już nie musicie Państwo opuszczać łóżka aby umyć włosy, już teraz te czynności można wykonać bez konieczności zmiany miejsca położenia.

Ta wanna do mycia głowy na leżąco świetnie sprawdzi się podczas domowej opieki nad pacjentem niesamodzielnym jak również z podczas pobytu w szpitalu. Wanienka do mycia włosów na leżąco w zestawie posiada wygodny wąż spustowy który podnosi wygodę użytkowania. Doskonała, prosta w formie pomoc dla każdej unieruchomionej osoby jak również idealne rozwiązanie problemu mycia głowy podczas podróży czy w sanatorium. Wanna do mycia głowy w łóżku charakteryzuje się małymi, kompaktowymi wymiarami dzięki którym jest bardzo wygodna w transporcie i przechowywaniu.

Parametry techniczne:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Wymiary: 50 x 40 x 20 cm
- Waga: 1,5 kg

INSTRUKCJA OBSŁUGI;

1. Sprawdź wzrokowo produkt przed pierwszym użyciem, a także przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony. Części ruchome należy dodatkowo przetestować pod kątem sprawnego działania. W przypadku oznak uszkodzenia lub zużycia nie wolno używać wanny do mycia włosów. Nie jest wymagana dalsza konserwacja.

2. Przed użyciem umywalki do włosów wąż odpływowy można przymocować z jednej strony jako odpływ wody. W tym celu poprowadź wąż ze swobodnym końcem przez boczny otwór do na zewnątrz. Aby to zrobić, obróć rurę spustową w żądanym kierunku. Końcówkę węża należy popchnąć jak najdalej do kurka zatrzymującego. Uwaga: uchwyt w pozycji pionowej - kran zamknięty; uchwyt w poziomie pozycja - otwiera kurek do opróżniania wody. Teraz musisz umieścić wtyczkę do zamykania umywalki odpływ i mocno go dociśnij.

3. Czyszczenie / dezynfekcja: ► Do czyszczenia nie używaj ostrych, szorstkich przedmiotów ani środków czyszczących. Wszystkie części najlepiej czyścić wilgotną szmatką przy użyciu łagodnych domowych środków czyszczących. Nie susz go na grzejniku lub w bezpośrednim świetle słonecznym, lepiej użyj ręczników papierowych. Umywalkę do mycia włosów można dezynfekować bezchlorowym środkiem dezynfekującym (dezynfekcja przez wytarcie). Ważne: Podczas używania środków dezynfekujących należy przestrzegać instrukcji użytkowania producenta. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

4. Instrukcje bezpieczeństwa:

- Używaj tylko ciepłej wody o temperaturze do 38 ° C, aby uniknąć poparzeń!
- Nie pozostawiaj pacjenta bez nadzoru w (wypełnionej) wannie.
- Regularnie sprawdzaj szczelność umywalki, aby uniknąć uszkodzenia przez wodę.
- Umywalka do włosów nie jest zabawką i nie wolno jej używać do innych celów.