

SYSTAM® - Duoform® - Poduszka



Poduszka Duoform

Poduszka wykonana z dwóch wiskoelastycznych żeli uformowanych wraz z anatomiczną poduszką z wysokoelastycznej pianki HR. Zastosowana koncepcja powierzchni o zróżnicowanej gęstości.

Innowacyjne połączenie żelu z pamięcią kształtu i materiału wysokoelastycznego.

Płynny żel z efektem pamięci zapewnia redukcję maksymalnego nacisku na wrażliwe obszary. Połączenie z podstawą wykonaną z wysoce odpornej pianki zapewnia lepsze dopasowywanie się poduszki do wypukłości kostnych. Kontakt większej powierzchni poduszki z ciałem pacjenta umożliwia efektywne rozłożenie nacisku. Ponadto, wzrasta również komfort i stabilność pacjenta. Ponieważ obydwa te tworzywa są ze sobą stopione, pozwala to wyeliminować wszelkie ryzyko rozłączenia się ich z czasem.

Dostępne w różnych wymiarach.

PRODUKT PRZEDSTAWIENY W OTOCZENIU



SYST'AM® P341C / PODUSZKA DUOFORM®

PODUSZKA WYKONANA Z 2 WISKOELASTYCZNYCH ŻELI UFORMOWANYCH WRAZ Z ANATOMICZNĄ PODUSZKĄ Z WYSOKOELASTYCZNEJ PIANKI HR

MATERIAŁY

40
kg/m³



Pianka HR
wysokoelastyczna



Żel z efektem
pamięci



Zdejmowalny,
nieprzemakalny
pokrowiec
Polymaille



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:



PRZEZNACZENIE

Ryzyko

NISKIE

BARDZO
WYSOKIE



Poduszka P341C DUOFORM® powinna być stosowana w przypadku:


- 1 - istniejących odleżyn (od I do II stopnia według EPUAP). Pacjent może zmieniać pozycję siedząc lub nacisk w zagrożonych punktach jest łagodzony dzięki opiece pielęgnarskiej. LUB
- 2 - obecnego podwyższonego lub wysokiego zagrożenia odleżynami, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...). Poduszka P341C jest odpowiednia dla pacjentów: którzy w przeszłości mieli już odleżyny w miejscach ciała wchodzących w kontakt z siedziskiem; i/lub cierpią na całkowity lub częściowy paraliż tułowia lub dolnych kończyn; i/lub mają upośledzone czucie lub brak czucia w dolnej kończynie; i/lub mają upośledzoną stabilność przednią; i/lub mają lekką asymetrię postawy; i/lub są po amputacji naczyniowej; i/lub są w ogólnym złym stanie.

Poduszka może być używana wraz z różnymi wózkami inwalidzkimi, bez konieczności regulacji.

GWARANCJA

2
LATA

SYST'AM® P341C
(bez pokrowca)

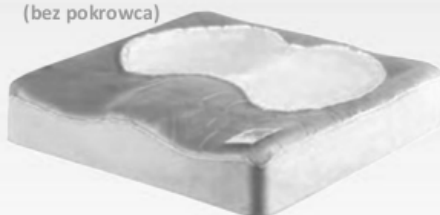

SYST'AM® P341C
(z pokrowcem)



KONCEPCJA POWIERZCHNI O ZRÓŻNICOWANEJ GĘSTOŚCI

➤ Powierzchnia o zróżnicowanej gęstości zapewnia lepsze rozłożenie nacisku dzięki przeniesieniu go z obszarów o niższej gęstości w kierunku obszarów o wysokiej gęstości.

BIŁY OBSZAR:

Nowa generacja poliuretanowego żelu płynnego z efektem pamięci i powierzchni o małej gęstości, zapewniającego maksymalną redukcję nacisku na wrażliwe obszary (kości kulszowe, kość krzyżową...).

NIEBIESKI OBSZAR:

Siatkowy żel z efektem pamięci i powierzchni o wysokiej gęstości, umieszczony w obszarach o niskim zagrożeniu odleżynami dla zwiększenia komfortu i stabilności pacjenta.

Kod artykułu	Opis	Rozmiary (cm / caly) (szer. x dł.)	Waga pacjenta (kg / funty) Min. / Max.	
P341C36361HW	Poduszka P341C DUOFORM®	36 x 36 / 14 x 14	30 / 66	70 / 154
P341C42421HW		42 x 42 / 16 x 16	40 / 88	110 / 242
P341C42461HW		42 x 46 / 16 x 18	40 / 88	120 / 264
P341C45421HW		45 x 42 / 18 x 16	40 / 88	120 / 264
P341C45461HW		45 x 46 / 18 x 18	40 / 88	140 / 308
P341C51461HW		51 x 46 / 20 x 18	40 / 88	160 / 352
P341C542421HW	P341C - DUOFORM® Soft	42 x 42 / 16 x 16	30 / 66	70 / 154


«ZALETY» PRODUKTU

INNOWACYJNE POŁĄCZENIE ŻELU I MATERIAŁU
WYSOKOELASTYCZNEGO

➤ Siatczkowany żel poliuretanowy z efektem pamięci: pozwala uniknąć przemieszczania się żelu, a tym samym chroni wypukłości kostne pacjenta. Płynny żel z efektem pamięci (biały element) zapewnia redukcję maksymalnego nacisku na wrażliwe obszary.

➤ Połączenie z podstawą wykonaną z wysoce odpornej pianki zapewnia lepsze dopasowywanie się poduszki do wypukłości kostnych. Kontakt większej powierzchni poduszki z ciałem pacjenta umożliwia efektywne rozłożenie nacisku. Ponadto, wzrasta również komfort i stabilność pacjenta.

➤ Ponieważ obydwa te tworzywa są ze sobą stopione (≠ sklejone), pozwala to wyeliminować wszelkie ryzyko rozłączenia się ich z czasem.

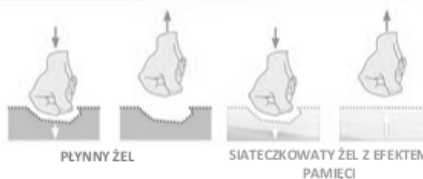

PLYNNY ŻEL

SIATECZKOWY ŻEL Z EFEKTEM
PAMIĘCI

ANATOMICZNY KSZTAŁT

➤ Większa powierzchnia ciała pacjenta wchodząca w kontakt z fotelom powoduje redukcję nacisku przeskórnego.

➤ Lepsze pozycjonowanie i stabilność pacjenta.

100% NIEPRZEMAKALNY

➤ W pełni dostosowany dla pacjentów nie trzymających moczu.

