


P301C - Poduszka pneumatyczna jednokomorowa SYSTAM Polyair®

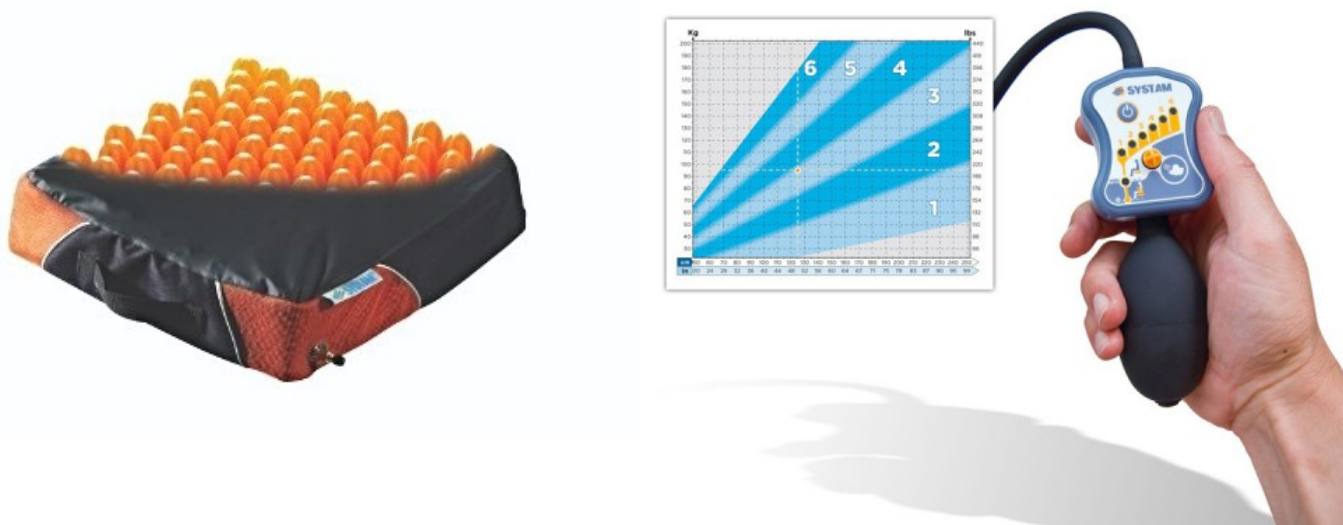

Poduszka w pełni pneumatyczna jednokomorowa

Nadaje się dla osób, które zarówno mają już odleżyny jak i dla tych u których ryzyko wystąpienia odleżyn jest wysokie lub bardzo wysokie.


Dostępne w różnych rozmiarach.

[KATALOG PODUSZEK SYSTAM + SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PDF](#)



POLYAIR®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GWARANCJA

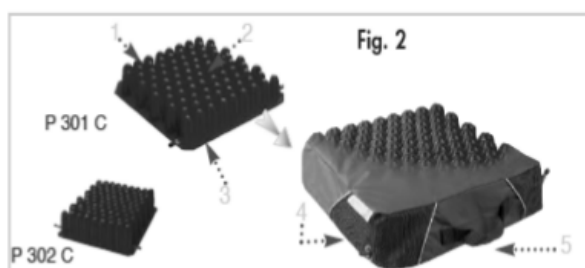

1. Tył
2. Góra
3. Przód
4. Antypoślizgowy spód
5. Rączka przód



1. Aby odpowiednio dobrać ciśnienie należy znać wagę pacjenta



2. Aby kontakt ciała pacjenta z poduszką był jak najlepszy musimy zmierzyć obwód bioder (na siedząco w najszerszym miejscu)

3. Ustaw w jednej linii na załączonym zegarze wagę i obwód pacjenta na skali, a następnie odczytaj idealną wartość jaką należy napompować każdą komorę.



4. Napompuj poduszkę do momentu, aż zapali się kontrolka wskazująca cyfrę otrzymaną w punkcie 3.



Pranie Poduszki: Poduszkę prać w letniej wodzie z mydłem, wytrzeć suchą szmatką



Pranie pokrowca: prać w temp. 40°C, nie wybielać

Na poduszkę producent udziela 2 letniej gwarancji

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)