

Lekki balkonik przestawny bez kółek



POLSKA JAKOŚĆ. PRODUKT W 100% WYPRODUKOWANY W POLSCE!

Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- lekkie, anodowane aluminium,
- konstrukcja składana,
- nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową,
- opcja: lakierowane, kolorowe rurki (kolory: czerwony, niebieski, grafit)

waga	2,90 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość	71 - max. 85 cm
szerokość	52 cm
głębokość	56 cm

Zastosowanie:

- przeznaczony głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi,
- do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,
- pomocniczo do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie,
- ułatwia poruszanie się osobom z zaburzeniami równowagi.

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.