

Wózek inwalidzki elektryczny Airwheel H3T - NFZ S.19.01



Wózek inwalidzki elektryczny Airwheel H3T - NFZ S.19.01

Airwheel H3S to w pełni automatyczny wózek elektryczny, stworzony z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych, cechujący się niezwykłą precyzją wykonania oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Został zaprojektowany z dbałością o funkcjonalność, bezpieczeństwo jazdy oraz estetykę. Jego wszechstronność sprawia, że nie tylko wygląda świetnie, ale także zapewnia pełną satysfakcję użytkownika.

Sterowanie proste i intuicyjne

Specjalny kontroler zamontowany na podłokietniku pozwala na:

- łatwe sterowanie wózkiem,
- włączanie i wyłączanie,
- regulację prędkości,
- nadawanie sygnału ostrzegawczego,
- monitorowanie poziomu naładowania baterii,
- złożenie i rozłożenie wózka.



Automatyczne składanie i rozkładanie


Dzięki jednemu przyciskowi wózek składa się i rozwija w kilka sekund, ułatwiając transport oraz przechowywanie. Po złożeniu osiąga kompaktowe wymiary 890x620x400mm, idealne do umieszczenia w samochodzie typu kombi i sedan. Złożony podnóżek pełni funkcję rączki, dzięki której możemy wózek za sobą pociągnąć.



Imponująca moc baterii

Akumulator o pojemności 20Ah zapewni zasięg do 25 km, a najnowsza technologia ładowania wydłuży żywotność baterii.

Dzięki połączeniu akumulatorów litowo-jonowych z technologią wykorzystywaną przy produkcji samochodów elektrycznych bateria waży zaledwie 3 kg czyniąc ją najlżejszą wśród dostępnych na rynku.

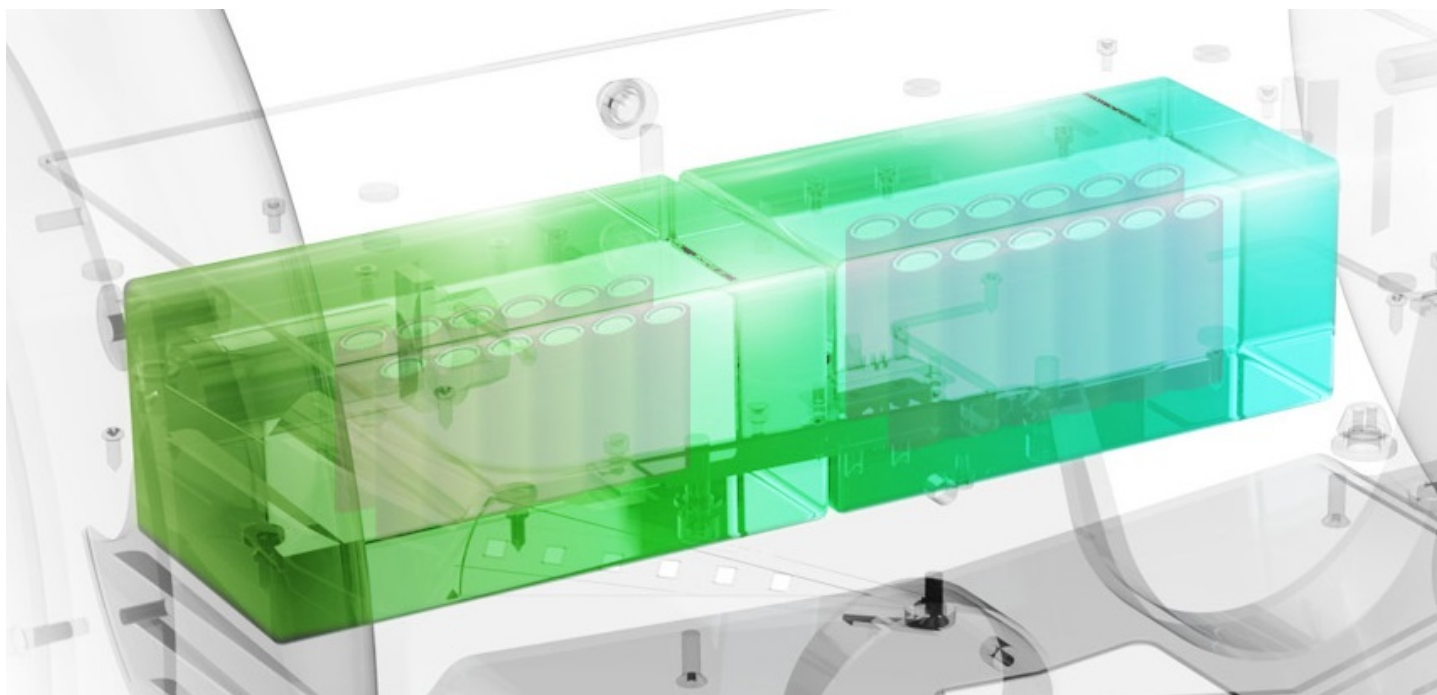

Bezpieczna jazda w każdym terenie

Bezszcotkowe silniki o mocy 2x200W , średnica koła 12,5 cali oraz terenowy bieżnik zapewnią moc jazdy w każdych warunkach. Wózek podjedzie pod podjazd o nachyleniu 15 stopni. Ponadto pokonanie krawężników, dziur oraz jazda po nieutwardzonym terenie nie będą stanowiły problemu.



Manualna możliwość prowadzenia wózka

W przypadku rozładowania akumulatora za pomocą przekładni znajdującej się przy silniku możemy przełączyć tryb jazdy na manualny i prowadzić wózek bez żadnych dodatkowych obciążeń.




Obrotowa jazda w miejscu

Obracające się o 360 stopni przednie koła umożliwiają płynną jazdę nawet w wąskich przestrzeniach, takich jak łazienka czy korytarz.



Wygodny i oddychający materiał

Siedzenie w H3 zostało wykonane z wygodnego, oddychającego i przewodnego materiału. Materiał można wielokrotnie prać, a jego struktura gwarantuje wysoką klasę odporności na zużycie i ścieranie.

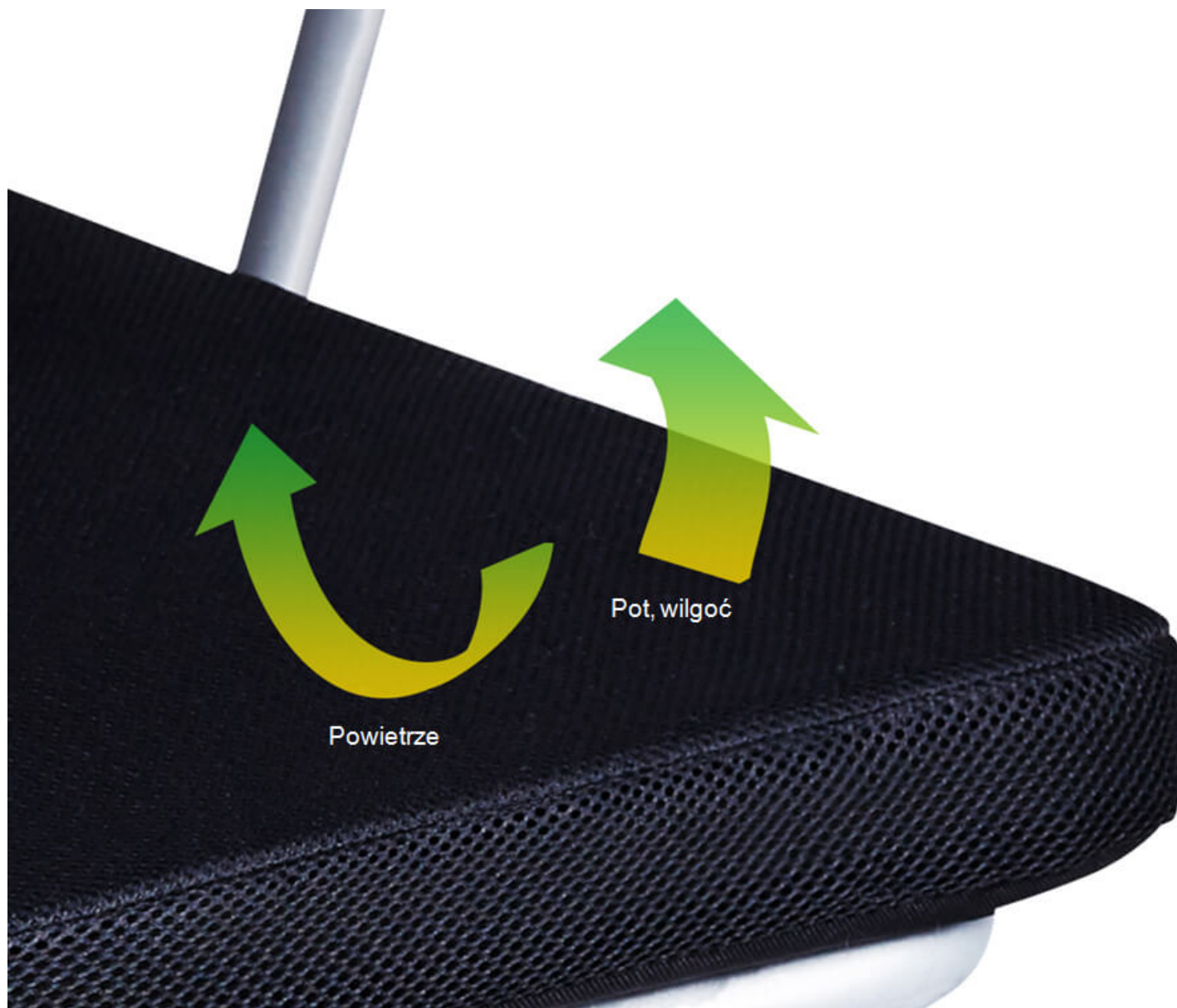

Ponadczasowa konstrukcja

Konstrukcja ramy wózka wykonana jest z mocnego i bardzo lekkiego stopu aluminium. Zastąpienie baterii żelowych litowo-jonowymi sprawia, że wózek osiągnął niewielkie rozmiary i wagę wynoszącą zaledwie 31 kg.

Jest to przełom w produkcji wózków elektrycznych na światowym rynku, których dotychczasowa waga wynosiła 100 kg.



Podnoszone podłokietniki

Airwheel został zaprojektowany z myślą o najdrobniejszych szczegółach. Dzięki modyfikacji podłokietników możesz je podnieść do góry podjeżdżając do biurka, stołu a nawet przesiąść się wygodnie do samochodu. Odchylane oparcie zapewni komfort zarówno podczas pracy jak i odpoczynku.



Wygodne przesiadanie się

Dzięki możliwości regulacji podnóżka i składania go do góry możesz wygodnie się przesiadać z krzesła lub z samochodu na wózek. Uniesienie podnóżka do góry sprawi, że wózek nie zajmie dużo miejsca w pokoju.



Oświetlenie LED

Airwheel H3S posiada wbudowane oświetlenie przednie pod kontrolerem. Umożliwia to swobodne poruszanie się na wózku w godzinach wieczornych.



Sterowanie za pomocą aplikacji

Za automatyzację odpowiada aplikacja Airwheel dzięki której możesz przywołać wózek do siebie z każdego dowolnego miejsca oddalonego o kilka metrów. Dzięki aplikacji możesz śledzić prędkość, przebieg, poziom naładowania baterii, a także złożyć i rozłożyć Twój wózek.



Sterowanie za pomocą pilota - dla opiekuna

Alternatywa dla dżojstika jest pilot, który przejmie jego funkcję w przypadku braku możliwości sterowania prawą stroną.

Za pomocą przycisków A B C D możemy rozłożyć wózek, złożyć go oraz wybrać odpowiedni tryb jazdy. Sterowanie odbywa się za pomocą dżojstika, natomiast dodatkowe przyciski umożliwią włączenie oświetlenia i sparowanie z naszym wózkiem.



Podręczne ładowanie

Ładowanie akumulatora jeszcze nigdy nie było tak wygodne.

Specjalna przejściówka podłączona jednocześnie do akumulatora i zamontowana pod łokietnikiem z prawej strony umożliwia łatwe podpięcie ładowarki bez konieczności schylania się.

Ponadto przejściówka posiada gumową nasadkę, która ochroni urządzenie przed dostaniem się wody do środka.



Modułowy akumulator

Wyjmowany akumulator zapewni jeszcze większą wygodę ładowania, bez konieczności wnoszenia całego wózka Airwheel H3S/T z sobą do domu.



Rozmiar	1100*980*620mm	Waga urządzenia	30,5kg
Rozmiar (złożony)	890*400*620mm	Max. ciężar	130kg
Rozmiar opony	8" oraz 12,5"	Max. prędkość	~6km/h
Napięcie ładowania	AC220V 50-60Hz	Max. wzniesienie	~15°
Czas ładowania	480 minut	Temperatura pracy	-10°C~40°C
Akumulator	20AH - (520Wh)	Port USB	-
Zasięg	około 35km		



Szerokość
620mm



Długość
1100mm



Wysokość
980mm



Długość
890mm



Szerokość
620mm



Wysokość
400mm



Szerokość
siedzenia
450mm



Głębokość
siedzenia
450mm



Oparcia do
ziemi
780mm



Poduszka do
ziemi
540mm



Rozstaw kół
570mm



Rozstaw osi
670mm

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)