

Maska Antysmogowa NORMAL



Maska jest wyrobem medycznym zarejestrowanym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Budowa

Została wykonana z miękkiej bawełny, aby nie podrażniać skóry twarzy w trakcie noszenia.

Dwa zawory wentylacyjne ułatwiają oddychanie oraz odprowadzają wilgoć.

Elastyczne metalowe wzmocnienie w górnej części maski pozwala dokładnie dopasować ją do kształtu nosa i twarzy.

Filtr

Sercem naszej maseczki jest filtr z aktywnym węglem klasy N99. Zatrzymuje on 99% zanieczyszczeń, w tym pyły PM_{2,5} oraz PM₁₀. Jego skuteczność potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w amerykańskim Instytucie Nelsona.

Aktywny węgiel zatrzymuje niebezpieczne dla organizmu związki chemiczne. Technologia meltblown, nadaje włóknom bawełny świetne właściwości filtracyjne.

W zestawie z maską znajduje się 1 filtr.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, filtr należy wymieniać co 20-50 godzin.

Jak używać?

Założ maseczkę tak aby zakrywała nos i usta. W górnej części maseczki znajduje się metalowe wzmocnienie, które należy ściśle dopasować do kształtu nosa. Zapnij maseczkę z tyłu głowy.

Kiedy używać?

Maseczkę zakładaj zawsze, gdy istnieje ryzyko oddychania zanieczyszczonym powietrzem, w czasie smogu oraz w dużych miastach, gdzie stężenie spalin samochodowych jest wysokie. Maseczka stanowi również świetną ochronę przed alergenami i wirusami.

Zalety:

- dostosowuje się do różnych kształtów i wielkości twarzy
- wykonana z miękkiej bawełny, nie podrażnia skóry twarzy
- dwa zawory wentylacyjne ułatwiają oddychanie
- wielorazowego użytku – filtr można wymieniać, a maskę umyć

Rozmiar:

uniwersalny M/L