

Poduszka pozycjonująca do snu CYLINDER - S z włóknem silikonowym



Poduszka pozycjonująca do snu

Poduszka wykonana z membrany powlekanej TECHMAFLEX – łatwo zmywalnej, nieprzemakalnej a jednocześnie paroprzepuszczalnej. Wypełnienie poduszki to włókno silikonowo - polistyrenowe. Mikro kulki polistyrenowe to materiał odporny na grzyby, pleśń i bakterie. Wypełnienie jest trwałe, bezzapachowe i neutralne dla otoczenia. Mikro kulki wykazują właściwości termiczne, bardzo dobrze dopasowują się do kształtu ciała.

Poduszka pozycjonująca odciąża okolice kości kręgosłupa, lędźwi, biodrowych, wspomaga utrzymanie alternatywnej pozycji pół-bocznej pod kątem 30 stopni, rekomendowanej w przypadku pacjentów przewlekle leżących.

Zastosowanie:

Odciążenie różnych partii ciała, pozycjonowanie pacjentów przewlekle chorych, regularna zmiana pozycji ciała – zarówno w warunkach klinicznych jak i domowych. W schorzeniach neurologicznych skuteczna pomoc w zapobieganiu odleżynom, a także w zapewnieniu komfortu.

W kombinacji z innymi produktami linii pozycjonującej wspomagają utrzymanie prawidłowej pozycji ciała osoby siedzącej lub leżącej.

Wymiary: śr.35 x 166 cm

Waga: 2,15 kg





CYLINDER

Zapobieganie odleżynom w obrębie kończyn dolnych

Fizjoterapeuci zalecają odwiedzenie kończyn aby zapobiec wzajemnemu naciskowi. Zastosowano poduszkę **CYLINDER** w połączeniu z **KOŁO** oraz poduszkę **KLASSIK** jako podparcie głowy.



KLASSIK

PÓŁKSIĘŻYC

CYLINDER

KLASSIK

Zapobieganie odleżynom w okolicach kości krzyżowych, kulszowych oraz pięt

Najczęstszymi miejscami powstawania odleżyn są tył głowy, barki, okolice lędźwiowo-krzyżowe, łokcie, biodra i pięty. Pacjent spędzający długi czas w pozycji leżącej lub siedzącej zsuwa się, próbując w miarę możliwości poprawiać pozycję, przez co warstwy jego skóry podlegają ciągłym wzajemnym przemieszczeniom. To, w połączeniu z fałdowaniem się pościeli znacząco zwiększa ryzyko powstawania odleżyn.



CYLINDER S

Odciążenie okolic kości krętarza i lędźwi

Wspomaganie utrzymania alternatywnej pozycji pół-bocznej pod kątem 30°, zalecanej w przypadku pacjentów przewlekle leżących zamiast leżenia na plecach. Zastosowano poduszkę **CYLINDER S**.



KLASSIK

KLASSIK

CYLINDER

Pozycja boczna 135°

Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu, pod kątem 135°, odciąża wybrane kończyny oraz okolice bioder. Pozycję uzyskano z zastosowaniem dwóch poduszek **KLASSIK** oraz poduszki **CYLINDER**.



KOŁO

Ugięcie kolan połączone z podparciem odcinka szyjnego

Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu, pod kątem 135°, odciąża wybrane kończyny oraz okolice bioder. Pozycję uzyskano z zastosowaniem poduszki **KOŁO** oraz poduszki **CYLINDER**.




Zapobieganie odleżynom w obrębie kończyn dolnych

Z zastosowaniem zespołu poduszek **CYLINDER** i **KLASSIK** po lewej, oraz **CYLINDER** i **PÓŁKSIĘŻYC** po prawej.





Pozycja boczna 135°

Uzyskana za pomocą poduszki **CYLINDER** lub **KLASSIK**.

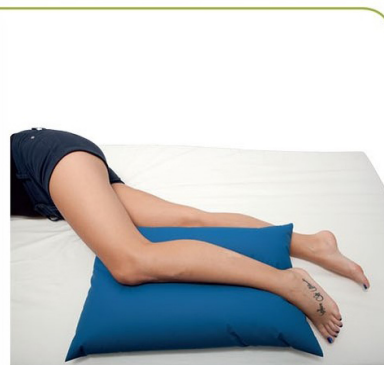

Pozycja pół-boczna 30°

Z zastosowaniem poduszki **CYLINDER** lub **CYLINDER S**.

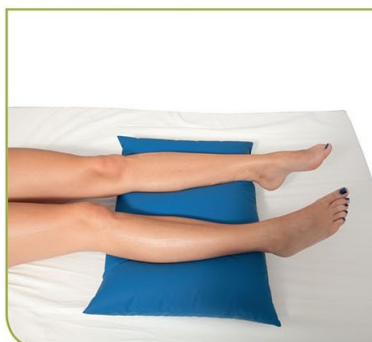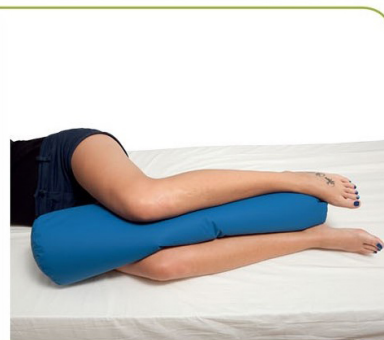

Odciążenie pięt

Poduszki ułożono pod ścięgmem Achillesa, przez co odciążono wrażliwą okolicę ucisku na piętę. Pozycję można uzyskać stosując poduszkę **KLASSIK** lub poduszkę **CYLINDER**.



Szpotała stopa

Kombinacja poduszek **CYLINDER** oraz **KLASSIK** w celu łagodzenia szpotawości stóp oraz - po prawej - poduszka **CYLINDER** w tej samej roli.



