

Poduszka do siedzenia KWADRAT - pozycjonująca z włókna poliestrowego silikonowanego



Poduszka pozycjonująca do siedzenia

Poduszka wykonana z membrany powlekanej TECHMAFLEX – łatwo zmywalnej, nieprzemakalnej, a jednocześnie paroprzepuszczalnej. Wypełnienie, w zależności od modelu to włókno poliestrowe silikonowane.

Włókno poliestrowe silikonowane – włókna te posiadają kanał powietrzny co zapewnia puszystość, sprężystość i przestrzenność wyrobu z tym wypełnieniem. Włókno jest odporne na działanie światła, czynników chemicznych i biologicznych. Produkty wypełnione włóknom mogą być prane w pralce. Dodatkowym atutem jest antyalergicznosc, umożliwiającą stosowanie przez osoby wyjątkowo wrażliwe. Zapewniają wysoki komfort użytkowania dzięki zdolności dopasowywania się do kształtu ciała pacjenta.

Wymiary: 41 x 41 cm, wysokość 7 cm

Zastosowanie

Odciążenie różnych partii ciała, pozycjonowanie pacjentów przewlekle chorych, regularna zmiana pozycji ciała – zarówno w warunkach klinicznych jak i domowych. W schorzeniach neurologicznych skuteczna pomoc w zapobieganiu odleżynom, a także w zapewnieniu komfortu.

W kombinacji z innymi produktami linii pozycjonującej wspomagają utrzymanie

prawidłowej pozycji ciała osoby siedzącej lub leżącej:

<https://www.pomocdlaseniora.pl/58-bezpieczna-pozycja-w-lozku>



CYLINDER

Zapobieganie odleżynom w obrębie kończyn dolnych

Fizjoterapeuci zalecają odwiedzenie kończyn aby zapobiec wzajemnemu naciskowi. Zastosowano poduszkę **CYLINDER** w połączeniu z **KOŁO** oraz poduszkę **KLASSIK** jako podparcie głowy.



KLASSIK

PÓŁKSIĘŻYC

CYLINDER

KLASSIK

Zapobieganie odleżynom w okolicach kości krzyżowych, kulszowych oraz pięt

Najczęstszymi miejscami powstawania odleżyn są tył głowy, barki, okolice lędźwiowo-krzyżowe, łokcie, biodra i pięty. Pacjent spędzający długi czas w pozycji leżącej lub siedzącej zsuwa się, próbując w miarę możliwości poprawiać pozycję, przez co warstwy jego skóry podlegają ciągłym wzajemnym przemieszczeniom. To, w połączeniu z fałdowaniem się pościeli znacząco zwiększa ryzyko powstawania odleżyn.



CYLINDER S

Odciążenie okolic kości krętarza i lędźwi

Wspomaganie utrzymania alternatywnej pozycji pół-bocznej pod kątem 30°, zalecanej w przypadku pacjentów przewlekle leżących zamiast leżenia na plecach.

Zastosowano poduszkę **CYLINDER S**.



KLASSIK

KLASSIK

CYLINDER

Pozycja boczna 135°

Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu, pod kątem 135°, odciąża wybrane kończyny oraz okolice bioder.

Pozycję uzyskano z zastosowaniem dwóch poduszek **KLASSIK** oraz poduszki **CYLINDER**.



KOŁO

Ugięcie kolan połączone z podparciem odcinka szyjnego


Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu, pod kątem 135°, odciąża wybrane kończyny oraz okolice bioder.

Pozycję uzyskano z zastosowaniem poduszki **KOŁO** oraz poduszki **CYLINDER**.




Zapobieganie odleżynom w obrębie kończyn dolnych

Z zastosowaniem zespołu poduszek **CYLINDER** i **KLASSIK** po lewej, oraz **CYLINDER** i **PÓŁKSIĘŻYC** po prawej.

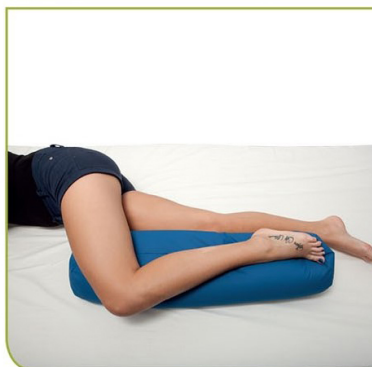



Pozycja boczna 135°

Uzyskana za pomocą poduszki **CYLINDER** lub **KLASSIK**.

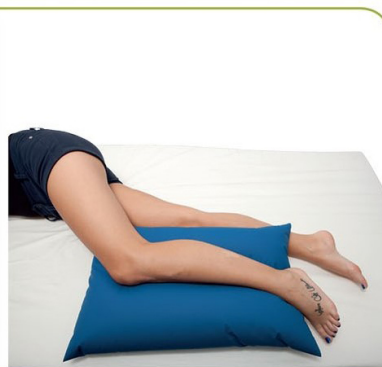

Pozycja pół-boczna 30°

Z zastosowaniem poduszki **CYLINDER** lub **CYLINDER S**.

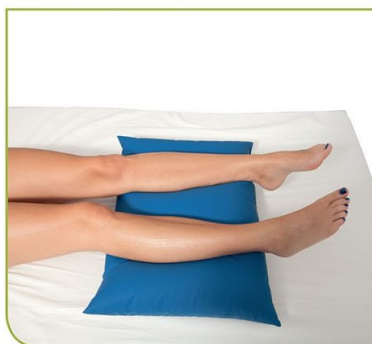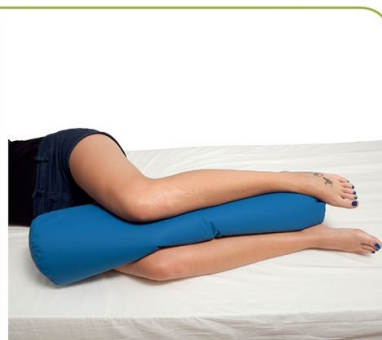

Odciążenie pięt

Poduszki ułożono pod ścięgmem Achillesa, przez co odciążono wrażliwą okolicę ucisku na piętę. Pozycję można uzyskać stosując poduszkę **KLASSIK** lub poduszkę **CYLINDER**.



Szpotała stopa

Kombinacja poduszek **CYLINDER** oraz **KLASSIK** w celu łagodzenia szpotawości stóp oraz - po prawej - poduszka **CYLINDER** w tej samej roli.



