

## Balkonik inwalidzki 3 w 1 z funkcją krzesła toaletowego i siedziska LUCA RF-803



Ten balkonik to absolutna nowość na naszym rynku, dzięki połączeniu tak naprawdę trzech funkcji spełni oczekiwania każdego użytkownika. W cenie jednego produktu klient dostaje balkonik inwalidzki, krzesło toaletowe i siedzisko, które przyda się gdy chcemy odpocząć podczas spaceru. Dzięki niemu zaoszczędzimy nie tylko pieniądze, ale także miejsce w domu. Balkonik LUCA to doskonałe rozwiązanie dla osób starszych i schorowanych, które nie mogą samodzielnie dojść do toalety. Każdy opiekun odczuje ulgę, gdy jego podopieczny dostanie to krzesło, ponieważ zostanie odciążony. LUCA RF-803 sprawdzi się zarówno w warunkach domowych jak i szpitalnych.

Balkonik ma tak skonstruowaną ramę, że osoba wstając z łóżka czy fotela może się na nim podeprzeć i bezpiecznie podnieść.

Krzesło sedesowe spełnia funkcję przenośnej toalety. Krzesło można użytkować przy łóżku pacjenta. Dodatkowo krzesło jest wyposażone w ławeczkę do siedzenia. Rama krzesła spełnia także funkcję balkonika.

- zestaw 3 w 1: z funkcją krzesła toaletowego, balkonika oraz krzesła do siedzenia
- aluminiowa, składana rama- regulacja wysokości
- ergonomiczne uchwyty na dwóch wysokościach
- szer. toalety 40 cm- szer. ławeczki 41 cm
- kółka w zestawie (2 szt.)
- max. bezp. obciążenie 100 kg
- waga 6 kg

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

### PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU  
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.



