

Rampa - aluminiowa szyna podjazdowa dla wózków inwalidzkich 180 cm model 692



Wprowadzanie skuterów i wózków z napędem elektrycznym do auta staje się łatwiejsze dzięki zastosowaniu ramp. Te składane rampy zapewnią , że bezpiecznie umieścisz ciężki skuter lub wózek elektryczny w aucie.

Maksymalne obciążenie 150 kg na rampę.

- W zestawie torba do przechowywania
- Komfortowe uchwyty do przenoszenia

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

Specyfikacja techniczna 692

						
1800	920	370	290	50	9 kg za kawałek	150 kg za kawałek

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg).




Używając ramp

Rampy są łatwe w użyciu:

1. Rozłóż rampę.
2. Połóż nakładkami antypoślizgowymi na powierzchnię, którą chcemy pokonać.
3. Upewnij się, że rampy są stabilne.
4. Wjedź pustym skuterem lub wózkiem na rampy.

- 04** Wyposażone w antypoślizgowe nakładki gwarantujące lepszą przyczepność

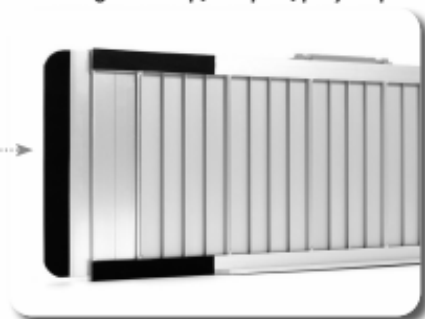

Wymiary:

- Długość po rozłożeniu 1800 mm
- Długość po złożeniu 920 mm
- Masa 9 kg (sztuka)

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

- Szerokość 370 mm (sztuka)
- Szerokość toru 290 mm
- Krawędź Ok. 50 mm

