

Tlen inhalacyjny o stężeniu 99,5% z wygodnym ustnikiem - 14L



Tlen inhalacyjny - jak działa?

Ożywia umysł i ciało, uzupełnia niedobory tlenu spowodowane wysiłkiem fizycznym, zmęczeniem, wysokościami, stresem fizycznym i psychicznym, smogiem czy stanami chorobowymi. Poza tym niweluje nieprzyjemne uczucie po spożyciu alkoholu i poprawia koncentrację.

Kto powinien używać Tlenu inhalacyjnego?

Przed wszystkim osoby u których zawartość tlenu we krwi spadnie poniżej 94% - najlepiej używać przy wykorzystaniu pusoksymetru. Produkt do stosowania w celach rekreacyjnych. Nie jest produktem medycznym.

Sposób użycia:

1. Zdejmij pokrywę z górnej części butelki.
2. Podłącz maskę tlenową do zaworka.
3. Umieść maskę centralnie na twarzy zakrywając szczelnie usta i nos. Upewnij się, że naciąg gumki jest prawidłowo ustawiony. Dopasuj metalowy klips do nosa.
4. Powoli naciskaj dyszę przytrzymując podczas wdychania w odstępach 1-2 sekundowych.
5. Po zakończeniu tlenoterapii odłącz maskę od zaworu i zakryj zawór pokrywą.

Dane techniczne

Model: FTL1

Wielkość: 65 x 370 mm

Pojemność: 1L

Objętość gazu: 14L

Ciśnienie max: 12bar

Zawartość: 99,5% tlen, 05% powietrze atmosferyczne