

SCHODOŁAZ TRANSPORTER SCHODOWY DRAGON DW-SW01



DRAGON DW-SW01

Obsługa osób starszych lub niepełnosprawnych na klatkach schodowych, może być najbardziej niebezpieczną sytuacją, z którą masz do czynienia, nawet z możliwością uszkodzeniem kręgosłupa.

Transporter schodowy Dragon, może zmniejszyć ryzyko urazu operacyjnego, ponieważ z łatwością przewozi ludzi po stopniach w górę i dół. Jest to jeden z najtańszych schodołazów dostępnych na rynku.

Nowsza wersja DW-SW01 - z wyświetlaczem cyfrowym i większymi kołami!



Idealne rozwiązanie dla:

- centrów pogotowia ratunkowego,
- straży pożarnej
- pogotowia ratunkowego,
- rodzin przewożących osobę starszą lub niepełnosprawną na górę i na dół.
- transporter schodowy DRAGON DW-SW01 to idealne rozwiązanie dla starych budynków, które nie posiadają windy.

Urządzenie jest proste w użyciu, obsługiwane przez jedną osobę, zaś trzypunktowa regulacja drążka pomaga każdemu operatorowi, dostosować urządzenie do swojej wysokości.

Cechy:


- Innowacyjne urządzenie do pokonywania schodów z systemem stair-TREAD, który eliminuje w praktyczny sposób dźwiganie osoby przewożonej podczas

poruszania się po schodach.

- Elektroniczny hamulec blokuje gąsienice, podczas postoju na wzniesieniu lub zjeździe.
- Mechanizm blokady koła zapewnia, że krzesło jest zablokowane w miejscu, niezależnie od tego, czy krzesło jest użytkowane, czy składane do przenoszenia i przechowywania.
- Duża aluminiowa powierzchnia do siedzenia pacjenta z odpinaną poduszką neoprenową, zapewnia wysoki udźwig.
- Trzypunktowy wyciąg i uchwyty zmniejszają obciążenie osoby obsługującej.
- Konstrukcja wspiera prawidłowe ergonomiczne podnoszenie, gdy występują problemy z mechanizmem.
- Wbudowana elektroniczna regulacja prędkości ogranicza prędkość jazdy podczas zjazdu na bezpieczny, możliwy do opanowania poziom.
- Zawiera akumulator litowo-jonowy, który można łatwo wyjąć i jest dostępny w sprzedaży.
- Kompaktowy rozmiar przechowywania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gwarancja	2 lata
Materiał	stop aluminium
Rozmiar (dł.*szer.*wys.)	
• Złożony	102*55*21 cm
• Rozłożony	110*60*36 cm
Udźwig	168 kg
Waga urządzenia	45 kg
Prędkość	2.2 s /stopień
Właściwość baterii	pełne ładowanie: 6-8 godzin
Czas pracy/naładowanie	2500 stopni

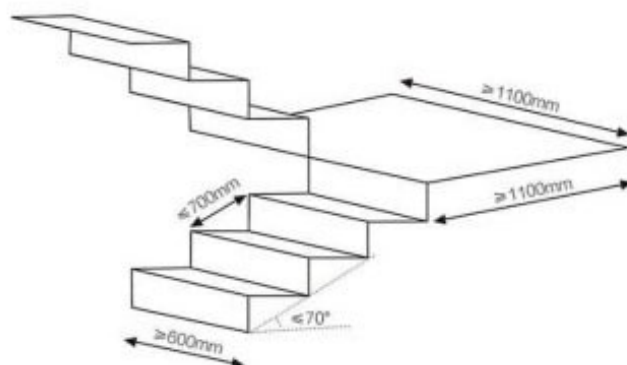

1

Typ schodów

Proste schody TAK
Zakrzywione schody NIE

2

Rodzaj schodów

Betonowe TAK
Drewniane TAK
Schody z wykładziną, nakładkami, dywanami zamontowanymi:
 • na stałe TAK
 • nie trwałe NIE

3

Przestrzeń robocza

Maksymalny kąt nachylenia : 70°
Maksymalna przestrzeń między schodami: 700 mm
Minimalna powierzchnia spocznika: 1100x1100mm
950x950 mm bez uchwytu po stronie stóp

Parametry techniczne:

Model	Transporter schodowy DW-SW03N
Rozmiar (Długość*Szerokość*Wysokość)	80*64*101/158cm
Rozmiar po złożeniu (Długość*Szerokość*Wysokość)	105*64*28cm
Rozmiar opakowania (Długość*Szerokość*Wysokość)	110*66*31cm
Maksymalne obciążenie	159kg
Waga netto	27kg
Waga z opakowaniem	45kg
Zakres regulacji wysokości	101cm to 158cm z czterema możliwymi pozycjami
Długość pasa gąsienic	78cm
Rozmiar kół	4 calowe przednie koła, 10 calowe koła tylne
Rozmiar siedziska	szerokość_41cm,głębokość_48cm,wysokość od podłogi_52cm
Rozmiar podnóżka	Szer.38cm*głębokość_20cm*wys.od podłogi_15cm
Moc wyjściowa silnika	120w
Napięcie wyjściowe silnika	20-29.4v
Napięcie przystosowane silnika	110-240v
Prąd silnika	13.9A
Napięcie baterii	24v
Żywotność	3-5 lat
Kąt toru jazdy	Kąt nachylenia gąsienic, za oparciem, z regulacją w trzech pozycjach, odpowiedni do różnych schodów

1. Dla szpitali, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, karetek pogotowia ratunkowego, rodzin do transportu pacjentów po schodach
2. Krzesiśko schodowe z napędem jest używane głównie w budynkach do przenoszenia pacjentów po schodach
3. Bardzo szeroki system przesuwny zapewniający bezpieczniejsze i łatwiejsze transportowanie.
4. Materiały, z których wykonany jest krzesiśko schodowe, są wykonane z wytrzymałego stopu aluminium.
5. Rozmiary kółek do wózka schodowego z napędem: 250/100 mm
6. System przesuwny regulowany, użytkownik może regulować szerokości
7. Czteropozycyjny drążek do podnoszenia (101 cm, 110 cm, 140 cm i 158 cm) może pomóc każdemu operatorowi w przemieszczaniu krzesiśka z napędem elektrycznym po schodach.
8. Dostępne dwa popularne kolory: opcja A. niebieski + czarny, opcja B. żółty + czarny
9. Zagłówek, stojak na kroplówkę, opcjonalny uchwyt na tlen

Przygotowanie krzeselka schodowego do użycia Sprawdzanie stanu naładowania baterii

1. Na krzeselku schodowym włącza czarny przycisk.

- O oznacza wyłączony
- I oznacza włączony



2. Naciśnij czerwony przycisk, a zielone światła zaświecą się, jeśli bateria jest naładowana.

- 1 światło = 25% naładowania
- 2 światła = 50% naładowania
- 3 światła = 75% naładowania
- 4 światła = 100% naładowania



Ładowanie baterii: na krzeselku schodowym

3. Odkręć kabel akumulatora w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.



4. Podłącz kabel ładujący baterie.

5. Po naładowaniu baterii, wyciągnij kabel ładujący, wepnij kabel akumulatora i zakręć zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.



Obsługa krzeselka schodowego, działanie

Rozłokowanie urządzenia

6. Wyciągnij krzeselko schodowe z jego miejsca przechowywania i odepnij pas, jednocześnie trzymając krzeselko w pozycji złożonej.



7. Pociągnij krzeselko schodowe w dół w kierunku podłogi i wysuwaj, aż usłyszysz kliknięcie, gdy siedzenie zablokuje się na swoim miejscu.



Rozkładanie podnóżka

8. Pociągnij podnóżek, aż ustawi się na swoje miejsce.



Wysunięcie uchwyty sterującego

9. Naciśnij poprzeczny drążek i podnieś uchwyt sterujący do góry i pozwól mu się zablokować na odpowiedniej wysokości. W zależności od wzrostu operatora, można wybrać 4 wysokości.
10. Cztery wysokości są następujące: 101cm, 110cm, 140cm i 158cm



Podnoszenie tylnych uchwytów

11. Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara czerwone pokrętło do podnoszenia tylnego uchwytu z tyłu krzeselka schodowego.



Rozkładanie płóz gąsienic

12. Popchnij dolny drążek ze strzałką do przodu w kierunku strzałki. Spowoduje to zwolnienie mechanizmu blokującego płozy gąsienic.



13. Odciągnij górną belkę gąsienic do tyłu, aż prowadnice zatrzasną się w drugiej pozycji.
14. Są trzy dziury, aby dopasować kąt nachylenia gąsienic do różnych typów schodów.



15. Naciśnij czerwony przycisk na elastycznym uchwycie.



Przygotowanie krzeselka schodowego

16. Mocno naciśnij drążek, aby zwolnić gąsienice



Składanie krzeselka schodowego

17. Wciśnij ręką blokadę drążka z czarną strzałką.
18. Gdy drążek jest wciśnięty, odsuń uchwyty od ciała, a krzeselko schodowe zacznie się składać.



Uruchamianie hamulców

19. Pociągnij drążek hamulcowy z dala od tylnych kół, aby zatrzymać krzeselko schodowe.



Zwalnianie hamulców

20. Dociśnij drążek hamulcowy do tylnych kół, aby krzeselko schodowe można było ponownie przesunąć.



Kontrola silnika

21. Naciśnij czarny przycisk, aby sprawdzić działanie silnika.



22. Włącz czerwonym przyciskiem. Są dwa przyciski ze schodami, jeden oznacza jazdę w górę, a drugi jazdę schodami w dół. Plus i minus służy do zwiększenia lub zmniejszenia prędkości zjazdu/wjazdu po schodach



CZYSZCZENIE:

Wyczyść krzeselko schodowe i jego części za pomocą czystej szmatki lub miękkiej szczotki i ciepłej wody z mydłem. Następnie spłucz ciepłą wodą i pozostaw do osuszenia. Do czyszczenia nie stosuj produktów zawierających wybielacz lub fenol. W razie potrzeby można użyć szczotki ze sztywnym włosiem.

OSTRZEŻENIE NR 1

Nigdy nie zostawiaj pacjenta na krzeselku bez opieki i zawsze używaj ograniczników.

OSTRZEŻENIE NR 2

Unikaj szybkiej zmiany pozycji, ponieważ może to spowodować obrażenia u pacjenta. Podczas regulacji uchwytów zawsze przytrzymuj krzeselko schodowe.

OSTRZEŻENIE NR 3

Niewłaściwa konserwacja urządzenia może spowodować obrażenia pacjenta. Używaj krzeselka schodowego tylko w celu opisanym w niniejszej instrukcji.