

Profesjonalny elektrostymulator TENS - aparat przeciwbólowy SDP-330 - YUWELL



Elektrostymulator TENS, model SDP-330

wyprowadza impulsy o niskiej częstotliwości. Zaleca się jego stosowanie w leczeniu dolegliwości bólowych u ludzi. Jest przeznaczony do użytku w szpitalach, klinikach, w warunkach domowej opieki zdrowotnej (w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowych reakcji podczas leczenia należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem). Stymulator nerwów i mięśni SDP330 jest zaawansowanym urządzeniem do elektroterapii, wyposażonym w 1 kanał wyjściowy, a także w regulację trybów i intensywności wyprowadzanych impulsów. Zasada działania stymulatora nerwów i mięśni SDP-330 jest podobna, jak w przypadku tradycyjnych elektronicznych instrumentach terapeutycznych, przy tym aparat stanowi połączenie nowoczesnej technologii mikrokomputerowej z metodami stosowanymi w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Aparat do elektrostymulacji prądami TENS, zasilany z wbudowanego akumulatora

ładowanego przez USB. Stosowany w terapii przeciwbólowej, do wzmacniania i rozbudowy mięśni, a także do masażu relaksacyjnego.

Jest przeznaczony do użytku profesjonalnego - w szpitalach klinikach oraz użytku domowego - w warunkach domowej opieki zdrowotnej.

Stymulator nerwów i mięśni SDP-330 jest zaawansowanym urządzeniem do elektroterapii wyposażonym w 1 kanał wyjściowy, a także w regulację trybów i intensywności wyprowadzanych impulsów. Zasada działania stymulatora nerwów i mięśni jest podobna jak w przypadku tradycyjnych elektronicznych instrumentów terapeutycznych, przy tym aparat stanowi połączenie nowoczesnej technologii mikrokomputerowej z metodami stosowanymi w tradycyjnej medycynie chińskiej.

8 trybów, 10 poziomów natężenia, wyjątkowe odczucia

Aby pozbyć się bólu, wystarczy wybrać tryb działania urządzenia, nałożyć elektrody na odpowiednią część ciała i dostosować odpowiednio natężenie impulsów.

Poziom 1-3: Mikroimpulsy

Impulsy prądu o niewielkim natężeniu, stosowane w przypadku wrażliwych części ciała

Umiarkowane impulsy

Poziom 4-7: Odpowiednie w przypadku niewielkiego i umiarkowanego bólu

Poziom 8-10: Silne impulsy

Odpowiednie w przypadku umiarkowanego i silnego bólu



Czym jest prąd TENS?

TENS, to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów sensorycznych, która jest efektywną metodą uśmierzania bólu powszechnie stosowaną i uznawaną przez fizjoterapeutów klinicznych, rehabilitantów i sportowców na całym świecie.

Prądy TENS o wysokiej częstotliwości aktywują mechanizmy blokowania bólu w systemie nerwowym wykorzystując zjawisko tzw. bramki bólowej. Impulsy elektryczne wychodzące z elektrod naklejonych na skórze nad miejscem bólu, stymulują nerwy czuciowe, aby zablokować dotarcie sygnału bólowego do mózgu, co sprawia, że ból nie jest odczuwany. Natomiast prądy TENS o niskiej częstotliwości stymulują uwalnianie endorfin, naturalnych substancji przeciwbólowych naszego organizmu. TENS nie leczy przyczyn bólu, natomiast zmniejsza jego odczuwanie. Dotyczy to zarówno bólu ostrego

jak i przewlekłego.

Zastosowanie:

Elektrostymulator TENS, model SDP-330 służy do aplikowania impulsów o niskiej częstotliwości w celu stymulacji ludzkiego ciała. Jego działanie polega na doprowadzaniu prądu elektrycznego do elektrod na skórze pacjenta w celu uśmierzania bólu.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest zabronione w przypadku następujących kategorii pacjentów:

- pacjenci ze wszczepionymi urządzeniami medycznymi;
- kobiety w ciąży, dzieci;
- pacjenci w owrzodzeniach, zadrapaniach, świeżych bliznach lub podrażnieniem skóry.

Zalecany dla osób powyżej 18 roku życia.

Elektrostymulator SDP-330 YUWELL powinien spełnić podstawowe oczekiwania osób pragnących stosować nieskomplikowane urządzenie do elektroterapii prądami TENS średniej mocy.

Co go wyróżnia?

- Mała kompaktowa obudowa;
- 8 trybów pracy;
- 10 poziomów intensywności terapii:
 - poziom 1-3 - niska intensywność - na wrażliwe części ciała;
 - poziom 4-7 - umiarkowana intensywność - dedykowane dla osób doświadczających łagodnego lub umiarkowanego bólu;
 - poziom 8-10 - wysoka intensywność - dedykowane dla osób doświadczających ostrego bólu;
- Wbudowany akumulator - nie ma konieczności wymiany baterii;
- Ładowanie za pomocą micro-USB (podczas ładowania nie można wykonywać zabiegu);
- Wysoka jakość wykonania;
- Wyrób medyczny;
- Certyfikat CE;
- Gwarancja: 1 rok.

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

W zestawie oprócz elektrostymulatora:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

- Komplet 2 elektrod;
- Kabel USB (mikro-USB);
- Ładowarka;
- Komplet przewodów połączeniowych.
- Instrukcja obsługi.

Dane techniczne

MOC	Prąd znamionowy ładowarki: DC 5 V, 1 A
BATERIA	Wielokrotnego ładowania - napięcie DC 3,7 V
MOC WEJŚCIOWA	10 VA
CZAS PRACY CIĄGŁEJ	Nie mniej niż 4 godziny
ROZMIAR ELEKTROD	Powierzchnia nie mniejsza niż 1256 mm ²

Bateria wielokrotnego ładowania – nie wymaga wymiany

200⁺ Czas pracy przy
całkowicie
naładowanej baterii

