

Cichy koncentrator tlenu z funkcją nebulizacji HELTES



Cichy koncentrator tlenu z funkcją nebulizacji HELTES

Wyrób przeznaczony do dostarczania pacjentom tlenu o wysokiej czystości. Koncentrator może być stosowany przez osoby w średnim wieku i starsze, kobiety w ciąży i inne osoby cierpiące na niedotlenienie różnego stopnia i pochodzenia. Urządzenie pomaga w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych, chorób układu oddechowego, zapalenia płuc itp. Do użytku w placówkach medycznych oraz w środowisku domowym.

Po każdym uruchomieniu koncentrator tlenu osiąga najbardziej stabilny stan po upływie około 30 minut.

Przeznaczenie:

Wyrób przeznaczony do usuwania wydzieliny katarowej z nosa w celu przywrócenia swobodnego oddychania. Ogranicza i zapobiega infekcjom dróg oddechowych.

Cechy produktu:

- Ergonomiczny kształt ułatwia pewny chwyt. Budowa wyrobu pozwala na postawienie go w pozycji pionowej.
- Cichy w użyciu, nie wywołuje stresu u dziecka.
- Nie wymaga dodatkowych filtrów.
- Łatwy w czyszczeniu.
- Bezpieczny w używaniu.
- Wodoodporny
- Wyrób medyczny
- Możliwość dokupienia dodatkowego zestawu filtrów

Zawartość opakowania:

- Urządzenie
- Kabel zasilający
- Wąsy tlenowe – 2 szt
- Nebulizator + akcesoria
- Butla nawilżacza + rurka
- Filtr Hepa oraz piankowy
- Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna

Parametry techniczne:

- Materiał: Plastik, silikon, miedź, guma, bawełna, pianka
- Kolor: Szary
- Zasilanie: Zasilanie 220V $\pm$ 22V
- Stężenie tlenu: 93% $\pm$ 3%
- System roboczy: Przepływ ciągły
- Poziom rozpylania: $\geq$ 0,15 ml/min
- Hałas generowany przez urządzenie: 45 dB (A)
- Zakres przepływu tlenu: 0-5 l/min
- Wymiary wyświetlacza LCD: 22,5 cm x 12 cm
- Wymiary opakowania jednostkowego: 34,4 x 30,6 x 56,5 cm
- Masa netto: 15 kg

Filtr powietrza można czyścić, prać:

- Wyjąć filtr powietrza znajdujący się z tyłu urządzenia.
- Umyć w roztworze ciepłej wody z płynem do mycia naczyń.
- Dokładnie spłukać ciepłą wodą z kranu i osuszyć ręcznikiem. Przed ponownym zamontowaniem filtr powinien być całkowicie suchy.
- Filtr HEPA należy wymieniać co najmniej raz na pół roku.

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)