

Kompaktowy przenośny medyczny tlen inhalacyjny 12l z maską w zestawie



Kompaktowy medyczny tlen inhalacyjny 12l z maską w zestawie

Tlen przeznaczony w przeprowadzenia szybkiej inhalacji tlenowej w każdym dowolnym miejscu. Dzięki dołączonej do puszkii nakrywki, pełniącej równocześnie funkcję ustnika, aplikację tlenu można wykonać łatwo i szybko, bez potrzeby posiadania/podłączenia dodatkowej aparatury. Wyrób pomaga w utrzymaniu prawidłowego natlenienia organizmu

Kto powinien używać Tlenu inhalacyjnego?

Tlenoterapii może poddać się każdy, zaleca się ją jednak przede wszystkim osobom u których zawartość tlenu we krwi spadnie poniżej 94% - najlepiej używać przy wykorzystaniu pusoksymetru. Produkt medyczny o największym stopniu bezpieczeństwa

Sposób użycia:

1. Zdejmij pokrywę z górnej części butelki.
2. Podłącz maskę tlenową do zaworka.
3. Umieść maskę centralnie na twarzy zakrywając szczelnie usta i nos. Upewnij się, że naciąg gumki jest prawidłowo ustawiony. Dopasuj metalowy klips do nosa.
4. Powoli naciskaj dyszę przytrzymując podczas wdychania w odstępach 1-2 sekundowych.
5. Po zakończeniu tlenoterapii odłącz maskę od zaworu i zakryj zawór pokrywą.

PARAMETRY

- Objętość gazu: 12L
- Ciśnienie: 12 bar
- Zawartość: 99,4% tlen, 0,6 % powietrze atmosferyczne