

Wózek inwalidzki aluminiowy AGILE firmy ANTAR



Prosty i funkcjonalny wózek inwalidzki AGILE!

Doskonale nada się do użytkowania na każdej powierzchni. Dzięki szybkozłączom możemy złożyć wózek, przez co idealnie nadaje się dla osób lubiących podróżować. Zawiera pas, pompkę oraz poduszkę w zestawie. Odchylane podłokietniki pozwolą wygodnie i łatwo wsiąść do wózka. Możemy również wyregulować lub całkowicie zdjąć podnóżki. Elegancki czarny kolor idealnie wpasuje się w każde otoczenie.

Cechy:

- Lekki aluminiowy wózek
- Odchylane podłokietniki
- Odchylane podnóżki z funkcją demontażu oraz regulacji wysokości
- Pas bezpieczeństwa, pompka oraz poduszka w zestawie
- Koła pneumatyczne tylne na szybkozłączkach 24"
- Łane koła przednie o dużej grubości 8"
- Maksymalna waga użytkownika: 125 kg
- Dostępne szerokości siedziska: 41, 46, 50 cm

- Kolor: czarny

Parametry techniczne:

parametry	41 (cm)	46(cm)	50 (cm)
całkowita długość	106	106	106
całkowita wysokość	95	95	95
głębokość siedziska	44	44	44
wysokość od podłoża do siedziska	49	49	49
maksymalne obciążenie	125 kg	125 kg	125 kg
szerokość siedziska	41	46	50
szerokość całkowita	64	66	72
rozmiar kół przednich	pełne, 8"	pełne, 8"	pełne, 8"
rozmiar kół tylnych	pełne, 24"	pełne, 24"	pełne, 24"
wysokość oparcia	43	43	43
waga netto	15,7 kg	16,1 kg	16.5 kg
waga brutto	18,6 kg	19 kg	19,4 kg
Kąt płaszczyzny siedziska	5°	5°	5°
Kąt nachylenia oparcia	7°	7°	7°
Kąt między nogami a siedzeniem	100°	100°	100°
Odległość podłokietnika od siedziska	22	22	22
Stabilność statyczna	Z góry: 0°~17° Pod górę: 0°~15.8°	Z góry: 0°~17° Pod górę: 0°~15.8°	Z góry: 0°~17° Pod górę: 0°~15.8°
Maksymalna waga użytkownika	125 kg	125 kg	125 kg

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.

