

TRANSPORTER SCHODOWY DRAGON DW-ST003C (MINI)



TRANSPORTER SCHODOWY DRAGON DW-ST003C (MINI)

Mniejszy model, który mieści się na węższe klaki oraz dla mniejszych pacjentów!

Obsługa osób starszych lub niepełnosprawnych na klatkach schodowych, może być najbardziej niebezpieczną sytuacją, z którą masz do czynienia, nawet z możliwością uszkodzeniem kręgosłupa.

Transporter schodowy Dragon, może zmniejszyć ryzyko urazu operacyjnego, ponieważ z łatwością przewozi ludzi po stopniach w górę i dół. Jest to jeden z najtańszych

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

schodolazów dostępnych na rynku.



Idealne rozwiązanie dla:

- centrów pogotowia ratunkowego,
- straży pożarnej
- pogotowia ratunkowego,
- rodzin przewożących osobę starszą lub niepełnosprawną na górę i na dół.
- transporter schodowy, idealne rozwiązanie dla starych budynków, które nie posiadają windy.

Parametry techniczne:

Model	Transporter schodowy DW-ST003C (MINI)
Rozmiar (Długość*Szerokość*Wysokość)	85*55*146(±3.5cm)
Rozmiar po złożeniu (Długość*Szerokość*Wysokość)	97cm*55cm*37cm(±3.5cm)
Rozmiar opakowania (Długość*Szerokość*Wysokość)	109cm*51cm*28cm(±2cm) (Drewniane pudło)
Maksymalne obciążenie	169kg
Waga netto	26±2kg
Waga z opakowaniem	35±2kg
Zakres regulacji wysokości	101cm to 158cm z czterema możliwymi pozycjami
Długość pasa gąsienic	78cm
Rozmiar kół	3 calowe przednie koła, 5 calowe koła tylne
Napięcie przystosowane silnika	110-240v 50-60Hz
Bateria	24V 13.6Ah (Max)
Żywotność	3-5 lat
Kąt toru jazdy	<35°

1. Dla szpitali, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, karettek pogotowia ratunkowego, rodzin do transportu pacjentów po schodach.
2. Krzesiło schodowe z napędem jest używane głównie w budynkach do przenoszenia pacjentów po schodach
3. Bardzo szeroki system przesuwny zapewniający bezpieczniejsze i łatwiejsze transportowanie.

4. Materiały, z których wykonany jest krzesółko schodowe, są wykonane z wytrzymałego stopu aluminium.
5. Rozmiary kółek do wózka schodowego z napędem: 125/100 mm, tylne z hamulcami
6. System przesuwny regulowany, użytkownik może regulować szerokość
7. Trójpozycyjny drążek do podnoszenia może pomóc każdemu operatorowi w przemieszczaniu transportera schodowego
8. Dostępne dwa popularne kolory: opcja A. niebieski + czarny, opcja B. żółty + czarny
9. Zagłówek, stojak na kroplówki, opcjonalny uchwyt na tlen

Przygotowanie krzesółka schodowego do użycia

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

1. Na schodolazie lub po wyjęciu baterii przekręć kluczyk do końca w prawo



2. Naciśnij czerwony przycisk, a zielone światła zaświecą się, jeśli bateria jest naładowana.

- 1 światło = 25% naładowania
- 2 światła = 50% naładowania
- 3 światła = 75% naładowania
- 4 światła = 100% naładowania




Ładowanie baterii: na schodzie

3. Odkręć kabel akumulatora w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.



4. Podłącz kabel ładujący baterie.

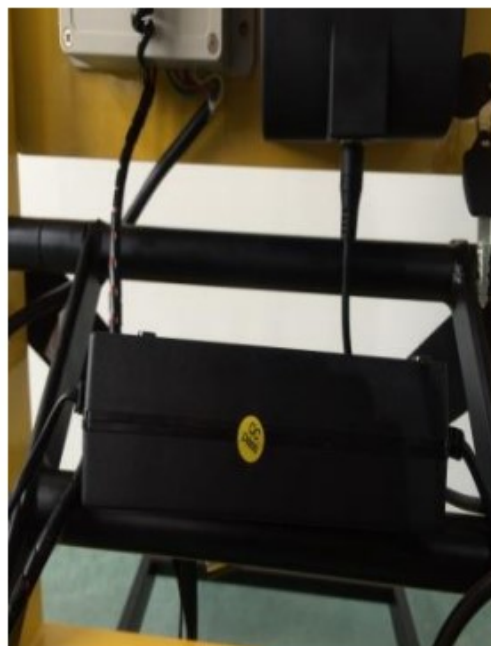

5. Po naładowaniu baterii, wyciągnij kabel ładujący, wepnij kabel akumulatora i zakręć zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.



Obsługa krzesła schodowego, działanie

Rozlokowanie urządzenia

6. Wyciągnij krzesło schodowe z jego miejsca przechowywania i odepnij pas, jednocześnie trzymając krzesło w pozycji złożonej.



7. Pociągnij krzesło schodowe w dół w kierunku podłogi i wysuwaj, aż usłyszysz kliknięcie, gdy siedzenie zablokuje się na swoim miejscu.



Rozkładanie podnóżka

8. Pociągnij podnóżek, aż ustawi się na swoje miejsce.



Wysunięcie uchwyty sterującego

9. Naciśnij poprzeczny drążek i podnieś uchwyt sterujący do góry i pozwól mu się zablokować na odpowiedniej wysokości. W zależności od wzrostu operatora, można wybrać 3 wysokości.



Rozkładanie płóz gąsienic

10. Popchnij dolny drążek ze strzałką do przodu w kierunku strzałki. Spowoduje to zwolnienie mechanizmu blokującego płozy gąsienic.



11. Odciągnij górną belkę gąsienic do tyłu, aż prowadnice zatrzasną się w drugiej pozycji.



Przygotowanie krzesła schodowego Zwolnienie gąsienic

12. Mocno naciśnij szary drążek, powyżej czerwonego drąż, aby zwolnić gąsienice



Składanie krzesła schodowego

13. Wciśnij ręką blokadę drążka z czarną strzałką.
14. Gdy drążek jest wciśnięty, odsuń uchwyty od ciała, a krzesło schodowe zacznie się składać.




Uruchamianie hamulców

15. Wciśnij mocno czerwoną klapkę mechanizmu hamulcowego stopą, aby włączyć hamulec



Zwalnianie hamulców

20. Mocno naciśnij szary przycisk, aby zwolnić hamulec.

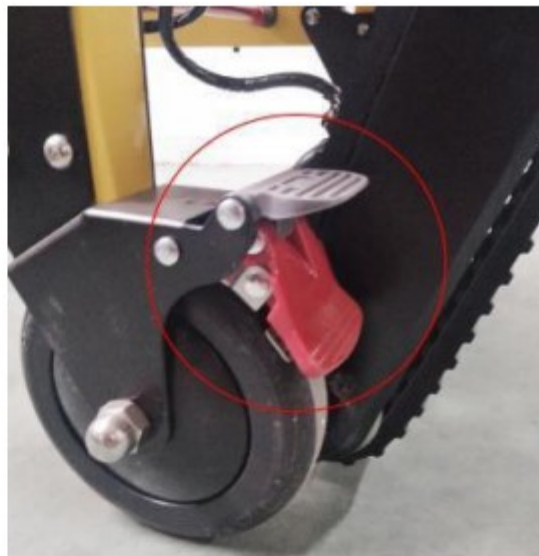

Korzystanie z zagłówka

21. W przypadku konieczności podparcia głowy pacjenta podczas transportu, można użyć zagłówka z regulacją wysokości na rzepy do unieruchomienia głowy.



Sprawdzanie silnika

22. Aby włączyć, obróć klucz do końca w prawo. Z przodu akumulatora zaświeci się czerwona lampka.



19. Włącz czerwonym przyciskiem.
20. Są dwa przyciski ze schodami, jeden oznacza jazdę w gore, a drugi jazdę schodami w dół.
21. Plus i minus służy do zwiększenia lub zmniejszenia prędkości zjazdu/wjazdu po schodach



CZYSZCZENIE:

Wyczyść krzesółko schodowe i jego części za pomocą czystej szmatki lub miękkiej szczotki i ciepłej wody z mydłem. Następnie spłucz ciepłą wodą i pozostaw do osuszenia. Do czyszczenia nie stosuj produktów zawierających wybielacz lub fenol. W razie potrzeby można użyć szczotki ze sztywnym włosiem.

OSTRZEŻENIE NR 1

Nigdy nie zostawiaj pacjenta na krzesółku bez opieki i zawsze używaj ograniczników.

OSTRZEŻENIE NR 2

Unikaj szybkiej zmiany pozycji, ponieważ może to spowodować obrażenia u pacjenta. Podczas regulacji uchwytów zawsze przytrzymuj krzesółko schodowe.

OSTRZEŻENIE NR 3

Niewłaściwa konserwacja urządzenia może spowodować obrażenia pacjenta. Używaj krzesółka schodowego tylko w celu opisanym w niniejszej instrukcji.