

## Balkonik rehabilitacyjny FIX



### Balkonik rehabilitacyjny FIX

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.

Cechy produktu:

- składana, aluminiowa rama
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi

- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

#### Parametry techniczne:

- Szerokość: 57 cm
- Wysokość: 79,5 - 97,5 cm
- Waga: 2,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzikowi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

#### PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

#### INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.