

Zestaw filtrów do koncentratora HELTES



Zestaw filtrów do koncentratora HELTES


Dodatkowy zestaw filtrów do koncentratora [HELTES](#)

Filtr wlotu powietrza: zapobiega przedostawaniu się brudu, kurzu i kłacek do urządzenia, zawiera filtr piankowy i filtr wysokiej wydajności HEPA.

Czyszczenie i wymiana filtra jest bardzo ważna ze względu na ochronę kompresora i sita molekularnego oraz wydłużenie czasu pracy koncentratora tlenu. Należy wyczyścić filtry na czas i wymienić zgodnie z wymaganiami. OSTRZEŻENIE: Koncentratora tlenu nie

należy uruchamiać przed zainstalowaniem filtrów.

Wymiana wysokowydajnego filtra (zwany filtrem HEPA). Gdy całkowity czas pracy maszyny osiągnie 3000 godzin użytkownik musi wymienić filtr HEPA. Należy otworzyć okienko filtra, wyjąć filtr HEPA, a następnie wymienić na nowy.

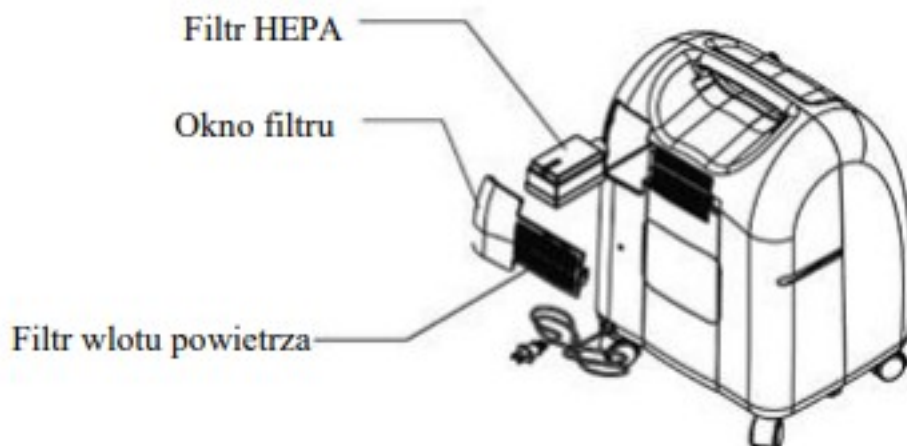

Filtr powietrza można czyścić, prać:

- Wyjąć filtr powietrza znajdujący się z tyłu urządzenia.
- Umyć w roztworze ciepłej wody z płynem do mycia naczyń.
- Dokładnie spłukać ciepłą wodą z kranu i osuszyć ręcznikiem. Przed ponownym zamontowaniem filtr powinien być całkowicie suchy.
- Filtr HEPA należy wymieniać co najmniej raz na pół roku.
- Czyszczenie pierwszego filtra piankowego. Pierwszy filtr piankowy należy czyścić raz w tygodniu. Podczas czyszczenia wyjąć filtr piankowy i spłukać czystą wodą, można go używać po naturalnym wyschnięciu.

Zestaw składa się z:

- Filtr hepa
- Filtr piankowy