

Aparat słuchowy JH351 medyczny uniwersalny dyskretny marki HAXE



APARAT SŁUCHOWY JH- 351 HAXE



Aparat słuchowy służy do kompensaty niedosłuchu u pacjentów powyżej 36 miesięcy życia. Model JH-351 to wygodny i uniwersalny aparat słuchowy. Prawy i lewy przewód umożliwia adaptację do prawego i lewego ucha pacjenta. Aparat słuchowy to wyrób medyczny przeznaczony dla osób niedosłyszących. Zaprojektowany tak, aby nie rzucać się w oczy oraz nie obciążać ucha użytkownika. Stabilne mocowanie sprawia, że można go używać w domu, w pracy, a nawet spędzając aktywnie czas na dworze.

KOMFORTOWY

Zestaw zawiera prawy i lewy przewód słuchowy, dlatego można go idealnie dopasować do prawego i lewego ucha. Wymienne wkładki uszne w trzech rozmiarach są bardzo miękkie i elastyczne. Aparaty za uszne zapewniają stabilne mocowanie i dają poczucie komfortu nawet podczas aktywności fizycznych takich jak bieganie czy jazda na rowerze.

DYSKRETNY

Mały, idealnie dopasowany aparat w kolorze beżowym jest dyskretny i niezauważalny na pierwszy rzut oka. Łatwo go ukryć co poprawia komfort użytkownika.

ŁADOWANIE USB

Aparat JH-351 ładowany jest za pomocą kabla micro USB. Aby korzystać z urządzenia, nie trzeba wymieniać baterii, a pełne ładowanie wystarcza na około 40 godzin pracy urządzenia.

PROSTA OBSŁUGA

Po włączeniu urządzenia dioda LED świeci na zielono, po wyłączeniu na czerwono. Podczas ładowania dioda świeci na czerwono, a kiedy aparat jest w pełni naładowany, dioda zmienia kolor na zielony. Oprócz przycisku włączania na urządzeniu znajduje się regulator głośności. Przycisk "+" i "-" umożliwiają regulację głośności na 4 poziomach.

W zestawie:

- 1 x Aparat słuchowy
- 3 x Wkładki uszne (różne rozmiary)
- 1 x Akcesoria do czyszczenia
- 1 x Kabel USB
- 1 x Instrukcja używania wraz z karta gwarancyjną

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Aparat słuchowy przeznaczony jest do kompensacji niedosłuchu. Aparat jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz przez pacjentów powyżej 36 miesiąca życia, jeżeli lekarz stwierdził konieczność kompensacji niedosłuchu.

Przeciwwskazania:

- Atrezja wrodzona ucha zewnętrznego lub deformacja zewnętrznego przewodu słuchowego, duża ilość ciał obcych w zewnętrznym przewodzie słuchowym.
- Głuchota jest niestabilna, a stopień utraty słuchu często waha się.
- Skargi na ból głowy, zawroty, ból ucha, szumy uszne i inne objawy, które nie nadają się do adaptacji.
- Nagła głuchota w ciągu ostatnich trzech miesięcy; szybko postępująca głuchota; jednostronna głuchota lub inna ostra choroba ucha.
- Wyсіk w uchu środkowym i częste zapalenia.
- Niedosłuch centralny; niedosłuch nieorganiczny.
- Pacjenci z ostrym zapaleniem ucha zewnętrznego i zapaleniem błony bębenkowej.
- Pacjenci z ostrym i przewlekłym ropnym zapaleniem ucha środkowego (w okresie

infekcji ropnej).

- Pacjenci uczuleni na materiał, z którego wykonano produkt

[KARTA TECHNICZNA](#)