

Nosze Podbierakowe Aluminiowe YJK-A-4 GESS



Nosze podbierakowe YJK-A-4

Nosze podbierakowe aluminiowe znane są w środowisku medycznym także pod innymi nazwami, jako nosze szuflowe lub nosze atraumatyczne. Główne zastosowanie noszy podbierakowych aluminiowych to przenoszenie poszkodowanych, którzy nie są w stanie poruszać się samodzielnie i podejrzewa się u nich złamania, uszkodzenie miednicy lub kręgosłupa. Nosze podbierakowe YJK-A-4 sprawdzą się także w sytuacjach, w których pacjent stracił przytomność. Jedną z najważniejszych cech odróżniających opisywany produkt od innych rodzajów noszy ratowniczych jest to, że zastosowanie noszy szuflowych pozwala przetransportować rannego bez konieczności poruszania jego ciałem, podnoszenia go – w ten sposób unika się niechcianych ruchów, które mogłyby spowodować pogłębienie urazu. Podbierakowe nosze medyczne to jeden z niezbędnych elementów wyposażenia wszystkich zespołów ratowniczych, jednak chętnie korzystają z nich także zastępy straży pożarnej.

Czym wyróżniają się nosze podbierakowe, zbierakowe GESS?

Nosze podbierakowe atraumatyczne YJK-A-4 oferowane przez Polską Markę GESS

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

wykonano z trwałego stopu aluminium, który wytrzymałe obciążenie do 159 kg. Produkt jest lekki i poręczny, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom komfortu w codziennej pracy ratowników medycznych i strażaków. Teleskopowa konstrukcja noszy podbierakowych atraumatycznych sprawia, że jest to produkt uniwersalny – można każdorazowo dopasować je do długości ciała poszkodowanego, zapewniając mu wygodny transport medyczny. Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantują pasy bezpieczeństwa, które są integralną częścią zestawu.

Najważniejsze cechy produktu:

- Nosze podbierakowe aluminiowe YJK-A-4 znane są także jako nosze czerpakowe, szuflowe oraz nosze atraumatyczne
- Wskazania do użycia noszy podbierakowych – w przypadku poszkodowanych nieprzytomnych, w poważnym stanie, ze złamaniami, z podejrzeniem urazu kręgosłupa
- Zastosowanie noszy podbierakowych aluminiowych umożliwia przeniesienie pacjenta bez konieczności poruszania go, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko pogłębienia urazu
- Konstrukcja teleskopowa - długość noszy można regulować w zależności od długości ciała poszkodowanego
- Wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium, pozwalające na przenoszenie chorych o wadze do 159 kg
- Nosze podbierakowe aluminiowe zostały wyposażone w pasy bezpieczeństwa, by uniemożliwić zsunięcie się przenoszonego
- W celu prawidłowej stabilizacji odcinka szyjnego, rekomendujemy używanie noszy medycznych ze stabilizatorem głowy GESS

Nosze podbierakowe aluminiowe – kiedy z nich korzystać?

Nosze podbierakowe YJK-A-4 określane są także mianem noszy atraumatycznych. Co to oznacza? Najprościej mówiąc, prawidłowe zastosowanie noszy podbierakowych aluminiowych nie wymaga podnoszenia ani obracania poszkodowanego, aby przenieść go na nosze. Dzięki temu, ryzyko pogłębienia urazu lub powstania kolejnego zostaje zredukowane do minimum. Nie bez znaczenia pozostaje także to, że wsunięcie noszy podbierakowych pod ciało poszkodowanego jest przez niego niemal nieodczuwalne, przez co nie powoduje wzrostu poziomu zdenerwowania i stresu u przytomnego chorego wymagającego transportu.

Nosze podbierakowe instrukcja użytkowania

Jeśli zastanawiasz się, jak używać noszy podbierakowych YJK-A-4, poniżej prezentujemy

ich prawidłowe zastosowanie przez służby ratunkowe. Nasze podbierakowe atraumatyczne stosuje się zazwyczaj do przetransportowania poszkodowanego na nosze transportowe lub deskę ortopedyczną, które będą docelowym środkiem transportu medycznego. Należy przygotować nosze podbierakowe i położyć je równolegle obok ciała poszkodowanego, a następnie dopasować ich rozmiar do długości ciała w taki sposób, aby głowa i nogi nie wystawały poza ich zarys. Kolejnym krokiem jest rozłączenie noszy na dwie połowy i położenie ich po bokach poszkodowanego. Przed przystąpieniem do dalszego etapu należy zapewnić odpowiednią stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa – może być ona wykonana ręcznie lub przy użyciu stabilizatora głowy do noszy ortopedycznych, który również jest dostępny w ofercie Polskiej Marki GESS. Kolejnym krokiem jest wsunięcie dwóch połówek noszy podbierakowych pod ciało poszkodowanego z obydwu stron i połączenie ich przy pomocy specjalnego zatrzasku. Przy korzystaniu z noszy podbierakowych aluminiowych YJK-A-4 przy transporcie poszkodowanego należy zabezpieczyć go przed upadkiem z noszy za pomocą specjalnych pasów bezpieczeństwa, znajdujących się w zestawie. Po wykonaniu tych czynności, zespół ratowniczy po wydaniu komendy synchronizującej podnosi nosze i przenosi pacjenta na docelowy środek transportu lub do pojazdu medycznego. Po udanej procedurze ewakuacyjnej następuje rozpięcie noszy na dwie połowy i ich delikatnie wysunięcie spod ciała poszkodowanego.

Nosze podbierakowe YJK-A-4 - parametry techniczne:

- Maksymalne obciążenie - 159 kg
- Materiał – stop aluminium
- Kolor – stalowy