

Komora tuba inhalacyjna dla dzieci DEPAN



KOMORA INHALACYJNA DEPAN

komora inhalacyjna DEPAN przeznaczona jest do bezpośredniego aplikowania leków wziewnych za pomocą inhalatorów ciśnieniowych MDI. Powstała w środku komory mgiełka ułatwia inhalację leku oraz pozwala na podanie go w maksymalnej ilości. Ścianki wykonane z antystatycznego materiału na dłużej zawieszają aerozol co zapobiega szybkiemu ulatnianiu się leku i daje pacjentowi więcej czasu na inhalację, zapewniając podanie pełnej dawki leku. W przeciwieństwie do leków aplikowanych z inhalatorów proszkowych (blistrowych czy kapsułkowych), przy stosowaniu komory inhalacyjnej mniej leku osadza się w jamie ustnej, co nie doprowadza do grzybic i stanów zapalnych.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Dla kogo przeznaczona jest komora DEPAN?

Wyrób przeznaczony jest dla osób przyjmujących leki w formie wziewnej oraz dla osób, które nie mogą samodzielnie przeprowadzać aplikacji leku wziewnego (np. niemowląt, dzieci).

Zawartość opakowania:

- komora o pojemności 175 ml,
- 1 maseczka na twarz dla dzieci od 1. dnia życia,
- 1 maseczka na twarz dla dorosłych.

Ostrzeżenia: 1. Przed rozpoczęciem inhalacji należy skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą. Nie należy przyjmować żadnych leków na własną rękę i w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 2. Komora powinna być przechowywana z dala od dzieci. Komora nie jest zabawką. 3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy komora nie ma widocznych uszkodzeń ani obcych obiektów w środku. 4. Nie używać jeśli wyrób jest uszkodzony. 5. Komora nie powinna być sterylizowana ani myta w zmywarce. 6. Każdy poważny incydent medyczny związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mieszka.

Przechowywanie oraz czyszczenie: komora powinna być przechowywana w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Komora powinna być czyszczona regularnie, w miarę możliwości zaraz po użyciu. Do czyszczenia należy użyć letniej wody z niewielką ilością delikatnego detergentu. Po umyciu komora oraz maska powinny być pozostawione do samodzielnego wysuszenia w temperaturze pokojowej.