

## Aspirator manualny do nosa odciągacz kataru dla dzieci Depan



## Aspirator manualny do nosa odciągacz kataru dla dzieci Depan

Aspirator manualny służy do szybkiego, komfortowego i bezpiecznego odciągania wydzieliny z nosa. Może być stosowany u dzieci już od pierwszego dnia życia. Dzięki zastosowanej technologii „anti-backflow” aspirator zapewnia higienę użytkowania. Zawartość opakowania: aspirator do nosa składający się z ustnika, wężyka, miękkiej końcówki przystosowanej do noska dziecka oraz zbiornika na wydzielinę.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

## Sposób użycia:

1. Przed użyciem upewnić się, że wyrób jest czysty.
2. W celu bezpiecznego i wygodnego odciągnięcia wydzieliny z noska dziecka ułożyć dziecko wygodnie na plecach, twarzą skierowaną do góry.
3. W przypadku suchej lub bardzo gęstej wydzieliny można delikatnie wkropić do nosa dziecka niewielką ilość soli fizjologicznej przed rozpoczęciem używania wyrobu.
4. Końcówkę aspiratora ostrożnie włożyć do otworu nosowego dziecka, a ustnik do ust osoby wykonującej czynność.
5. Powoli zasysać powietrze przez ustnik, stopniowo zwiększając siłę, aż wydzielina zacznie się gromadzić w zbiorniku aspiratora.
6. W razie potrzeby czynność powtarzać, aż do całkowitego odciągnięcia wydzieliny z nosa.
7. Po użyciu rozłożyć aspirator na części oraz dokładnie umyć każdą z nich pod ciepłą (ale nie gorącą) wodą z mydłem. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie złożyć.

**Ostrzeżenia:** nie wkładać końcówki aspiratora do nosa dziecka zbyt głęboko. Nie używać w przypadku zaobserwowania objawów zapalenia lub zranienia wnętrza otworu nosowego dziecka lub w przypadku wystąpienia krwawienia z nosa. W sytuacji wystąpienia wymienionych lub innych niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem. Wyrobu nie wolno w żaden sposób sterylizować. Nie podłączać do odkurzacza ani innych urządzeń ssących. Wyrób przeznaczony do stosowania tylko i wyłącznie w otworach nosowych. Nie używać jeśli wyrób jest uszkodzony.

**Przechowywanie:** przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, w temperaturze 5oC – 35oC, w suchym miejscu. Zachować ostrożność, wyrób nie służy do zabawy. Każdy poważny incydent medyczny związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mieszka.