

Miska do kąpieli w łóżku i higieny intymnej pacjenta pompowana Rosshe



Misa dmuchana Rosshe

pozwała bez uciążliwego przenoszenia osoby leżącej umyć ją w łóżku. Instrukcja jak to zrobić krok po kroku przedstawiona jest poniżej. Przygotuj osobę leżącą na kąpiel w najbardziej komfortowych dla niej warunkach. Oprócz misy pneumatycznej Rosshe potrzebne będą jeszcze, niebędące w zestawie: dwa ręczniki; jeden do wytarcia osoby, drugi do jej przykrycia, środek do mycia, miękka gąbka, pompka, czyste wiaderko, rękawice jednorazowe, ciepła woda lub woda ze środkiem przeciwdoleźynowym (dostosuj poziom wody do osoby).

Zastosowanie dmuchanej misy Rosshe:

Zapewnia komfort podczas codziennej higieny:

- Dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych, codzienna higiena może być trudna i męcząca. Produkt ten zapewnia wygodne i bezpieczne miejsce do

przeprowadzania podstawowych czynności higienicznych, takich jak mycie ciała.

- Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu i konstrukcji, osoba korzystająca z tego produktu może cieszyć się większym komfortem i łatwością podczas wykonywania tych czynności.

Ułatwia opiekę i pracę osobom pomagającym:

- Opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi może być wymagająca fizycznie i emocjonalnie. Ten produkt zmniejsza obciążenie opiekunów poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia do przeprowadzania czynności higienicznych.
- Dmuchane ścianki oraz dostęp do odpływu wody ułatwiają opiekunom przeprowadzanie kąpieli lub innych procedur higienicznych w sposób bardziej ergonomiczny i wygodny.

Ma dmuchane, wygodne dla leżącego ścianki:

- Dmuchane ścianki, w formie poduszek, zapewniają dodatkowe wsparcie i wygodę osobie leżącej na produkcie.
- Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają trudności z utrzymaniem stabilnej pozycji ciała lub wymagają wsparcia w celu uniknięcia obtarć czy otarć skóry podczas wykonywania czynności higienicznych.

Zabezpiecza łóżko przed zamoczeniem:

- Produkt posiada właściwości wodoodporne, wilgoć, co jest istotne w przypadku osób, które mogą mieć trudności z kontrolowaniem wydalania.
- Zapobiega to zamoczeniu materaca czy łóżka, co ma znaczenie dla utrzymania higieny w miejscu, w którym przebywa osoba wymagająca opieki.

Posiada odpływ do spuszczenia wody:

- Odpływ umożliwia wygodne spuszczenie wody, co jest szczególnie istotne podczas przeprowadzania kąpieli lub innych czynności wymagających płynów.
- Ułatwia to utrzymanie czystości i higieny produktu oraz zapewnia komfort zarówno osobie korzystającej, jak i opiekunowi.

Wymiary:

Wymiary zewnętrzne wanny po napompowaniu powietrzem: długość x szerokość x wysokość 90cm x 88cm x 17cm

Zestaw nie zawiera pompki. Misę można napompować za pomocą pompki ręcznej, nożnej lub mobilnego kompresora.



Zapraszamy do zakupu pompki z naszej oferty - Kod produktu: PLPM028.