

Chodzik czterokołowy z funkcją siedzenia ROSE - VITEA CARE - NFZ



PODPÓRKA REHABILITACYJNA ROSE Z PODNÓŻKIEM

Doskonałej jakości chodzik czterokołowy z funkcją siedzenia to prosta pomoc dla seniora podczas spaceru. Przeznaczony jest dla wszystkich osób starszych i niepełnosprawnych, które pragną być samodzielne i mobilne. Chodzik czterokołowy wyposażony jest w funkcję siedzenia, dzięki której można wygodnie wypocząć podczas spacerów. Miękkie siedzisko chodzika zapewnia wygodę i komfort pasażera. Pojazd wykonany jest na ramie z ciekłego aluminium, które zapewnia wytrzymałość i stabilność podczas użytkowania.

Chodzik z funkcją siedzenia to także wygodne koła które zapewniają nieskomplikowaną obsługę i płynność manewrowania pojazdem. Chodzik czterokołowy z funkcją siedzenia to prosty w obsłudze, bardzo wygodny pojazd dla wszystkich miłośników ruchu na świeżym powietrzu. Doskonale sprawdzi się również w warunkach domowych, ułatwiając poruszanie.

Cechy produktu:

- składana rama aluminiowa (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- hamulce z możliwością blokady
- cztery pełne koła o średnicy 20 cm, przednie koła skrętne
- regulowana wysokość
- ergonomiczne uchwyty
- torba na zakupy
- demontowana barierka oparcia z możliwością przełożenia gdy podpórka spełnia funkcję transportową
- możliwość rozłożenia podparcia dla nóg użytkownika

Dane techniczne:

- Rozmiar kół: średnica 20,5 cm
- Wysokość: 81-96 cm
- Wysokość siedziska: 53 cm
- Wymiary siedziska: 31 x31 cm
- Całkowita szerokość (z kołami): 62 cm
- Maksymalna masa użytkownika: 120 kg
- Waga chodzika: 8 kg
- Długość: 66 cm
- Długość rozłożonych podnózek: 90 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.