

Zestaw do zakładania wyrobów uciskowych SIGVARIS DOFF N' DONNER



Zestaw do zakładania wyrobów uciskowych SIGVARIS DOFF N'DONNER to innowacyjne urządzenie ułatwiające zakładanie i zdejmowanie pończoch, rajstop czy skarpet. Komplet składa się z dwóch elementów, z których jednym jest wykonana z tworzywa podstawa, druga zaś - silikonowy walec. Zestaw SIGVARIS DOFF N'DONNER to całkowicie innowacyjny, wręcz rewolucyjny przyrząd do zakładania uciskowych rajstop. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna już od pierwszego użycia. Wystarczy pończochę lub rajstopę naciągnąć na przymocowaną do gładkiej powierzchni podstawę i nasunąć pończochę górną częścią w dół. Walec z kolei nakładamy od góry na podstawę, naciągamy na niego pończochę lub skarpetę i tak wykonane zawiniątko wsuwamy na nogę. I tyle. Cała obsługa SIGVARIS DOFF N'DONNER.

To rewelacyjna, prosta pomoc dla wszystkich osób, którym zakładanie rajstop czy skarpet uciskowych sprawia kłopot. Z tym zestawem nie musicie Państwo się schylać ani kucać. Korzystanie z zestawu do zakładania wyrobów uciskowych jest tak proste, że nawet osoba o ograniczonej motoryce bez problemu sobie poradzi. Prosimy zapoznać się z instrukcją użytkowania, jak jest prosta. W zestawie SIGVARIS DOFF N'DONNER znajduje się tuba i elastyczny rękaw.

Sposób użycia przyrządu Doff N'Donner

1. Naciągnąć wyrób przeciwżylakowy na podstawę przyrządu Doff N'Donner.
2. Nasunąć silikonowy walec na naciągnięty wyrób.
3. Podciągać walec razem z wyrobem, wywijając wyrób na lewą stronę aż do momentu, gdy walec dotrze do górnej części podstawy. Wyrób musi być całkowicie nawinięty na silikonowy walec. W wyrobach z palcami zamkniętymi powinien być widoczny szew palcowy. Wyroby z palcami otwartymi należy nawijać aż do momentu, gdy pojawi się zakończenie stopy.
4. Zdjąć walec z nawiniętym na niego wyrobem.
5. Wsunąć walec z wyrobem na nogę, poczynając od części palcowej.
6. Powoli podsuwać przyrząd w górę nogi aż do całkowitego nałożenia wyrobu.
7. Zdjąć silikonowy walec z nogi.
8. Po nałożeniu wyrobu dopasowujemy prawidłowe ułożenie stopy przede wszystkim w okolicach pięty. Polecane jest użycie w tym celu gumowych rękawic.