

Pneumatyczna wanna do kąpieli chorego na leżąco w łóżku



Pneumatyczna wanna do kąpieli chorego na leżąco w łóżku

Ta specjalna wanna przeznaczona jest do mycia i pielęgnacji chorych niesprawnych ruchowo. Stosuje się ją bezpośrednio na łóżku pacjenta. Dzięki prostej konstrukcji oraz wykonaniu z wyjątkowo wytrzymałych materiałów wanna jest rozwiązaniem podstawowego problemu przed jakim staje każdy, kto chce umyć osobę niesprawną, leżącą w łóżku. Dzięki konstrukcji pneumatycznej wanna jest bardzo lekka i miła w dotyku dla chorego. Pompowanie może odbywać się przy pomocy ręcznej lub nożnej pompki, butli ze sprężonym powietrzem, mobilnego kompresora, itp. Całość przechowywana jest w specjalnej torbie. W cenie wanny jest dodatkowe wyposażenie !

Główne cechy produktu:

Budowa

Wanna pneumatyczna składa się z komory pneumatycznej wyposażonej w zawór wlotu i

wylotu powietrza, zawór bezpieczeństwa oraz komorę mycia z rurą spustową wody. Zawór wlotu-wylotu wyposażony jest dodatkowo w przejściówkę umożliwiającą pompowanie komory z butli na sprężone powietrze, drugą przejściówkę do pompowania z kompresora lub z butli powietrznej, pompy elektrycznej lub pompki nożnej.

Materiał

Wannę produkowana jest z najwyższej klasy materiału sprowadzonego z Izraela, z tkaniny poliuretanowej TPU o gramaturze 430g/m² na bazie siatki z nylonu.

Jest to materiał stosowany do produkcji kombinezonów nurkowych, kamizelek ratunkowych i produktów medycznych.

Właściwości

- Tkanina Nylon 235 dtx 105 [gr/m²]
- Waga Standard ASTM D 751 430 [gr/m²]
- Odporność na pęknięcie Standard ASTM D 751 procedura B 100/80 [kg/5 cm]
- Wytrzymałość na rozdarcie Standard ASTM D 751 procedura B 1.7 [kg]
- Przyczepność powłoki (zgrzew HF) Standard ASTM D 751 - sucha - po zamoczeniu 15 [kg/5cm] 10 [kg/5cm]
- Wytrzymałość na zimno -40 oC
- Przepuszczalność powietrza 0.48 bara na 10 min

Parametry wanny:

- wymiary zewnętrzne: 110 x 190 mm
- wysokość boków wanny: 20 cm
- waga: 3 kg
- Zawór wlotowo - wylotowy
- Rękaw spustowy do wody

- Komplet naprawczy
- Pokrowiec na wannę
- kolor wanny - szary

Wypożyczenie dodatkowe (znajduje się również w cenie basenu !):

1. Wąż 15m
2. Ręczny pistolet natryskowy z możliwością zamykania/otwierania dopływu wody
3. Adapter do kranów wewnętrznych - rozgałęziacz wody Adapter do kranów wewnętrznych umożliwia podłączenie systemu do kranu wewnątrz mieszkania, np. w kuchni lub w łazience. Pasuje do wszystkich kranów, zarówno z gwintem zewnętrznym, jak i z gwintem wewnętrznym. Adapter umożliwia niezwykle szybkie podłączanie i odłączanie. Wystarczy w tym celu wymienić głowicę perlatora. Dołączone narzędzie montażowe znacznie ułatwi tę czynność. Adapter zapobiega rysowaniu armatury i pasuje do kranów z gwintami wewnętrznymi M 22 x 1 oraz zewnętrznymi M 24 x 1
4. Pompka nożna

Instrukcja użytkowania:

Wannę pneumatyczną wsuwamy pod pacjenta, (podobnie jakbyśmy wsuwali czyste prześcieradło), a następnie w prosty i szybki sposób pompujemy (pompką nożną, ręczną, lub elektryczną, taką jak do materaców turystycznych lub pontonów). Rozbieramy osobę chorą. Napełniamy wannę ciepłą wodą wlewając ją prosto z wiadra, lub doprowadzamy przewód prysznica (poprzez wąż z zaworem zamocowany w prosty sposób do najbliższego kranu w łazience lub w kuchni po jednej stronie, i z prysznicem po drugiej) i myjemy chorego prysznicem.

Po wykąpaniu pacjenta otwieramy specjalny zawór umieszczony rogu wanny (podstawiamy miskę lub kubek) i wypuszczamy wodę. Po wytarciu pacjenta, wysuwamy spod niego wannę. Łóżko pozostanie suche. Cały zabieg pielęgnacyjny można wykonać w ciągu kilkunastu minut, co jest szczególnie ważne w przypadku osób leżących, których ciała szybciej się wychładzają. Kąpiel może wykonać jedna osoba. Wanna nadaje się do zastosowania zarówno na łóżkach rehabilitacyjnych jak i na zwykłych tapczanach czy wersalkach. Po złożeniu nie zabiera dużo miejsca. W swojej torbie zmieści się do każdej szafy, szuflady lub zwyczajnie pod łóżko.

Czas oczekiwania na dostawę to 3 dni robocze !

